




Tana

WERNER & MERTZ

Spezialprogramm für den Krankenhausbereich

APESIN DESINFEKTIONS-SPRAY

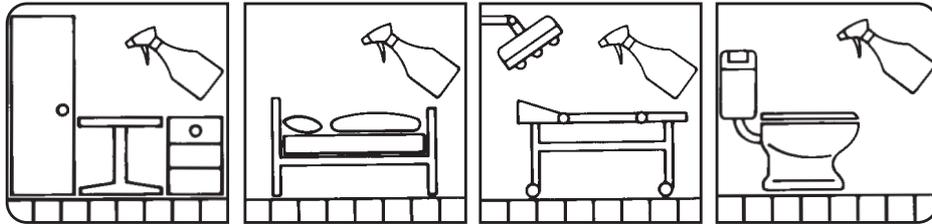

bakterizid, fungizid, virusinaktivierend

Zusammensetzung:

100 g APESIN DESINFEKTIONS-SPRAY enthalten: 70 g Isopropanol, 0,1 g Polyamine. Weitere Inhaltsstoffe: Parfümöl. pH-Wert ca. 9.

Leistung:

Schnellwirkendes Flächendesinfektionsmittel. Bakterizid, fungizid, virusinaktivierend (Hepatitis B, AIDS). Farblos, angenehm im Geruch, sehr gut hautverträglich. Auch zur Desinfektion von OP-Schuhen geeignet.

Chlor-, aldehyd-, phenolfrei. Geprüft und begutachtet nach den Richtlinien der Liste DGHM.

Anwendungsbereich:

Zur Desinfektion von Geräten, Mobiliar und Flächen in Klinik und Arztpraxis. Desinfiziert werden können z.B. Matratzen, Bettgestelle, Transportwagen, Instrumentenablage, Badmatten und -roste, Abfalleimer, Toilettensitze, Armaturen, Türgriffe, Möbel- und Arbeitsflächen, Geländer, Schuhe, Strümpfe etc. sowie alle schwer zugänglichen Stellen. Nicht auf alkoholempfindlichen Materialien (z. B. Plexiglas) anwenden.

Anwendung:

Unverdünnt anwenden. Aus einer Entfernung von 20-30 cm Gegenstände direkt so ansprühen, daß eine vollständige Benetzung der Flächen erzielt wird, oder auf ein Wischtuch sprühen und wischen.

Besondere Hinweise:

VbF B. Leichtentzündlich. Enthält Isopropylalkohol. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

Nicht in Flammen oder auf glühende Körper sprühen. Nur in gut gelüfteten Bereichen anwenden. Im Brandfall mit Wasser löschen. Nach Richtlinie UVV § 7 sind bei Umgang mit Desinfektionsmitteln Handschuhe zu tragen.

Aufbringung: Max 50 ml/m². Keine größeren Flächen einsprühen (max. 2 m²).

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Produktcode: GD 0
EAK-Schlüssel: 070604

Art.-Nr. 04766

1000 ml Fl./6 Fl. i. K.



TANA-CHEMIE GmbH

Ingelheimstraße 1-3, D-55120 Mainz
Telefon: 0 61 31/9 64-03, Telefax: 0 61 31/9 64-24 14
Internet: www.tana.de

WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH

Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein
Telefon: 0 62 45 / 8 74 86, Telefax: 0 62 45 / 87 28 67 07
Internet: www.wmprof.com