


PtSIN rapid

Kurzzeitdesinfektionsreiniger

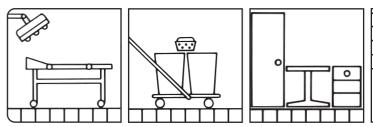

 Begutachtet nach DGHM und DVG
 In 0,25%iger Gebrauchslösung wirksam gegen Bakterien, Pilze, HBV/HIV, Rotaviren und Adenoviren • Mit nachfüllbarer Dosierflasche

Zusammensetzung:100 g APESIN rapid enthalten 11 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 8,4 g Cocospropylendiaminguanidiniumdiacetat, 10 g Bis-aminopropyldodecylamin, 16 g Isopropanol, 5-15% nichtionogene Tenside, unter 5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe. pH-Wert ca. 10,5.

Leistung:
Neuartige Wirkstoffkombination mit breitem Wirkungsspektrum bei extrem niedriger Anwendungskonzentration. Frei von Formaldehyd und sonstigen Aldehyden. Hervorragende Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Gute sensorische Akzeptanz bei Anwendungspersonal und Patienten. Dermatologisch getestet. Einsetzbar in dezentralen Dosiergeräten (BAM-geprüft). Bei Einsatz der I Dosierflasche einfache und zuverlässige Dosiermöglichkeit durch die integrierte Dosiervorrichtung. Hohe Ergiebigkeit bzw. extrem wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration bei gleichzeitig kurzer Einwirkzeit.

Anwendungsbereich:

Auf allen wasserfesten Materialien im gesamten Krankenhausbereich, sowie in lebensmittelverarbeitenden Bereichen einsetzbar. Geeignet für Flächen und Gegenstände wie z.B. PVC/PP/PE/Plexiglas, Gummi, Kunstharze, Linoleum, Messing, VA-Stahl, verchromte Armaturen usw. Durch das breite Wirkungsspektrum bei gleichzeitig kurzer Einwirkzeit auch bestens geeignet für Bereiche, die in besonderem Maße vor Infektionen geschützt oder von denen bevorzugt Infektionen ausgehen können. Geeignet auch für emulsionsgepflegte Böden.

Anwendung/Dosierung:

Hospitalismusprophylaxe nach DGHM: HBV/HIV:

0,25%ig / 60 min. 0,5%ig / 30 min. 0,25%ig / 60 min 0,5%ig / 30 min.

Rotaviren:

1,0%ig / 60 min. 3,0%ig/ 30 min. 0,25%ig / 5 min. Papovaviren:

0,25%ig / 60 min. 0,5%ig / 30 min. 0,5%ig/ 240 min.

Flächendesinfektion gem. DVG: z. B. Bereich A + B bei 10 °C / 20 °C 0,5%ig/ 60 min. Bei 0,25%iger Dosierung 20 ml (= 1 Portion der Dosierkammer) auf 8 l Wasser geben. Für jedes Naßwischverfahren geeignet. APESIN rapid ist in 0,5%iger Lösung auch zur desinfizierenden Sprühextraktionsreinigung bestens geeignet.

Zur Dosierung: Weißen Flaschenverschluß abschrauben. Leichten Druck auf den Flaschenkörper geben, bis Dosierkammer gefüllt ist. Druck zurücknehmen. Konzentrat stellt sich auf die genaue Füllmenge von 20 ml ein. Das Ausgießen wie bildlich dargestellt durchführen.



ır Nachfüllung: Roten Flaschenverschluß abschrauben. Leere 2 l Dosierflasche mit Zur Nachtullung: Kolen Flaschen Volschieber.

APESIN rapid aus 2 | Nachfüllbeutel befüllen.

Rote Verschlußkappe aufschrauben.

Bei Einsatz des 5 | Kanisters 20 ml (= 1 Hub der Dosierpumpe) auf 8 I Wasser geben.

Besondere Hinweise:

Ätzend. Enthält quarternäre Ammoniumverbindungen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen. Darf nicht in die Hände von Kindem gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch-und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe.

Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

UBA 0947 0305 Produktcode: GD 40 EAK-Schlüssel: 070608

Frostempfindlich

2 | Btl./ 6 Btl. i. K. Art.-Nr. 04605 2 | Fl./ 4 Fl. i. K. Art.-Nr. 04604 Art.-Nr. 04603 5 | Kanister



WERNER & MERTZ PROFESSIONAL Vertriebs GmbH

Neualmerstraße 11-13, A-5400 Hallein

Telefon: 0 62 45 / 8 74 86, Telefax: 0 62 45 / 87 28 67 07

Internet: www.wmprof.com

TANA-CHEMIE GmbH

Ingelheimstraße 1-3, D-55120 Mainz Telefon: 0 61 31/9 64-03, Telefax: 0 61 31/9 64-24 14

Internet: www.tana.de