



ventisept liquid AF

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion

- Noro-Viren wirksam
- alkoholisch
- aldehyd- und phenolfrei
- In verschiedenen Duftvarianten



Fresh



Lemon



Peach



Melone

Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Medizinprodukte und Flächen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Aldehydfreie Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Aufgrund der aldehydfreien Formulierung ist eine Verfärbung von Flächen nahezu ausgeschlossen.

ANWENDUNG

Zur Wischdesinfektion (empfohlen) eine ausreichende Menge **ventisept liquid AF** auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen abwischen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein.

Zur Sprühdesinfektion (nur für schwer zugängliche Oberflächen empfohlen) **ventisept liquid AF** aus mindestens 30 cm Abstand auf die Oberflächen aufsprühen. Die Oberflächen müssen während der erforderlichen Einwirkzeit vollständig benetzt sein.

Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. die Oberflächen mit einem sauberen Einmaltuch trocken wischen.

Optimaler Einsatz in Verbindung mit unserem ventiwipes Vliestuchspendersystem.

WIRKUNGSSPEKTRUM

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-, Grippeviren)
- Adeno-/Rota-Viren
- Noro-Viren

EINWIRKZEITEN UND KONZENTRATIONEN

(Gebrauchsfertige Lösung! Nicht verdünnen!)

bakterizid, levurozid, tuberkulozid	1 min
Inaktivierung von behüllten Viren wie HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia- und Grippe-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI)	30 sek
Adeno-Viren	1 min
Rota-Viren	1 min
Noro-Viren (MNV)	5 min

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten:

42,0 g Ethanol

0,05 g Didecylmethylammoniumchlorid

Enthält Duftstoffe.

DOSIERHILFEN

Dosierpumpe für 500 ml und 1000 ml

Schaumsprühkopf für 500 ml und 1000 ml

Dosierpumpe für Kanister, Kanisterumfüllhahn Kanisterschlüssel



LIEFERFORMEN

Fresh		
Größe	Artikelnummer	PZN
500 ml	20 36 01	10924681
1 ltr	20 36 15 G	06920664
5 ltr	20 36 03	06920684

Lemon		
Größe	Artikelnummer	PZN
1 ltr	20 37 05 G	06920747
5 ltr	20 38 02	06920776

Peach		
Größe	Artikelnummer	PZN
1 ltr	20 37 15 G	06920701
5 ltr	20 37 02	06920724

Melone		
Größe	Artikelnummer	PZN
5 ltr	20 39 05	-----

GUTACHTEN UND ZERTIFIKATE

Dr. Suchomel, Hygienikerin, Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. VAH/DGHM-Richtlinien.

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/Main:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. VAH/DGHM-Richtlinien.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Noro-, Adeno-, Vaccinia-Viren, BVDV, HBV,

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. VAH/DGHM-Richtlinien.

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit gem. EN 14348.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber Noro-Viren (MNV) gem. EN 14476.

Gutachten zur Wirksamkeit/Standzeit in Verbindung mit ventiwipes gem. 4-Felder-Test.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Entspricht den Anforderungen der EU-Biozidprodukte-Verordnung.

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte.



BESONDERE HINWEISE

Nicht bei alkoholempfindlichen Flächen wie beispielsweise Acrylglas anwenden.

KENNZEICHNUNG GEMÄß GEFÄHRSTOFFVERORDNUNG

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

DATEN ZUR UMWELT

Alle Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE).

Die Behältnisse und Verschlüsse der Kanister sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen.



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Stand der Informationen 10/2016