

Flächendesinfektion



ALPET D2

ALPET D2

PRODUKTMERKMALE

- **60 Sekunden Einwirkzeit erhöht die Effizienz**
- **Hohe Aktivität gegen Biofilme, Fette und Öle**
- **Schnelle Verdunstung zum Schutz von wasserempfindlichen Geräten**
- **Direkt verwendbar, ohne Abspülen**
- **Antibakterielle und bakteriostatische Wirkung unterstützt Hygiene**

AKTIVE INHALTSSTOFFE

Isopropanol: 58.6 %

Octyl Decyl Dimethyl Ammonium Chlorid :
0.0075 %

Didecyl Dimethyl Ammonium Chlorid :
0.0045 %

Dioctyl Dimethyl Ammonium Chlorid :
0.0030 %

PHYSIKALISCHE und CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Klare, farblose Flüssigkeit mit charakteristischem Alkoholgeruch.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Reinigen Sie alle Gegenstände, Oberflächen und Geräte vor der Anwendung.
- Sprühen oder wischen Sie Alpet D2 auf die Fläche, bis diese ausreichend befeuchtet wurde.
- Die Einwirkzeit auf der Oberfläche beträgt 60 Sekunden.

Alpet D2 is ÖGHMP und VAH gelistet.

WIRKSAMKEIT

EN 1040

15 Sekunden

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa

EN 1275

15 Sekunden

- Candida albicans

prEN 13727

15 Sekunden

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae

EN13624

15 Sekunden

- Candida albicans

DGHM Methoden

Quantitativer Suspensionstest
(unter hoher Belastung)

30 Sekunden

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Candida albicans

DGHM Methoden

Flächendesinfektion - quantitativer Träger
Mit Mechanik unter hoher Belastung

30 Sekunden

- Staphylococcus aureus
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterococcus hirae
- Candida albicans

Viren (DVV & RKI Richtlinie)

Vaccinia virus, strain Estree*

60 Sekunden

Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV)

60 Sekunden

Influenzavirus Type A (H5N1)

60 Sekunden

Human Immunodeficiency Virus (HIV 1)

60 Sekunden

***Begrenzt viruzid gemäß DVV & RKI Richtlinie.**

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

SARAYA Europe

Sint-Annadreef, 68b, 1020 Brüssel, Belgien
Tel.: +32-2-790-27-44 Fax: +32-2-476-25-87
Email: hands@saraya-europe.com

www.saraya-europe.com