


APESIN AP 100



Sauerstoffaktiver Desinfektionsreiniger-Pulver

bakterizid, fungizid, tuberkulozid, virusinaktivierend

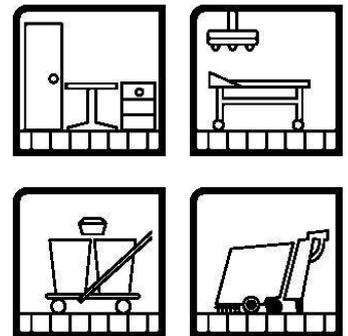

Zusammensetzung:

AP100 enthält: 78g Mg- Monoperoxyphthalat-Hexahydrat, 15-30% anionische Tenside.

pH-Wert der 0,5%igen Gebrauchslösung: ca. 6.

Leistung:

Desinfiziert und reinigt in einem Arbeitsgang. Löst selbst festhaftenden Schmutz bzw. Schmutzverkrustungen. Hervorragende Reinigungskraft und hohes Schmutztragevermögen. Hervorragende toxikologische und ökologische Eigenschaften. Keine Geruchsbelästigung auch bei Verwendung von warmem Wasser. Frei von Aldehyden, Phenolen, chlorabspaltenden Desinfektionswirkstoffen, Lösungsmitteln und Phosphaten. Auch für LONGLIFE *hospital* beschichtete Böden bestens geeignet.

Dosierung/Einwirkzeit:	15 Min.	30 Min.	60 Min.	240 Min.
DGHM-VAH geringe org. Belastung mit Mechanik	1%		0,50%	
TBC			2%	1,5%
Polioviren			0,75%	
Vakziniaviren			0,75%	
Adenoviren			0,75%	
Papovaviren			0,75%	
Hep. B/HIV	1%	0,50%		
Desinfektion gem. §18 IfST Wirkbereich AB (Viren) Scheuerdesinfektion				4%
Geprüft nach EN 13704:				
• Clostridium difficile				1%
• Bacillus subtilis				1,5%

Wirksam gegen alle behüllten und unbehüllten Viren, z.B. Norovirus.

Hervorragend wirksam gegen Antibiotika-resistente Bakterien wie z.B.: MRSA.

RKI-gelistet.

Anwendungsbereich:

Auf allen abwaschbaren Flächen im gesamten klinischen Bereich (insbesondere in Risikobereichen) sowie in Sanatorien, Pflegeanstalten, Arztpraxen, Krankenzugwagen u.ä. einsetzbar. Auch für mit Pflegedispersionen eingepflegte Böden bestens geeignet.

Best. Nr.: 0404708

20g

Anwendung:

Eimer mit 8L Wasser füllen und AP 100-Pulver hineingeben (2 Beutel = 40g, ergibt eine 0,5%ige Lösung). In den empfohlenen Anwendungskonzentrationen für jedes Nasswischverfahren geeignet. Fläche wie gewohnt wischen. Speziell auch zur Desinfektion hochempfindlicher Materialien wie z.B. Makrolon und Plexiglas (u.a. Inkubatoren auf der Frühgeborenenstation) geeignet. Stets auf vollständige Benetzung (z.B. 40ml/ m²) achten. Reinigungsutensilien gut mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise:

Reizend. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Produkt bei Raumtemperatur und nur im Originalgebinde aufbewahren. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
N-14175, N-14178, MZ nr 0708/04

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Produkt-Code:GD 10

