


APESIN AP 3

Desinfektions-Reiniger

bakterizid, fungizid, virusinaktivierend

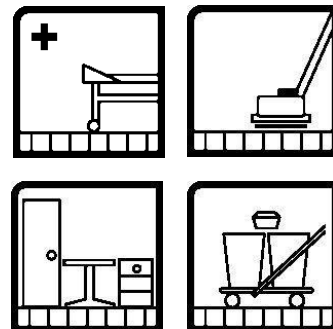

Zusammensetzung:

100 g APESIN AP3 enthalten: 5,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 5-15% kationische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Linalool, Limonene, Geraniol. pH-Wert: ca. 4,5.

Leistung:

APESIN AP 3 desinfiziert und reinigt in einem Arbeitsgang. Bakterizid, fungizid und virusinaktivierend. Wirtschaftliches Kombinationspräparat. Sehr gute Reinigungswirkung. Frei von Aldehyden, Phenolen, chlorhaltigen Desinfektionswirkstoffen und Phosphaten. Keine Geruchsbelästigung. Auch für mit Pflegedispersion eingepflegte Böden bestens geeignet.

Umfassend geprüft und begutachtet nach bzw. für:

Dosierung/Einwirkzeit	15 min.	30 min.	60 min.	240 min.
DGHM-VAH geringe org. Belastung	3%	2%	1%	0,5%
DGHM-VAH hohe org. Belastung			1,5%	0,75%
HBV (Hepatitis)	3%		2%	
HIV	3%		2%	

Anwendungsbereich:

Zur gleichzeitigen Desinfektion und Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände im gesamten klinischen Bereich, Arztpraxen sowie in Sanatorien und Pflegeeinrichtungen einsetzbar. Ebenso für alle hygiene-relevanten Bereiche der Pharma-/ Kosmetikindustrie geeignet.

Anwendung:

APESIN AP 3 eignet sich für jedes Nasswischverfahren. Zur exakten Dosierung TANA-Dosierpumpe verwenden. Fläche wie gewohnt wischen. Die Anwendung im 2-Stufen-Verfahren vermindert die Gefahr einer zu langen Fußbodennässe. Stets auf vollständige Benetzung (z.B. 40ml / m²) achten. Reinigungsutensilien gut mit Wasser reinigen.

Besondere Hinweise:

Ätzend. Enthält Didecyldimethylammoniumchlorid, Guanidin, N,N'-1,3-Propandiyldis-, N-Kokos-alkylderivate. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. N-19239 / N-19240

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschrohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Produkt-Code: GD 40

Best. Nr.: 0404787 Kanister 10L
Best. Nr.: 0404789 Beutelchen 100 x 60ml

2x packshots  **tana**
PROFESSIONAL