

DESOMED® RAPID AF

Schnelldesinfektion

von Medizinprodukten gem. MPG
sowie Flächen gem. Biozid- Richtlinie

aldehyd- und phenolfrei
dermatologisch getestet

Produktbeschreibung

DESOMED® RAPID AF ist eine gebrauchsfertige, gänzlich aldehydfreie Sprüh-/Wischdesinfektion auf Ethylalkoholbasis zur wirksamen und schnellen Desinfektion kleiner Flächen.

DESOMED® RAPID AF ist geeignet für eine schnelle und erhöhte Infektionsprophylaxe, z.B. im Altenheim, in ärztlichen und zahnärztlichen Praxen, im OP zur Schnelldesinfektion des Inventars, für Transportmittel, Rettungswagen und OP-Kleidung, für alle Shelteranlagen sowie für Arbeitsflächen in Laborbereichen. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet.

DESOMED® RAPID AF ist sehr gut materialverträglich und für die Anwendung auf Kunststoff geeignet. Es ist mit anderen Sprühdessinfektionen kompatibel, trocknet schnell ab, bietet angenehm frischen Duft, gute Hautverträglichkeit und hinterlässt **keine gelben Flecken**.

DESOMED® RAPID AF entspricht der TRGS 525/540: Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen.

Umfangreiche Wirksamkeit gegenüber Viren- auch wirksam gegen **Norwalk-like-Viren**.

Anwendungsbereiche

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und –reinigung von alkoholbeständigen Flächen.

Anwendung

Flächen und Gegenstände werden aus mind. 30 cm Abstand bis zur vollständigen Benetzung besprüht. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit einem Einmaltuch nachwischen. Die Anwendung von

DESOMED® RAPID AF hat praktisch keine Belagsbildung zur Folge. Zur Schnelldesinfektion von medizinischem Inventar im Sinne des MPG sowie von anderen Flächen gem. Biozidgesetz.

Konzentration und Einwirkzeit

Einwirkzeit gem. neuer VAH-Richtl. 09/2001 : konz.- 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH)

Tbc:	konz.- 1 Min.
Rota/Adeno/HCV:	konz.- 1 Min.
HBV/HIV:	konz.- 2 Min.
Noro-/ Norwalk-like-Viren (FCV)	konz.- 15 Min.

Wirkungsspektrum

DESOMED® RAPID AF wirkt:

- bakterizid inkl. **Tbc, MRSA**
- fungizid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, Rota-, Adeno-, Vakzinia, **Noro-/ Norwalk-like-Viren**)

Inhaltsstoffe

100 g Lösung enthalten:
42,00 g Ethanol
0,05 g Dimethyldidecylammoniumchlorid

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates:	klare, farblose Lösung
pH-Wert:	ca. 7,0
Dichte (20,0 °C):	ca. 0,935
Flammpunkt nach DIN 51 755:	25 °C

**auch mit Lemon-Duft und
parfümfrei erhältlich**



CE 0482

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt/M.:

Fachhygienisches Gutachten über die Eignung des Präparates als Flächendesinfektionsmittel vom 30.11.2000.

Prof. Dr. Wille, Hygieniker, Gießen:

Fachhygienisches Gutachten über die Eignung des Präparates als Flächendesinfektionsmittel vom 16.06.1998.

Dr. Färber, Hygieniker, Gießen:

Fachhygienisches Ergänzungsgutachten gem. neuen VAH-Richtl. 9/2001 vom 17.12.2003.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur HBV/HIV-Wirksamkeit vom 04.06.1998.

Gutachten zur Rota-Viren Wirksamkeit vom 10.12.1999.

Gutachten zur Norwalk-like-Viren Wirksamkeit (FCV) vom 04.04.2005.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 12.12.2000.

Konrad Hornschuch AG,

Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESOMED® RAPID AF** zur Anwendung an skai-Polstermaterialien, 09.08.2005.

Listungen

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der VAH. Registriert als Biozid-Produkt bei der baw (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baw Reg.-Nr.: N - 21919.

Lieferformen

Einzelpackung	Verk.-Einheit	Art.Nr.
100 ml-Handsprühflasche	30 x 1 Liter	015-00010(L)
500 ml-Descoflexflasche	20 x 500 ml	015-00050(L)
1-Liter-Descoflexflasche	10 x 1 Liter	015-00100(L)
2-Liter-Beutel	6 x 2 Liter	015-00200(L)
5-Liter-Kanister	3 x 5 Liter	015-00500(L)
10-Liter-Kanister	1 x 10 Liter	015-01000(L)
* Zusatz für die Duftvariante Lemon		
Parfümfrei		
1-Liter-Keulenflasche	10 x 1 Liter	015-00100
10-Liter-Kanister	1 x 10 Liter	015-01000

Dosierhilfen

- Sprühkopf für 1-Liter-Handsprühflasche
- Kanisterumfüllhahn

Besondere Hinweise

Entzündlich, Flammpunkt nach DIN 51755: 25 °C. Nicht in offene Flammen oder auf heiße Gegenstände sprühen. Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 50 ml je m² Raumgrundfläche betragen. Behälter dicht geschlossen halten. Vor Zündquellen fernhalten. Desinfektionsmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nicht einnehmen!

Alkoholempfindliche Oberflächen und Acrylglas-Kunststoffe nicht besprühen!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Schreiber/kk/06/2006