



# THERMO CLEAR

Spezialklarspüler für

thermische Steckbeckenautomaten

- schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- sehr schaumarm eingestellt

✓ mit Korrosionsinhibitoren  
✓ mit speziellen Enthärtungskomponenten

✓ mit Korrosionsinhibitoren



CE

## PRÄPARATETYP

**THERMO CLEAR** ist geeignet zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen. Es gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, verhindert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist sehr schaumarm eingestellt.

**THERMO CLEAR** ist biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung, da es auf Zitronensäure-Basis aufgebaut ist.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Thermo Clear ist zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen aller führenden Hersteller geeignet.

Thermo Clear verhindert die Verkalkung von Steckbeckenspülen.

Hinweis: Nicht anwenden für nicht-thermische Steckbeckenspülen und für thermische Steckbeckenspülen der Firmen Arjo oder Getinge.

## ANWENDUNG

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z.B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die Maschinendesinfektion zugänglich sein. **THERMO CLEAR** zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen.

**Hinweis (bei Programmeinstellung beachten):**  
Zudosierung erst ab 30 °C.

## DOSIERUNG

Je nach Automatentyp und Wasserhärte: 1 - 3 ml/l  
(siehe Herstellerangaben) (0,1 - 0,3 ‰)

Dosierung durch Fachpersonal durchführen!  
Eine Dosiertabelle in Abhängigkeit von der Wasserhärte kann zur Verfügung gestellt werden.

## ZUSAMMENSETZUNG

Zitronensäure, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

**Aussehen des Konzentrates:** klare, farblose Lösung  
**pH-Wert, Konzentrat:** 2,0 + / - 0,5  
**Dichte (20 °C):** 1,045 g/ml

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
5 L Kanister	3 x 5 L	-	00-127-050

## DOSIERHILFEN

Kanisterumfüllhahn, Dosierpumpen für Kanister, Kanisterschlüssel.

## BESONDERE HINWEISE

Reizt die Augen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

## PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

## UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen  
Telefon +49/5664/9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)