



DESIFOR-B

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

Einsatzbereich

Universell einsetzbares Produkt zur prophylaktischen Routinesinfektion und Reinigung in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Praxen, für alle wasserfesten Oberflächen und Böden.



Anwendung

Flächen mit Desifor-B Lösung wischen. Konzentration und Einwirkzeit beachten.

Wirksamkeit

| Einsatzbereich | Dosierung | Einwirkzeit |
|---|-----------|-------------|
| VAH-Liste mit Mechanik, geringe Belastung Bakterizide und Levurozide | 2,0% | 15 Min. |
| | 1,5% | 60 Min. |

Produkteigenschaften

- Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang
- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Gute Materialverträglichkeit
- Frei von Aldehyden, Alkalien, Säuren und Chlor
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid

Hinweis

Produkt nur mit kaltem Wasser anwenden! Gemäß UVV sind beim Umgang mit desinfizierenden Reinigern auch in der Anwendungslösung Schutzhandschuhe zu tragen.

Wirkstoffe

100 g Lösung enthalten:
 3,6 g Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchlorid
 2,7 g Didecyldimethylammoniumchlorid
 0,5 g Polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid

Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gemäß EU Detergentienverordnung.

Technische Informationen

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr. 00514
 Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 20517

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05, GHS09

baua Reg.- Nr. N-52744
 Verwendungskategorie Hauptgruppe 1 Produktart 2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. 02/15

pH conc 0 2 4 6 6 10 14

DR.SCHNELL Chemie GmbH
 Taunusstraße 19 · D-80807 München
 Tel. +49/(0)89/35 06 08 0
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE