



DESIFOR-QUICK PLUS

Flüssiges Schnelldesinfektionsmittel

Einsatzbereich

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel zur rückstandsfreien und schnellen Desinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen und in der Lebensmittelindustrie. Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion u. Reinigung von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten. Gem. Biozidprodukte-VO: Zur Desinfektion u. Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders geeignet für Lebensmittelindustrie, Küchen und Küchenbereiche in medizinischen Einrichtungen.

Anwendung

Zu desinfizierende, gereinigte Flächen vollständig mit konzentriertem DESIFOR-QUICK PLUS benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeiten beachten.

Technische Informationen

Karton mit 2 Fl. à 1 Liter,
2 Sprühaufsätze

Art.-Nr. 00523

Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z. B. Acrylglas). Ausbringung max. 50 ml/m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 ml/m² Raumgrundfläche betragen.

Wirkstoffe

100 g Lösung enthalten 45,0 g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Achtung; GHS02

Baua Reg.-Nr. N-22859, N-22860
CHZN1998



Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Humanmedizinischer Bereich: VAH-Liste, ohne Mechanik, hohe Belastung, Bakterizidie und Levurozidie	konz. 5 Min.	lt. Gutachten wirksam nach 1 Min.
Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen: bakterizid u. levurozid (EN 1276, EN 1650, EN 13697)	konz. 1 Min.	20 °C hohe u. niedrige Belastung
Tuberkulose-Bakterien (<i>M. terrae</i>)	konz. 30 Sek.	gem. EN 14348, niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 30 Sek.	gem. DW-/RKI-Leitlinie 08/2008
Noroviren (MNV)	konz. 1 Min.	gem. EN 14476
Rotaviren	konz. 30 Sek.	gem. EN 14476

Produkteigenschaften

- VAH-gelistet; aufgeführt in IHO-Desinfektionsmittel- und IHO-Viruzidie-Liste
- Frei von Duft- und Farbstoffen (gem. LFGB)
- Trocknet rückstandsfrei ab
- Aldehydfreie Schnelldesinfektion
- Bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- Wirksam gegen Noro- und Rotaviren
- begrenzt viruzid – alle behüllten Viren z. B. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenzaviren
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0118

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE