



# DESIMATIC-S

## Klarspüler und Entkalker für die thermische Aufbereitung in Steckbeckenautomaten

### Einsatzbereich

Flüssiger Klarspüler und Entkalker für die maschinelle Aufbereitung in thermisch arbeitenden Steckbeckenautomaten, in denen Urinflaschen, Saugflaschen und Einsatzkörbe mit Utensilien aufbereitet werden.

### Anwendung

Dosierung erfolgt automatisch und wird in Abhängigkeit von der ortsspezifischen Wasserhärte optimal eingestellt. Entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller wird das Konzentrat an die Dosierpumpe angeschlossen\*.

Die Verwendung von enthärtetem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und verringert den Produktverbrauch. Bei einer starken Verkalkung des Heizstabes ist vorab eine Entkalkung z.B. mit PEROTEX EK zu empfehlen.

Dosierempfehlung\*: Wasserhärte ≤ 10 °dH - 0,5 ml/l  
Wasserhärte > 10 °dH - 1,0 – 1,5 ml/l

\* Dosierung durch Fachpersonal durchführen

### Produkteigenschaften

- Gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- Schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Schaumarme, umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duftstoffen
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

### Technische Informationen

Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20590

### Zubehör

Zapfhahn Art.-Nr. 80075  
Dispenser für Kanister Art.-Nr. 80301

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): keine



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0616

pH conc 

|   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|----|----|----|
| 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|----|----|----|

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taunusstraße 19 · D-80807 München  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE