

neodisher® SBK

Diese Information ist nicht für die Schweiz gültig.

Flüssiges Spezialklarspülmittel zum Einsatz in Steckbeckenautomaten



Hauptanwendungsbereiche:

Härteabbindung und Klarspülung bei der maschinellen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in Steckbeckenautomaten mit Dampfdesinfektion.

Eigenschaften:

neodisher SBK ist ein leicht sauer eingestellter Klarspüler mit speziellen Enthärtungskomponenten. Durch das gute Kalkbindevermögen und die Benetzung wird das Spülgut fleckenfrei und ohne Kalkablagerungen klargespült.

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz entstehen keine Kalkansätze im Dampferzeuger oder in den Rohrleitungen.

neodisher SBK ist bei allen Wasserhärten einsetzbar.

Anwendung und Dosierung:

0,5 - 1, 5 ml/l je nach Wasserhärte über eingebaute Dosiergeräte.
Auf Säurebeständigkeit von Dosiersystemen und Dampferzeugern achten.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich der zusätzliche Einsatz von neodisher SBR, einem Spezialreiniger für Steckbeckenautomaten.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Technische Daten:

Spezifisches Gewicht (20 °C): 1,1 g/cm³
pH-Bereich (gemessen in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 0,5 - 1,5 ml/l: 3,7 - 3,0
Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 50 mPas

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Wasch- und Reinigungsmittel gemäß EG-Empfehlung 89/542/EWG:
< 5 % Polycarboxilate
außerdem Konservierungsmittel

CE- Kennzeichnung:

neodisher SBK erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäß Richtlinie 93/42/EWG.

Lagerhinweise:

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat.

Gefahrensymbol Xi - reizend

Gefahrenhinweis:

R 36 - Reizt die Augen.

Sicherheitsratschläge:

- S 26 - Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 46 - Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Merkblatt vorzeigen.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG- Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service“ verfügbar.

MB 4006/2-1
01/03



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D - 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-Mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.de

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.