

Spray Off

Produktinformation

Produktbeschreibung

Spray Off ist ein flüssiges, alkoholisches und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form.

Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten, bzw. semikritischen und kritischen Medizinprodukten.



Wirkspektrum

- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40
- viruzid

Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt ist vorzugsweise im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs zu verwenden. Eine Sprühdesinfektion vorzugsweise auf die Bereiche beschränken, die durch eine Wischdesinfektion nicht erreichbar sind. Bei Einsatz des Sprühverfahrens sollte dies in einer Kombination aus Sprüh- / Wischverfahren verwendet werden. Es gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit	PZN (Stück)	EAN/GTIN (Stück)	EAN/GTIN (Verpackungseinheit)
600986	500 ml	Flasche	18 x 500 ml	18313136	4260181253794	4260181250762
601330	1 L	Keulenflasche	12 x 1 L	18313142	4260181254357	4260181250779
601334	5 L	Kanister	2 x 5 L	18313159	4260181254371	4260181250786
601332	10 L	Kanister	1 x 10 L	18313165	4260181254388	4260181250793

Spray Off

Produktinformation

Medizinproduktklasse

IIa

Biozidregistriernummer

N-91345

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zusammensetzung

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:

63,50 g Ethanol

0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit

36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff.

Einwirkzeiten

Spray Off Wirkspektrum	Belastung (hoch/ niedrig)	Einwirkzeit	Norm
Bakterizid	mit Mechanik hoch	1 Minute	EN 13727 EN 16615*
Levurozid	mit Mechanik hoch	1 Minute	EN 13624 EN 16615*
Tuberkulozid (M. terrae), Mykobakterizid (M. terrae, M. avium)	hoch	1 Minute	EN 14348
Fungizid (C. albicans, A. brasiliensis)	hoch	5 Minuten	EN 13624 EN 13697
Begrenzt viruzid nach DVV/RKI (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL)	10% FKS	1 Minute	DVV/RKI
Begrenzt viruzid nach EN 14476 (Modified Vaccinia Ankara)	niedrig	1 Minute	EN 14476
Begrenzt viruzid PLUS nach DVV/RKI (Murines Norovirus, Adenovirus Typ 5)	10% FKS	1 Minute	DVV/RKI
Viruzid wirksam gegen Polyoma SV-40 nach DVV/RKI	10% FKS	5 Minuten	DVV/RKI
Viruzid (Murines Norovirus, Adeno- virus Typ 5, Poliovirus Typ 1)	niedrig	5 Minuten	EN 14476 EN 16777

* an Referenztuch getestet

Informationen zu diesem Produkt



Weiterführende
Informationen finden Sie
auf unserer Homepage
www.drdeppe.de

Spezielle Anfragen
richten Sie bitte an
info@drdeppe.de

CE 0044




Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen

T +49 (0) 2152 5565-0 W www.drdeppe.de