

# DESCOSUC CLEANER

## Reiniger für Absauganlagen

- sehr reinigungsstark
- besonders schaumarm eingestellt
- zusätzlicher Intensivreiniger für DESCOSUC

- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei



CE

### PRÄPARATETYP

Flüssiges Konzentrat zur regelmäßigen Intensivreinigung von dentalen Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider, Mundspülbecken und Leitungen. **DESCOSUC CLEANER** gewährleistet eine optimale Reinigung und einen reibungslosen, störungsfreien Betrieb der Absauganlage.

### ANWENDUNG

**DESCOSUC CLEANER** ein- bis zweimal wöchentlich anwenden. Je nach Verschmutzungsgrad 50 ml bis 100 ml **DESCOSUC CLEANER** mit Wasser auf 1 Liter auffüllen. Zur Reinigung 2 Liter Lösung frisch ansetzen (Reinigung z.B. in der Mittagspause durchführen). 2/3 der gebrauchsfertigen Lösung durch die Saugschläuche saugen, 1/3 der Lösung ins Mundspülbecken kippen.

Die beste Reinigungswirkung wird bei einer Einwirkzeit von ca. 1,5 bis 2 Stunden erzielt. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen, um gelöste Verschmutzungen komplett aus den Schläuchen zu entfernen.

Die Reinigungslösung nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.

### DOSIERUNG / EINWIRKZEIT

Bei normaler arbeitsmäßiger Verschmutzung: 5 %  
Bei übermäßig starker Verschmutzung: bis 10 %

Einwirkzeit: 1,5 bis 2 Stunden, je nach Verschmutzungsgrad

### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: klare, gelbliche Lösung  
pH-Wert: ca. 1,7 +/- 0,5  
Dichte (20°C): ca. 1,058 g/ml

### ZUSAMMENSETZUNG

Organische Säuren, Komplexbildner, Korrosionsschutz, Lösungsvermittler.

### LIEFERFORMEN

| Einzelpackung     | Verkaufseinheit | PZN | REF-Nr.    |
|-------------------|-----------------|-----|------------|
| 1 L Dosierflasche | 10 x 1 L        | -   | 00-818-010 |
| 5 L Kanister      | 3 x 5 L         | -   | 00-818-050 |

### DOSIERHILFEN

Dosierpumpe für Kanister, Dosierflasche, Kanisterumfüllhahn, Kanisterschlüssel

### BESONDERE HINWEISE

Verursacht schwere Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht einnehmen.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich Etikett vorzeigen).

### PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

### UMWELTINFORMATION

Die Produkte der Dr. Schumacher GmbH werden nach modernen, sicheren und umweltschonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS.



**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen  
Telefon +49/5664/9496-0

[WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM](http://WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM)