

DESCO WIPES DT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- optimale Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche

Die hygienisch
einwandfreie Lösung!



CE

PRÄPARATETYP

Trockene Wischtücher zur Flächendesinfektion mittels Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von allen Medizinprodukte-Oberflächen und sonstigen Berührungsf lächen im medizinischen Bereichen. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, fussel-freiem Vliesstoff. Auf Grund der quervernetzten Vliesstruktur sind **DESCO WIPES DT** sehr strapazierfähig und besonders reißfest. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden.

DESCO WIPES DT wurden speziell für die Flächendesinfektion in patientennahen und hygienisch sensiblen Bereichen entwickelt. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

DESCO WIPES DT können aus einem eigens dafür konzipierten **DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER** entnommen werden. Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem.

Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDER

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spender-eimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem. Spülmaschinenfest bis 60° C.

Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist jedem Vliestuch-spender beigelegt.

ANWENDUNG

2,5 - 3 Liter (bei Verwendung der 50-Blatt Rolle 1 - 1,5 Liter) gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spender-eimer mit 2,5 - 3 Litern (bei Verwendung der 50-Blatt Rolle mit 1 - 1,5 Litern) der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Medizinprodukte-Oberflächen sorgfältig abwischen.

Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!

Die **Standzeit** wurde für unsere Flächendesinfektionsmittelkonzentrate in den von der VAH/ÖGHMP empfohlenen Konzentrationen untersucht.

Zu dem wurde die Standzeit unserer gebrauchsfertigen alkoholischen Schnelldesinfektionsmittel untersucht.

Die Standzeiten betragen jeweils mindestens 28 Tage.

Neben den Flächendesinfektionsmitteln von Dr. Schumacher können **DESCO WIPES DT** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte auch Herstellerangaben zur Stabilität der Flächendesinfektionsmittel beachten.

DESCO WIPES DT sind einzeln abreißbar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt.

Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum des entsprechenden Desinfektionsmittels erleichtern, sind jeder Vliesrolle beigelegt.

Vliestuchspendersystem nicht unmittelbaren Wärmequellen aussetzen.

Weitere ausführliche Anwendungshinweise entnehmen Sie bitte unserem separat erhältlichen **DESCO WIPES** Flyer.

ANWENDUNG:

BEFÜLLEN DES DESCO WIPES VLIESTUCHSPENDERS



DESCO WIPES DT

Vliestücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln

ANWENDUNGSBEREICHE

DESCO WIPES DT können zur Flächendesinfektion und Reinigung von sämtlichen Medizinprodukte-Oberflächen in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen, der pharmazeutischen Industrie oder in Labors angewendet werden. Ebenfalls kann eine Anwendung in der Lebensmittelindustrie und in Küchen in Betracht kommen.

Sie sind insbesondere für folgende Produkte geeignet:

- alle Oberflächen von Medizinprodukten, wie Pflegebetten, Behandlungsstühlen, Instrumentenoberflächen wie Kabel, Ultraschall-Köpfe, Stethoskope etc.
- sonstige patientennahe Flächen wie Nachttische oder Arbeitsflächen
- Einsatzorte, an denen kein Wasseranschluß zur Verfügung steht oder eine hygienische Aufbereitung von Reinigungsmitteln nicht möglich ist

ZUSAMMENSETZUNG

1 Rolle besteht aus 100 bzw. 50 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochwertigem, fusselfreiem Spunlace-Lochvlies. 100% Kunstfaser-Mischung.

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
1 Packung Desco Wipes DT Rolle à 100 Blatt	6 x 1 Rolle	-	00-915-RD10006
1 Packung Desco Wipes DT Rolle à 100 Blatt	3 x 1 Rolle	-	00-915-RD10003
1 Packung Desco Wipes DT Rolle à 50 Blatt	3 x 1 Rolle	-	00-915-RD5003
Desco Wipes Vliestuchspender 1 Spendereimer, unbefüllt	1 x 1 Eimer	-	00-915-E001
Desco Wipes Vliestuchspender Vorratspackung 6 Spendereimer, unbefüllt	6 x 1 Eimer	-	00-915-E002

VERSCHIEDENE VERSCHLUSSDECKEL:

Sofern Sie für verschiedene Abteilungen oder Produkte unterschiedliche Vliestuchspender verwenden möchten, stehen hierfür Verschlussdeckel in farblichen Varianten zur Verfügung.

APPLIKATIONSHILFEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Desco Wipes Wandhalter	1 x 1 Halter	-	00-902-EIM



GUTACHTEN

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **CLEANISEPT, BIGUANID FLÄCHE N, DESCOSEPT AF, DESCOSEPT PUR, OPTISAL N, Terralin Protect** und **Incidin Plus** im **DESCO WIPES SYSTEM**.

Desinfizierende Wirkung von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESCOSEPT PUR, CLEANISEPT, DESCOSEPT AF** und **BIGUANID FLÄCHE N**.

Desinfizierende Wirkung von **DESCO WIPES DT** in Kombination mit **DESOMED RAPID AF**. Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von **DESOMED RAPID AF** und **BIGUAMED PERFEKT N** im **DESCO WIPES SYSTEM**.

Dr. Wecker, Dr. Schumacher GmbH, Melsungen:
Eignung des Vliestuchmaterials von **DESCO WIPES DT** zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmitteln.

B.Braun Melsungen AG:
Stellungnahme zur Kompatibilität von B.Braun-Flächendesinfektionsmitteln in Verbindung mit **DESCO WIPES**.

PRODUKTSTATUS/LISTUNGEN

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



DR. SCHUMACHER GMBH
Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld
Telefon +49 5664 9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM