

Dismoclean® 42 alka

Alkalisches Reinigungs- und Entkalkungsmittel für
Steckbecken-Spülautomaten.



Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.
Wir forschen für den Infektionsschutz.



hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG
89522 Heidenheim
Deutschland

Charakteristik

- hohe Materialverträglichkeit auch gegenüber säureempfindlichen Bauteilen (z. B. aus Kupfer und Gusseisen)
- beugt Ablagerungen auf dem Spülgut, in der Maschine, in Düsen und Rohrleitungen vor
- verhindert die Bildung von Kesselstein im Verdampfer

Das alkalische Dismoclean 42 alka verbindet die Wirkung von Reinigungs-, Spül- und Entkalkungsmittel.

Anwendungsgebiete

- in Dekontaminationsautomaten zur Aufbereitung von Steckbecken, Urinflaschen, Stuhleimern, Sekretgläsern sowie anderen Entsorgungsbehältnissen und Utensilien
- in Maschinen mit säureempfindlichen Bauteilen mit pH-neutraler bzw. alkalischer Einstellung

Zusammensetzung

Komplexbildner, Korrosionsinhibitor.

Dosierung

Wasserhärte (°dH)	Wasserhärte (mmol/l)	Dosierung
0 – 5	0 – 0,9	0,1 %
5 – 10	0,9 – 1,8	0,2 %
10 – 15	1,8 – 2,7	0,3 %
15 – 25	2,7 – 4,5	0,4 %
> 25	> 4,5	0,5 %

* Abweichungen können durch die jeweilige Wasserqualität erforderlich sein.

Materialverträglichkeit

Dismoclean 42 alka ist gut geeignet für empfindliche Materialien und Bauteile aus Edelstahl, Kupfer, Gusseisen und Kunststoff. Nicht geeignet für Aluminium.

Kompatibilität

Bei Vorhandensein einer zweiten Sauglanze kann als Reinigungsverstärker das kompatible Präparat Dismoclean 61 NR verwendet werden.

Listung

CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz (MPG).

Chemisch physikalische Daten

Aussehen	klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert 1 %ige Lösung (VE-Wasser)	ca. 10,9
Dichte (20 °C)	ca. 1,12 g/cm ³

Gemäß Richtlinie 1999/45/EG: nicht kennzeichnungspflichtig.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Dismoclean® 42 alka				
Kanister	5 kg	975 980	03931696	1

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de.



BODE SCIENCE CENTER • Melanchthonstr. 27 • 22525 Hamburg • Tel. +49 40 54006-111 • Fax -777
www.bode-science-center.de • contact@bode-science-center.com