

schülke -†



antifact® N liquid

Aldehydfreies Schnell-Desinfektionspräparat auf Basis von Alkoholen.

Unser Plus:

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit
- schnelle Abtrocknung
- DGHM/VAH gelistet
- nach Euro-Normen geprüft
- farbstoff- und parfümfrei

Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten [CE 0297] und von Flächen aller Art in:

- klinisch-medizinischen Bereichen
- lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- industriellen Produktionsbereichen

Anwendungshinweise

antifact® N liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung. antifact® N liquid unverdünnt auf Medizinprodukte sowie auf Gegenstände und Flächen aller Art ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ausbringung maximal 50 ml/m². Ggf. überschüssige Präparatemengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

antifact® N liquid wirkt gegen:

- Bakterien • Pilze • Viren

Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-/VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
MRSA	1 Min.
Tb	1 Min.
viruzid*	30 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)	30 Sek.
Adenovirus	2 Min.
BVDV	30 Sek.
Papova SV 40	15 Min.
Polio	30 Min.
Rotavirus	30 Sek.
Vaccinia	30 Sek.
Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis gemäß DGHM-/VAH-Richtlinien	5 Min.

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004



Bereits nach Euro-Normen für die Bereiche Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen getestet:

EN 1276 (bakterizid, mit Belastung)	1 Min.
EN 1650 (fungizid, mit Belastung)	1 Min.
EN 13 697 (bakterizid, mit/ohne Belastung quant. Oberflächenversuch)	1 Min.
EN 13 697 (fungizid, mit/ohne Belastung quant. Oberflächenversuch)	1 Min.

antifect® N liquid

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g enthalten: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol

Chemisch-physikalische Daten

Konzentrat:	
Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	ca. 0,89 g/ml
Viskosität:	< 15 s (DIN 53 211)
Temperaturstabilität:	-5 °C bis +40 °C
pH-Wert:	ca. 7
Flammpunkt:	27 °C (DIN 51 755)

Umweltinformationen

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat antifect® N liquid vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Produkt-/Anwendungsberatung Telefon 040/521 00-666

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- Xi:** Reizend.
R10: Entzündlich.
R41: Gefahr ernster Augenschäden.
R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S23: Aerosol nicht einatmen.
S26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

antifect® N liquid ist äußerst materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken).

Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR-Regel 206 „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
1 l-Flasche	10 x 1 l	113 940
5 l-Kanister	1 x 5 l	113 941
10 l-Kanister	1 x 10 l	113 942

Für ausführliche Informationen zu unseren Dosiergeräten fordern Sie bitte die Gesamtübersicht Hygiene-Technik an.



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60
office.austria@schuelke.com