

ERLEBEN SIE DEN **OXY** EFFEKT IN **XL****Incidin™ OxyFoam & OxyWipe**

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed  $H_2O_2$ ™

PRAXISNAH NACH  
**EN 16615**  
GETESTET

Die innovativen Produkte Incidin™ OxyFoam & Incidin OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum.

Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren und hinterlassen aufgrund ihrer schnellen Verdunstungsrate keine aktiven Rückstände. Die Wirksamkeit von OxyWipe wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin™ OxyFoam & OxyWipe bieten:

- ▲ Hi-speed  $H_2O_2$ ™
- ▲ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▲ Exzellente Materialverträglichkeit



# Incidin™ OxyFoam & OxyWipe

Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

15  
SEK<sup>2</sup>Bakterizid  
(EN 13727 / 16615)15  
SEK<sup>2</sup>Viruzid gegen  
behüllte Viren15  
MIN<sup>2</sup>

Noroviruzid

| Unsere Leistung    | Ihr Nutzen                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EFFEKTIV           | Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten                                                                |
| SICHER!            | Exzellente Materialverträglichkeit – Keine aktiven Rückstände – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff |
| ANWENDERFREUNDLICH | Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel – Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt            |

| WIRKSAMKEIT                                                                     | Einwirkzeit<br>OXYFOAM | Einwirkzeit<br>OXYWIPE |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung |                        |                        |
| Bakterizid, levurozid                                                           | 5 Min.                 | 15 Min.                |
| Fungizid                                                                        | 15 Min.                | 15 Min.                |
| Tuberkulozid, mykobakterizid                                                    | 15 Min.                | 60 Min.                |
| Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie                                                |                        |                        |
| Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*             | 15 Sek.                | 30 Sek.                |
| Rotavirus*                                                                      | 30 Sek.                | 30 Sek.                |
| Adenovirus*                                                                     | 1 Min.                 | 15 Min.                |
| Papovavirus / Polyomavirus / SV40*                                              | 30 Sek.                | 30 Sek.                |
| EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)                                        |                        |                        |
| EN 13727 (bakterizid)                                                           | 15 Sek.                | 1 Min.                 |
| EN 13624 (levurozid)                                                            | 1 Min.                 | 15 Min.                |
| EN 13624 (fungizid)                                                             | 5 Min.                 | 15 Min.                |
| EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)                                         | 5 Min.                 | 30 Min.                |
| EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)                                                | 15 Min.                | 60 Min.                |
| EN 14476 (Adenovirus)                                                           | 30 Sek.                | 1 Min.                 |
| EN 14476 (Norovirus)                                                            | 15 Min.                | 60 Min.                |
| EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)                                      |                        |                        |
| EN 16615 (bakterizid)                                                           | 15 Sek.                | 5 Min.                 |
| EN 16615 (levurozid)                                                            | 15 Sek.                | 1 Min.                 |
| EN 16615 (fungizid)                                                             | 5 Min.                 | 5 Min.                 |
| EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)                                         | 15 Min.                | 60 Min.                |

\* DVV 2015 (Susp. Test)

## GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR INCIDIN™ OXYFOAM



- 1 Aus einem Abstand von ca. 30 cm auf die Oberfläche sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen



- 1 Auf einen sauberes Tuch sprühen
- 2 Über die Oberfläche wischen und sicherstellen, dass diese ausreichend benetzt ist
- 3 Trocknen lassen

EUROPEAN HEADQUARTERS:  
ECOLAB EUROPE GMBH

Richtistrasse 7  
8304 Wallisellen  
Switzerland  
+41 (0) 44-877-2001  
www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49 (0) 2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

CE 0297



## ANWENDUNGSBEREICH

**Incidin™ OxyFoam:**  
Schaumspray zur  
Reinigung und Desinfektion  
medizinischer Oberflächen  
(einschl. z. B. Sonden) und  
medizinischem Inventar.



**Incidin™ OxyWipe:**  
Reinigungs- und Desin-  
fektionstücher für medizinische  
Oberflächen (einschl. z. B.  
Sonden) und Inventar.



Ⓢ BIOZID N-61595  
Ⓢ BIOZID N-61592

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**Incidin™ OxyFoam:** Anwendungsfertige Lösung. Unverdünn auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.

**Incidin™ OxyWipe:** Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen. Nicht geeignet zur Schlusssdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

## WIRKSTOFF

100 g enthalten:

**Incidin™ OxyFoam:** 1,5 g Wasserstoffperoxid

**Incidin™ OxyWipe:** 1,0 g Wasserstoffperoxid

## GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

## VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

| Produkt                               | Verpackungs-<br>einheit                    | Artikel-<br>nummer          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Incidin™ OxyFoam                      | 6 x 750 ml                                 | 30 821 60<br>PZN 1115 60 47 |
| Incidin™ OxyWipe                      | 6 x 100 Tücher<br>Tuchgröße:<br>20 x 20 cm | 30 823 60<br>PZN 1115 60 53 |
| Incidin™ OxyWipe XL                   | 6 x 50 Tücher<br>Tuchgröße:<br>25 x 37 cm  | 30 920 80<br>PZN 138 320 09 |
| Wandhalterung<br>für Incidin™ OxyWipe | 1 x 6 Stück                                | 100 338 77                  |

## LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung nicht über 25 °C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

**Haltbarkeit nach dem Öffnen:**

**Incidin™ OxyFoam:**  
Bis zum aufgedrucktem Verfalldatum

**Incidin™ OxyWipe:** 3 Monate

## Referenzen

1. Exzellente Materialverträglichkeit – Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff.
2. Incidin™ OxyFoam (EN 13727 / EN 16615 / EN 14476)

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN. NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.