

TECHNISCHE INFORMATION

**KLEEN
PURGATIS**

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL

BUDESIN U VAH-gelistet (DGHM)



Art.-Nr. 142.512 10-l-Kanister

- Flächendesinfektionsmittel für alle abwaschbaren Flächen und Gegenstände wie im Krankenhaus, in der allg. Praxis, Schwimmbädern, Solarien und Saunen
- besonders wirtschaftlich
- verfügt über ein breites mikrobizides Wirkungsspektrum
- wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze und Viren einschl. HBV- und HIV-Viren

ANWENDUNGSBEREICH:

Zur Desinfektion aller Flächen, Einrichtungen und Gegenständen im Krankenhaus und in der allgemeinen Praxis, Schwimmbädern, Solarien, Saunen.

DOSIERUNG UND KONTAKTZEITEN:

Bakterizidie/ Levurozidie	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]	Dosierung [ml/l Wasser]		
				1l	8l	10l
VAH	gering	7,5	5	75	600	750
		2,0	15	20	160	200
		1,0	60	10	80	100

Viren (RKI/ DVV Richtlinien)	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Hepatitis-B Virus	gering	1,5	30
		5,0	1
		3,0	30
		1,5	60
Rota Virus	gering	0,25	1
Vaccinia Virus	gering	1,0	15
	hoch	3,0	15
		7,5	1
BVDV	hoch	0,5	15
		7,5	1

Viren (EN 14476)	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Norovirus EN 14476	gering	6,0	30
Influenza A (H1N1) Virus EN 14476	hoch	3,0	15

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-195
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 515 35 61
Fax +41 (0) 44 515 35 69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Wirksamkeit	Organische Belastung	Konzentration [%]	Einwirkzeit [min]
Rohes Holz kontaminiert mit Pilzen		2,0 1,5	60 240
Acrylglas u.ä. Flächen		7,5 5,0	1 5
Bakterizid EN 1040 P. aeruginosa, S. aureus		0,05	5
Bakterizid EN 1276 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae	gering	1,0	5
Bakterizid EN 1276 Salmonella cholerasuis, Listeria monocytogenes	hoch	0,5	5
Fungizid EN 1650 C. albicans	gering	0,2	5
Fungizid 13624 C. albicans	gering	0,2	5
Bakterizid EN 13727 P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	gering	1,0	5
Bakterizid EN 14561 P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae	gering	2,0	15
Fungizid EN 14562 C. albicans	gering	1,5	15
Bakterizid EN 13697 P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae		2,0	5
Levurozidie EN 13697 C. albicans		1,5	15

Anwendungshinweise: Nur in den vorgeschriebenen Konzentrationen und Zeiten anwenden. Flächen gut mit Wasser nachspülen. Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Sicherheitshinweise beachten. **Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.**

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
 Geruch: produktspezifisch
 Viskosität: dünnflüssig
 Dichte: 985 g/l
 pH-Wert im Konzentrat: 8

INHALTSSTOFFE:

5-15 %: kationische Tenside
 Weitere Angaben: in 100 g Budesin U sind 3,35 % Didecylmethylammoniumchlorid, 3,35 % Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid und 3,35 % Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid als Desinfektionswirkstoffe enthalten
 Giscode: GD 40
 Zulassungs-Nummer: N-11974 · zugelassen als Desinfektionsmittel für den Privatbereich
 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 3 Jahre, vor Hitze schützen

KENNZEICHNUNG:



Enthält: Didecylmethylammoniumchlorid, Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, Alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid
Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **Sicherheitshinweise:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahr

TRANSPORT:

UN-Nummer: 1903 / Bezeichnung: Desinfektionsmittel, flüssig, ätzend, n.a.g. / Klasse: 8 / Verpackungsgruppe: III / ADR

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale
 Dieselstraße 10
 D-32120 Hiddenhausen
 Fon +49 (0) 5223 9970-40
 Fax +49 (0) 5223 9970-195
 info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International
 Firststrasse 15
 CH-8835 Feusisberg
 Fon +41 (0) 44 515 35 61
 Fax +41 (0) 44 515 35 69
 info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE