## PRODUKT BESCHREIBUNG













Inhaltsstoffe: Anwendung:

Dosierung:

Physikalische Angaben: Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code: nach GISBAU BAUA Reg.-Nr.:

Kennzeichnung:

#### dreiturm GmbH

#### ADRESSE

Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße FON +49 (0) 6663 970-230 FAX +49 (0) 6663 970-490 MAIL GV@dreiturm.de WEB dreiturm.de



# HEXAWOL® Fix Schnelldesinfektion

VAH, DVG und IHO gelistet





Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. **HEXAWOL® Fix** ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von **HEXAWOL® Fix** nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen im humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

In 100 g Lösung sind enthalten als wirksamer Bestandteil: 45,0 g Ethanol.

**Gem. MPG:** Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten. **Gem. Biozidrichtlinie:** Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Nicht für alkoholempfindliche Materialien wie Acrylglas geeignet.

Zur Herstellung von Tuchspendersystemen geeignet. Geprüft in Verwendung mit den Vliestüchern DESCO WIPES DT, DESCO WIPES RT oder ECO WIPES von Dr. Schumacher. Die Angaben vom Hersteller sind zu beachten.

bakterizid inkl. MRSA, levurozid

Sprühdesinfektion / EN 13697: 1 Min.\* Wischdesinfektion / EN 16615: 5 Min. \* (\*qelistet in der 5-Min.-Spalte der VAH-Liste)

Tuberkulose-Bakterien (M. terrae) gern. EN 14348 30 Sek.

wirksam gegen alle behüllten Viren wie

HBV, HIV, HCV, Rota-Viren

(begrenzt viruzid gem. RKI/DVV-Leitlinie) 30 Sek.

Noro-Viren (MNV - Murines Noro-Virus) gem. EN 14476 1 Min.

pH-Wert in Anwendungskonzentration ca. 7

4267 1-l-Keulenflasche4268 Sprühkopf

**GU 50** 

N-67176 N-67177 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



### **ACHTUNG**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.



Nur für den gewerblichen Gebrauch. Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



LUCID: DE12606 5782 57 19

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.