


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

MyClean® Wipes DS OA Flowpack

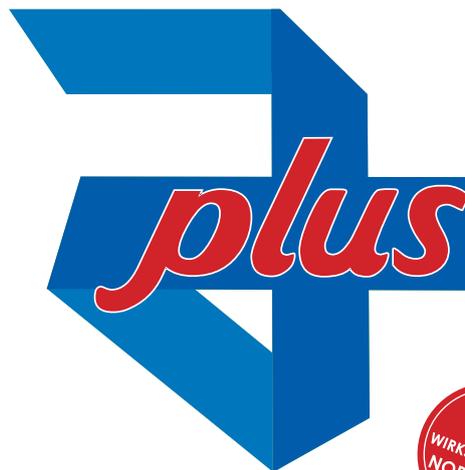

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher
- Größe : 28 x 30 cm
- Tränkflüssigkeit: MyClean DS OA DGMH / VAH gelistet
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, Vaccinia, BVDV(HCV), Influenza/Grippe-Viren)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, SV40-Viren
- Gute Reinigungsleistung
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelle Trocknung
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas



Anwendung:

MyClean® Wipes alkoholfreie Desinfektionstücher, vorgetränkt mit MyClean DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol. Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinisches Inventar. Insbesondere für empfindliche Oberflächen wie Acrylglas geeignet. Die Tücher sind aus Biocell hergestellt und zu 100 % biologisch abbaubar. Z-Faltung

Ausführung:

MyClean Wipes DS OA, Flowpack

Artikelbeschreibung	Größe	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	EAN	PZN	Pack. / VE
Biocelltuch, getränkt	28 x 30 cm	48 Blatt	79664	4046153122387	11887207	10

Einwirkzeiten:

Bakterizid, levurozid gemäß Gutachten nach DGHM und VAH, sowie wirksam gegen alle behüllten Viren, SV40	konz. - 1 Min.
---	----------------

Qualitätssicherung:

MPG, Richtlinie 93/42 / EWG / VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:

 2 Jahre

Symbole:



 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MyClean-Flowpack-DS-OA-20160726