schülke ->

Hygiene, die Plus macht.

Lösungen für medizinische Einrichtungen.



Unser großes Plus – umfassende Hygienekompetenz.

schülke -} 125 y 8 1889-2014 ×

schülke -}

Wir schützen weltweit Leben.

Unsere Produkte und Leistungen schützen Menschen vor Infektionen und Materialien vor Kontaminationen. Dabei spielt auch die Vorsorge eine entscheidende Rolle, denn die Infektionsprävention ist wesentlich einfacher als ihre Bekämpfung.

Und das ist ein wichtiger Aspekt in einer Welt, in der die Globalisierung Einzug gehalten hat. Grenzen werden aufgehoben, Distanzen kürzer, schneller überwindbar. Reisen von Kontinent zu Kontinent sind heute eine Selbstverständlichkeit. Und Mikroorgansimen reisen dabei immer unsichtbar und unerkannt als blinde Passagiere mit: Ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

Häufig werden eher Symptome bekämpft als dass die Ursachen in den Blick genommen werden. Dadurch entstehen gefährliche Lücken in der Hygienekette. Diese Lücke wollen wir mit unserem ganzheitlichen Ansatz schließen. Dieser umfasst neben wirksamen Produkten und vielfältigem Service auch eine besonders kompetente Beratung.

Unsere Hygienekompetenz beruht auf über 125 Jahren Erfahrung mit der erfolgreichen Bekämpfung von Keimen jeder Art. Gestern wie heute unterstreichen zahlreiche Innovationen unsere Fähigkeit, neue mikrobiologische Herausforderungen zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten.

Bei allen Aktivitäten unseres Unternehmens fühlen wir uns dem Umweltschutz verpflichtet. Ressourcen zu schonen und gesellschaftlich verantwortlich zu handeln, besitzt in der Produktentwicklung bei schülke eine hohe Priorität.

Traditionell pflegen wir einen lebendigen und offenen Umgang mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. Wir möchten partnerschaftlich auf allen Ebenen mit diesen zusammenarbeiten. Denn regelmäßig Erfahrungen auszutauschen entwickelt Hygienekompetenz, führt zu Fortschritt und am Ende zu gemeinsamen Erfolgen. Ein gutes Beispiel hierfür ist u. a. unser Antiseptikum octenisept®: In nur kurzer Zeit etablierte sich dieses Produkt als Marktführer (Quelle: IMS Health Deutschland).



Wie Lesezeichen, nur kleiner: Stick-its von schülke.



Haut | Hände

Händedesinfektion, Hände- und Körperwaschung, Hände- und Hautpflege

10 - 31

Wunde | Haut | **Schleimhaut**

Wund- u. Schleimhautantiseptik, Wundmanagement, MRE-Dekontamination

32 - 47

Fläche

und Reinigung

48 – 73

Sterile Produkte

für die herstellende

74 – 83

Instrumente

Manuelle und maschinelle Aufbereitung

84 – 107

Hygienetechnik

Küchenhygiene

für Geschirr, Geräte,

128 – 147

Leistungs- 148 – 173 spektrum

neben unseren Produkten

Index 174 – 175 Produkte von A – Z

In allen Bereichen zuhause, weltweit gefragt.

Hygiene auf höchstem Niveau mit Produkten und Verfahren von schülke.

Qualität sichern. Kosten reduzieren.

Der ständige Strukturwandel im Krankenhausmarkt zwingt deutsche Kliniken, ihre Qualität und Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Veränderte gesetzliche Auflagen verlangen von ihnen, kostengünstigere und bessere Leistungen anzubieten.

Bei Infektionen, die auf Hygienemängel und -lücken zurückzuführen sind, muss heilend und therapeutisch eingegriffen werden. Solche Maßnahmen sind aufwendig und teuer. Deshalb spielt die Prävention in der Hände- und Flächendesinfektion, Instrumenten-Aufbereitung und im Wundmanagement eine entscheidene Rolle. Denn Infektionen zu vermeiden ist wesentlich einfacher und kostensparender als ihre Bekämpfung.

schülke bietet flexible Lösungen in Form einer auf zahlreiche Anwendungsgebiete abgestimmten Produktpalette. Gestützt von umfassendem Service und detaillierter Beratung ermöglichen diese Lösungen eine optimale Vorbereitung auf die vielfältigen Herausforderungen eines sich ständig verändernden Marktes.

Infektionen zu vermeiden, zu erkennen und zu bekämpfen bleibt ein entscheidender Faktor der Qualitätssicherung. Auch dank schülke steht Deutschland dabei im internationalen Vergleich zur Infektionsprävention nach wie vor mit an der Spitze.



Inhaltsverzeichnis

schülke-Präparate im Überblick:

Kategorie	Anwendungs	bereich	Produkte	Seite			
	Händedesinfe	ektion	desderman® pure • desmanol® care • desmanol® pure • desderman® pure gel • desmanol® pure gel • schülke optics und schülke optics lotion für Schulungszwecke	19 – 21			
Haut Hände 10 – 31	Hände- und K	Örperwaschung	sensiva® wash lotion • esemtan® wash lotion • s&m wash lotion • esemtan® wash mitts • esemtan® cleansing foam	24 – 25			
10-31	Hände- und H	lautpflege	sensiva® protective cream • sensiva® protective emulsion • sensiva® dry skin balm • sensiva® regeneration cream • esemtan® skin lotion • esemtan® dry skin balm • esemtan® active gel	28 – 29			
Wunde Haut	Wund- und So Wundmanage	chleimhautantiseptik ement	octenisept* • octenilin* Wundgel • octenilin* Wundspüllösung • octenicare* repair creme • schülke wound pad zum Debridement	36 – 37			
Schleimhaut	Hautantisepti	ik	kodan® Tinktur forte farblos gefärbt • octeniderm® farblos	37 – 39			
32 – 47 MRE-Dekontamintaion		mintaion	octenisan® Waschlotion • octenisan® Waschhandschuhe • octenisan® Waschhaube • octenisan® md Nasengel • octenidol® md Mundspüllösung • antiMREset • octenisan® Set	42 – 45			
	Wischdesinfe	ktion	terralin® protect · antifect® AF (N) · pursept® AF · antifect® extra · perform® · terralin® PAA · Desinfektions-Reiniger AF	54 – 56			
Wischdesinfektion Feuchttuchspendersysteme			schülke wipes - schülke wipes safe & easy	60 – 61			
Fläche 48 – 73	Schnelldesinf	ektion	terralin® liquid • antifect® N liquid • pursept® A Xpress • mikrozid® AF liquid • mikrozid® AF wipes Jumbo premium • mikrozid® sensitive liquid • mikrozid® sensitive wipes Jumbo premium maxi • mikrozid® PAA wipes • mikrozid® universal liquid • mikrozid® universal wipes premium maxi				
	Reinigung un	d Pflege	s&m Reinigungsadditiv • s&m Pflegeadditiv	70			
	Spezialiäten		mikrocount®	71			
	Alkoholische	Schnelldesinfektion	perform® sterile alcohol EP - perform® sterile alcohol IPA - perform® sterile wipes IPA	78			
Sterile Produkte			perform® sterile PAA - perform® sterile concentrate PAA - perform® sterile concentrate OXY	79			
74 – 83 Basisdesinfektion und Reinigung Trockene, sterile Tücher		tion und Reinigung	perform® sterile concentrate Q2 - perform® sterile cleaner ND	80			
		rile Tücher	perform® sterile dry wipes - perform® sterile premium dry wipes - perform® sterile mix dry wipes	81			
	Manuelle	(Desinfizierende) Vorreinigung	gigazyme® X•tra · gigazyme® · mucadont® zymaktiv · edisonite® classic · edisonite® super				
	Instrumen- tenaufberei- tung Maschinelle Instrumen- tenaufberei-	Reinigende Desinfektion	gigasept® instru AF • gigasept® AF • gigasept® AF forte • mucocit® T	93 – 94			
Instrumente		Abschlussdesinfektion	gigasept® pearls • gigasept® PAA concentrate • gigasept® FF (neu) • mucadont® IS	95 – 96			
84 – 107		Pflege	mucadont® fluid	96			
		ZSVA	thermosept® X•tra • thermosept® alka clean forte • thermosept® RKF • thermosept® NKZ • thermosept® NKP • thermosept® BSK • thermosept® NDR • mucapur® MP	100 – 102			
		Endoskopie	thermosept® EndoCleaner • thermosept® ER • thermosept® ED • thermosept® PAA	105 – 106			
	tung	Steckbecken	thermosept® SKS • mucapur® RS	107			
Hygienetechnik 108 – 127	Technik für ho Hygieneanpri		hyclick*-System - Präparatespender - Desinfektionssäule - Halterungen - Steckbeckenspüler Dosiergeräte - Wasserfilter - Hygienekombis - Instrumentenwannen - Applikationshilfen	113 – 126			
	Geschirrreini	gung	dosit* V2 compact Spender • dosit* V2 fluid Spender • dosit* Reiniger standard WS • dosit* Reiniger CL • dosit* Klarspüler • dosit* Klarspüler 5 • dosit* Entschäumer • Spülmaschinenreiniger ACL • Klarspülkomponente • Entkalker • Spülmaschinenreiniger Pulver • Manueller Geschirrreiniger • Vorreinigungskomponente	134 – 137			
Küchenhygiene 128 – 147		esinfektion und Pflege Oberflächen, Böden	Fettlöser • Grill- und Ofenreiniger • Konvektomatenreiniger • antifect* S • Glasreiniger • Schneidbrettbleiche • Produktionsreiniger A • s&m Schaumreiniger S • Spezial Flächenreiniger • Chlorschaumreiniger • Wischpflege plus • quartacid* plus • quartasept* plus • Edelstahlpflege • antifect* N liquid • schülke wipes	139 – 142			
	Hygienetechr	nik	dosit® des - sm 8 Schaum - dosit® trio	143			
	Personalhygie	ene	desderman® pure • sensiva® wash lotion • sensiva® protective cream • sensiva® protective emulsion • sensiva® dry skin balm • sensiva® regeneration cream	145 – 147			
Leistungs- spektrum 148 – 173	Service Aust Tools Infos	ausch Schulung Mitarbeiter	Customer Sales Service • Serviceleistungen Hygienetechnik • Hygieneberatung • SDS schülke Decon Service • Hygieneplan • hygiene club • food club • pharma club • Fortund Weiterbildungen zum Thema Hygiene • OPAL Akademie • Konzentratrechner • Downloadcenter • schülke Sticker • Wissensportal • Informationsportale • Informationen: Infektionserreger • Publikationen • News & Views by Dr. Siebert • Wundmanagement • Flächenhygiene • Nachhaltigkeit • Qualitätsmanagement • schülke online • Interviews Mitarbeiter	148 – 173			
Index 174 – 175	Produktfinde	r	Alle Produkte von A – Z im Überblick	174 – 175			

Ein leichter Weg zu allen Infos:



1. QR-Code



2. QR-Code scannen (mit passender App



3.
Online Informationen ablesen

Hygiene hat seit über 125 Jahren einen Namen: schülke.


"Die Lehre von der Verhütung der Krankheiten und der Erhaltung, Förderung und Festigung der Gesundheit."

So definiert die "Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie" (DGHM) den Begriff Hygiene. Diesem Gedanken folgen wir konsquent in Forschung, Entwicklung und Herstellung unserer Produkte.

schülke hat bisher auf jede mikrobiologische Herausforderung eine innovative Lösung gefunden.

Auch in Zukunft werden wir für die neuen Anforderungen der Hygiene (z. B. die Bekämpfung multiresistenter Keime) Krankenhäusern geeignete Lösungen anbieten.

Mit unserem breit gefächerten Angebot an Präparaten und Leistungen halten wir für unseren Kunden ein Produktsortiment bereit, das alle hygienerelevanten Voraussetzungen an Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit in der Anwendung erfüllt.

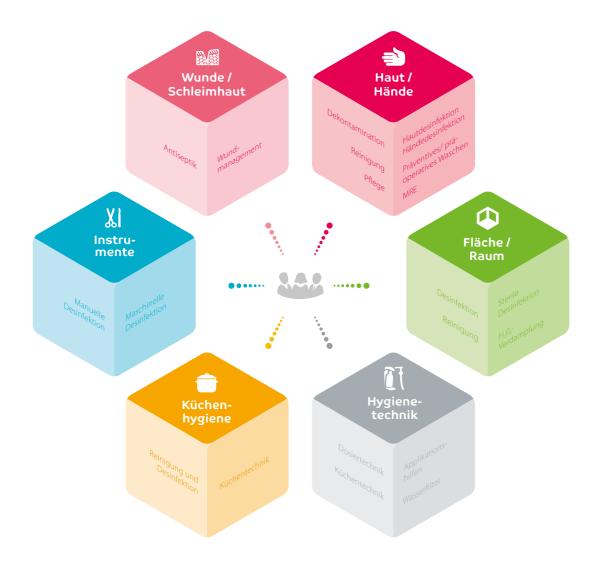

Quadratisch, praktisch, bunt.


Unsere Info-Icons für schnelle Identifikation.

Sie zeigen an, gegen welche Krankheitserreger bzw. Gruppen von Erregern das jeweilige Produkt wirksam ist und ob es RKI-gelistet ist. Diese Info-Icons finden sich überall dort in der Broschüre, wo es explizit um den Einsatz von schülke Produkten geht.



Norovirus (Kennzeichnung im Bereich Haut | Hände, Fläche, Küche)

Noroviren sind eine der Hauptursachen nichtbakterieller Magen-Darm-Infektionen. Die Übertragung des Virus erfolgt fäkal-oral. Unter schweren Folgen leiden vor allem immungeschwächte Patienten. Diese Viren sind besonders widerstandsfähig und können somit auf Flächen vergleichsweise lange überleben. Wirksame Prävention erfolgt durch professionelle Hygiene; Behandlung durch geprüfte Präparate mit nachgewiesener Noro-Wirksamkeit (MNV).

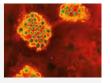

C. DIFF

Clostridium difficile (Kennzeichnung im Bereich Fläche, Instrumente)

Clostridium difficile ist ein sporenbildendes Bakterium, das verschiedene Formen von Durchfallerkrankungen und Darmentzündungen mit gravierenden Folgen auslöst, die insbesondere für ältere Patienten und Kinder gefährliche Folgen haben können. Für die Desinfektion sollten Präparate z. B. auf Basis oxidierender Wirkstoffe mit nachgewiesener Wirksamkeit gegenüber dem anaeroben Sporenbildner C. difficile gem. FprEN 17126 verwendet werden.





TB (Kennzeichnung im Bereich Haut | Hände, Fläche, Instrumente, Küche)

Tuberkulose (TBC, engl. TB) ist eine Infektionskrankheit, die am häufigsten die Lunge befällt und überwiegend durch Mykobakterien verursacht wird. Besorgnis erregend ist vor allem die Verbreitung extrem medikamentenresistenter TBC-Stämme. Mykobakterien bleiben in der Raumluft sowie auf Händen, Haut, Flächen und chirurgischen Instrumenten über Stunden infektiös. Zur Prävention und Bekämpfung eignen sich Desinfektionsmittel mit geeigneten Wirkstoffen und breitem Wirkspektrum. Deren Leistungen sollten durch die speziellen Prüfvorschriften für Mykobakterien der Euronormen EN 14348 sowie EN 14563 gesichert und VAH gelistet sein.





Sporizid (Kennzeichnung im Bereich Fläche, Sterile Produkte, Instrumente)

Sporizide Wirkung (gem. EN 13704 oder FprEN 17126) ist die Fähigkeit eines Produktes, unter festgelegten Bedingungen die Anzahl lebensfähiger Bakteriensporen (aerobe Sporenbildner wie Bacillus Spezies, oder anaerobe Sporenbildner wie C. difficile oder Clostridium sporogenes) zu vermindern.





Bakterizid (Kennzeichnung im Bereich Haut | Hände, Antiseptik, Fläche, Sterile Produkte, Instrumente, Küche)

Als bakterizid bezeichnet man Wirkstoffe oder Wirkstofflösungen, die Bakterien so stark schädigen, dass sie den irreversiblen Zelltod der Erreger auslösen. Bakterien können durch Tröpfcheninfektion, Hände, Haut, Flächen und Instrumente übertragen werden. Bakterizid wirkende Desinfektionsmittel verringern oder vermeiden im besten Fall die Infektionsübertragung durch Bakterien.





Begrenzt viruzid Plus (Kennzeichnung im Bereich Haut | Hände, Fläche, Sterile Produkte, Instrumente, Küche)


Unter dem Begriff "begrenzt viruzid PLUS" versteht man den Wirkbereich, der Präparate umfaßt, die eine nachgewiesene Wirksamkeit gegenüber unbehüllten viralen Erregern wie Noroviren, Rotaviren und Adenoviren besitzen. Noroviren, Rotaviren und Adenoviren sind die im medizinischen Bereich epidemiologisch häufigsten Infektionserreger. Durch "begrenzt viruzid plus" wirksame Präparate, bei denen auch die Wirksamkeit gegenüber behüllten Viren wie den sog. "blood-borne virusses" (z. B. HIV, HBV, HCV) gegeben ist, kann aufgrund des umfassenden Wirkspektrums eine Umstellung infolge saisonaler Unterschiede im Vorkommen viraler Erreger entfallen.





Viruzid (Kennzeichnung im Bereich Haut | Hände, Fläche, Sterile Produkte, Instrumente, Küche)

Als viruzid bezeichnet man Wirkstoffe oder Desinfektionsmittel, die Viren einschließlich der sogenannten unbehüllten Viren so stark angreifen, dass sie den Erreger irreversibel schädigen bzw. inaktivieren. Viren können durch Tröpfcheninfektion, Hände, Haut, Flächen und Instrumente übertragen werden. Viruzid wirkende Desinfektionsmittel verringern oder vermeiden im besten Fall die Infektionsübertragung durch Viren.

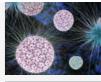



RKI-gelistet (Kennzeichnung im Bereich Haut | Hände, Fläche, Küche)

Die Liste des Robert Koch-Instituts enthält alle Desinfektionsmittel und Verfahren, die vom Amtsarzt für den Seuchenfall empfohlen werden. Das Robert Koch-Institut erforscht und dokumentiert übertragbare Krankheiten beim Menschen. Es agiert seit mehr als 100 Jahren universitätsunabhängig und verbindet Grundlagen- und angewandte Forschung. Weitere Informationen: www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektionsmittel/Desinfektionsmittelliste_node.html



Mehr Infos zu Infektionserregern: www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/article/Infektionserreger.php

Alles geregelt!

Für maximale Sicherheit in der Anwendung von Arzneimitteln, Kosmetika, Medizin- und Biozidprodukten.

Bevor Produkte in den Handel gelangen, müssen sie europaweit normierten Testverfahren unterzogen werden, mit denen ihre mikrobiologische Wirksamkeit geprüft wird.

Abhängig von den Produktkategorien (Arzneimittel, Kosmetika, Medizin- sowie Biozidprodukte) und Anwendungsbereichen (Antisepsis, Anwendung auf Oberflächen, Instrumenten, Händen, Haut) müssen ganz unterschiedliche gesetzliche und regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Diese Anforderungen erhöhen nicht nur die Sicherheit der Produkte für Patienten, Anwender und Dritte, sondern ermöglichen auch die Vergleichbarkeit der Produktleistungen.

Wichtig: Vigilanz in der Pharmaindustrie und bei Medizinprodukten.

Vigilanz bedeutet im eigentlichen Sinne in etwa "Wachheit" oder auch "Wachsamkeit". Produkte werden über ihren gesamten Lebenszyklus der Herstellung, Vermarktung und des Verkaufs beobachtet und bewertet. Dieses System gewährleistet maximale Sicherheit.

Desinfektionsmittel-Tests haben Methode.

In seinen Standardmethoden beschreibt der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) die Testanforderungen, die chemische Desinfektionsmittel erfüllen müssen, um als wirksam zu gelten. Hierin einbezogen sind auch die Anforderungen der europäischen Normen des CEN TC216. Dadurch sollen die Prüfmethoden europäisch harmonisiert werden. Für jeden Anwendungsbereich (Flächen-, Instrumenten- und Händedesinfektion) gibt es in Europa speziell entwickelte Prüfmethoden. Eine Ausnahme bildet die Hautantiseptik: Hier fehlt noch eine europäisch abgestimmte Prüfmethode, so dass solche Produkte in Deutschland nach der nationalen Standardmethode 13 der Anforderungen und Methoden zur VAH-Zertifizierung chemischer Desinfektionsverfahren geprüft werden müssen. Für den Nachweis der viruziden Wirksamkeit für alle Anwendungsbereiche stehen sowohl nationale als auch europäische Prüfmethoden zur Verfügung. Eine Harmonisierung steht noch aus.

Unsere Produkte sind unterschiedlichen Produktkategorien zugeordnet.

Desinfektionsmittel sind in die Produktkategorien Arzneimittel, Medizinprodukte bzw. Biozide unterteilt. Hand-, Hautreinigungs- und Pflegeprodukte sind den Kosmetika zugeordnet. Für jede einzelne Produktkategorie gelten unterschiedliche gesetzliche und regulatorische Anforderungen.

Hier ein kurzer Überblick über die einzelnen Produktkategorien:

Arzneimittel:

Desinfektionsmittel sind dann Arzneimittel, wenn die Produkte zur Desinfektion von Händen, Haut, Schleimhaut und Wunden eingesetzt werden und dazu dienen, Infektionen zu verhüten oder zu behandeln. Bevor diese Produkte vermarktet werden können, müssen sie in Deutschland vom BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) auf ihre Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit überprüft werden. Die Zulassung erfolgt auf Basis der EU-Richtlinie 2001/83/EG, die in Deutschland ins Arzneimittelgesetz (AMG) umgesetzt wurde.

Kosmetika:

Produkte zur äußerlichen Hände- und/oder Hautreinigung, zur Pflege oder zum Hautschutz. Eine "antimikrobielle Wirkung" kann sekundär ausgelobt werden, darf aber nicht der Hauptzweck des Produktes sein. Alle kosmetischen Produkte auf dem europäischen Markt müssen seit Juli 2013 dem Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) gemeldet werden. Für Kosmetika gilt die Kosmetikverordnung 1223/2009.

Medizinprodukte:

Produkte, die am Menschen zum Zweck der Verhütung von Krankheiten eingesetzt werden und die im Gegensatz zu Arzneimitteln hauptsächlich physikalisch wirken (z. B. Verbandszeug, Sehhilfen, medizinische Instrumente, Rollstühle). Die bestimmungsgemäße Hauptwirkung wird im Gegensatz zu Arzneimitteln weder pharmakologisch, noch durch immunologisch wirkende Mittel oder den Metabolismus erreicht. Zur Kategorie Medizinprodukte gehören z. B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die als "Zubehör" zur Aufbereitung von medizinischen Flächen und Gegenständen eingesetzt werden:

- · Präparate für medizinische Flächen und Inventar,
- Präparate zur manuellen Aufbereitung von medizinischen Instrumenten,
- Präparate bei der maschinellen Instrumentenaufbereitung und
- Präparate bei der Aufbereitung von medizinischen Instrumenten in Reinigungsund Desinfektionsgeräten.

Medizinprodukte müssen ein umfangreiches Bewertungsverfahren durchlaufen (Konformität) und an das DIMDI

Alles geregelt!

















(Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information) gemeldet werden. Die CE-Kennzeichnung erfolgt vor der DIMDI-Meldung, danach darf der Hersteller, ggf. nach Absprache mit der benannten Stelle, das CE-Zeichen verwenden. Damit ist das Produkt in der EU verkehrsfähig. Für Medizinprodukte gilt die EU-Richtlinie 93/42/EWG, die in Deutschland in das Medizinproduktegesetz (MPG) umgesetzt wurde. Im April 2017 verabschiedete das EU-Parlament die Medizinprodukte-Verordnung MDR, die die EU-Richtlinie und die nationalen Umsetzungen zukünftig ersetzen wird.

Biozidprodukte:

Wirkstoffe oder Zubereitungen, die Schadorganismen (z. B. Bakterien, Viren) auf chemische oder biologische Weise zerstören oder ihre Wirkungen verhindern. Biozidprodukte sind z. B. Händedesinfektionsmittel in der Industrie oder Desinfektionsmittel für den Einsatz auf allgemeinen Flächen (z. B. Fußböden). Wirkungen gegen bestimmte

Mikroorganismen oder Normen (z. B. "Hygienische Händedesinfektion nach EN 1500" oder "Desinfektion von Flächen aller Art") dürfen ausgelobt werden. Die Aussage "Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit" ist nicht zulässig. Eine Besonderheit bei Biozidprodukten liegt darin, dass die Wirkstoffe genehmigt und die Biozidprodukte zugelassen werden müssen. Für Biozidprodukte gilt die Biozidprodukte-Verordnung 528/2012.

Dual-Use:

steht in der medizinisch-pharmazeutischen Kommunikation für Produkte, deren Einsatz gleichermaßen für zwei Anwendungsgebiete (hier Medizin- und Biozidprodukte) vorgesehen sind. Es ist notwendig, dass die gesetzlichen Regeln beider Produktkategorien erfüllt werden. Die "Dual-Use-Auslobung" beinhaltet ein besonders gestaltetes Etikett, das die Anwendungsbereiche klar voneinander abgrenzt und die jeweils gültigen Anwendungshinweise enthält.

Listungen – welcher Anwendungsbereich kommt in welcher Liste vor?

Die VAH-Liste ist gültig für die Routine-Desinfektion und nennt Desinfektionsmittel, die gegen Bakterien, Mykobakterien und Pilze wirksam sind.

Im IHO-Viruzidie-Verzeichnis finden sich die Desinfektionsmittel mit viruzider Wirksamkeit (d. h. Begrenzte Viruzidie, Begrenzte Viruzidie PLUS, relevante Einzelviren) für die Hände-, Flächen- und Instrumentendesinfektion.

Die RKI-Liste ist nur gültig bei behördlich angeordneten Entseuchungen.



Übertragungsrisiken im Klinikalltag erfolgreich minimieren.

Optimale Hygiene schützt vor unsichtbaren Risiken.

Wirksame Lösungen für Hände und Haut.

Im Klinikalltag stehen Hände und Haut im Fokus, wenn Infektionen verhindert werden sollen.

Wer im ständigen Kontakt mit Patienten, Geräten und Flächen ist, muss sich selbst und den Patienten optimal schützen.

Mittlerweile nimmt die Technik jedem von uns viel Arbeit ab. Trotzdem ist die menschliche Hand im Klinikalltag im Dauereinsatz und damit im ständigen Kontakt mit Gefahrenquellen. Dabei stellen gerade Hände das größte Übertragungsrisiko für Keime dar! Auch die Gesundheit der Haut beeinflusst dieses Risiko. Spröde Haut, Risse und auch eine noch so kleine Wunde sind wie eine Einladung an alle Arten von Krankheitserregern, sich auf oder im Körper anzusiedeln.

Professionelle Händehygiene und Hautschutz sind daher wichtige präventive Maßnahmen zum Schutz von Personal und Patienten. Richtig durchgeführt senkt die hygienische Desinfektion die Keimlast um bis zu 99,9 %.





Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. schülke -}

schülke hat, was Keime fürchten: Händedesinfektion, medizinische Hautpflege, Hände- & Körperwaschung.

Hau	ıt Hände	S	oezif	ikati	on				Li	stunge	n								Wirl	ksar	nke	iten	1				Seite
Hän	dedesinfektion	Biozid / Arzneimittel	Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Chirurgische Händedesinfektion	VAH-Listung	(5) IHO Viruzidie-Liste	RKI / DW-Listung	Listung gemäß § 18 IfSG Hygienische Händedesinfektion Wirkungsbereich A	Listung gemäß § 18 IfSG Hygienische Händedesinfektion bei TB	Listung gem. §18 Hygienische Händedesinfektion begrenzt viruzid	EuroNorm geprüft	Hygienische Händedesinfektion (EN 1500)	Chirurgische Händedesinfektion (EN 12 791)	Dakterizid	MRSA	TB	levurozid	fungizid	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid PLUS (EN 14476)	응공 viruzid (EN 14476)	Polioviren (o.B.)	Adenoviren	Noroviren	Rotaviren	
	desderman® pure	Α	•	•	•	•	•	•	30 Sek	bei 2-maliger Anwendung	30 Sek	•	30 Sek	1,5 Min		30 Sek	30 Sek	15 Sek	30 Sek	30 Sek	15 Sek	1	1 Min	15 Sek	15 Sek	30 Sek	19
u	desmanol® care	А	•	•	•	•	•	folgt				•	30 Sek	1,5 Min	15 Sek	15 Sek	15 Sek	15 Sek		15 Sek	1 Min			1 Min	15 Sek	10 Sek	19
infektio	desmanol® pure	В	•	•	•	•	•					•	30 Sek	1,5 Min	30 Sek	30 Sek	30 Sek	30 Sek		15 Sek	2 Min			2 Min	30 Sek	15 Sek	20
Händedesinfektion	desderman® pure gel	В	•	•	•	•						•	30 Sek	1,5 Min	30 Sek	30 Sek		15 Sek	1 Min	30 Sek	2 Min	2 Min	1,5 Min	2 Min	15 Sek	15 Sek	20
Hä	desmanol® pure gel	В	•	•	•	•						•	30 Sek	1,5 Min	30 Sek		30 Sek	30 Sek		30 Sek	2 Min			2 Min	30 Sek	15 Sek	20
	schülke optics lotion																										21

Weitere Anwendungsempfehlungen und Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte den produktspezifischen Unterlagen, www.schuelke.com

На	ut Hände		Ei	nsatzgebi	et			Ei	genschaft	en		Seite
	de- und Körperwaschung, de- und Hautpflege	Waschen mit Wasser	Waschen ohne Wasser	Haut- pflege	Haut- schutz	\$ Spezial-anwendung	farbstoff- frei	parfüm- frei	seifen- frei	hoher Fettgehalt (W/O)	schnell einziehend (O/W)	
	sensiva® wash lotion	•					•	•	•			24
hung	esemtan® wash lotion	•							•			24
Hände- und Körperwaschung	s&m wash lotion	•							•			24
Häi	esemtan® wash mitts		•				•		•			25
	esemtan® cleansing foam		•				•					25
	sensiva® protective cream				•		•	•		•		28
	sensiva® protective emulsion				•		•	•			•	28
g e	sensiva® dry skin balm			•			•	•		•		28
Hautpflege	sensiva® regeneration cream			•			•	•				28
Ha	esemtan® skin lotion			•			•				•	29
	esemtan® dry skin balm			•			•			•		29
	esemtan® active gel					•	•					29

Weitere Anwendungsemptehlungen und Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte den produktspezifischen Unterlagen, www.schuelke.com

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Es liegt in Ihren Händen.

Die Hand ist das vielseitigste Werkzeug der Welt und das wichtigste des Menschen.

"Kann es einen größeren Widerspruch geben, als eine im Krankenhaus erworbene Infektion?"*

Die Händehygiene ist dabei die wichtigste Präventionsmaßnahme.

Trotz aller modernen Technik ist die Hand im täglichen Klinikalltag ständig im Einsatz und mit Geräten und Patienten im Dauerkontakt. Die meisten nosokomialen Infektionen können durch eine ausreichend häufig und richtig durchgeführte Händedesinfektion vermieden werden.



"Aktion Saubere Hände": schülke macht mit.



Die "Aktion Saubere Hände" ist eine nationale Kampagne, um die mangelnde Einhaltung (d. h. Compliance) der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Dabei wird die Bedeutung der Händedesinfektion in

den Vordergrund gestellt, die wesentlich dazu beiträgt, nosokomiale Infektionen zu verhindern.

- Die Compliance des Personals bei der Händedesinfektion hat einen direkten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, pathogene Keime zu übertragen und nosokomiale Infektionen zu verursachen.
- Händedesinfektion ist keine Option oder eine Sache der Gelegenheit.**

Es gibt viele verschiedene Situationen, die eine Händedesinfektion notwendig machen. Die WHO hat deshalb ein Modell geschaffen, das diese Situationen zeitlich gruppiert und in "VOR" und "NACH" Kontakt einteilt. Diese "My 5 Moments of Hand Hygiene" orientieren sich am Kontaminationsrisiko (z. B.):

- Halten sich Pflegekräfte und Ärzte in direkter oder erweiterter Patientenumgebung auf?
- Besteht Kontakt mit kolonisierten oder nicht kolonisierten Körperbereichen?

Die "Aktion Saubere Hände" wurde in den Jahren 2008 bis 2013 vom Bundesministerium für Gesundheit finanziert. Seit 2014 existiert ein Förderkreis ASH, der sich aus unterschiedlichen Organisationen zusammensetzt. schülke ist als offizieller Partner und Pionier in der Händedesinfektion mit mehr als 100-jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Hygiene mit von der Partie.

www.aktion-sauberehaende.de

^{*} Zitat Johann Peter Frank, welcher als Begründer der öffentlichen Hygiene gilt.

^{**} Quelle: D.Pittet et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygien The Lancet 2000; 356; 1307-1312

Händehygiene im Blickpunkt.


Auf der ganzen Linie hygienisch rein!

Bei der hygienischen Händedesinfektion wird die hauteigene – residente – Bakterienflora kaum beeinträchtigt. Es wird in erster Linie die hautfremde – transiente – Bakterienflora beseitigt.

Unbedingt durchzuführen ist die Händedesinfektion*

- 1 | VOR Patientenkontakt
- 2 | VOR einer aseptischen Tätigkeit
- 3 | NACH Kontakt mit potentiell infektiösem Material
- 4 | NACH Patientenkontakt
- 5 NACH Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung
- * Quelle: Informationsbroschüre "Aktion Saubere Hände" analog den Empfehlungen der WHO Definition

Diese Kontaminationskeime bergen ein hohes Infektionsrisiko, da sich darunter auch pathogene Keime und virale Erreger befinden.

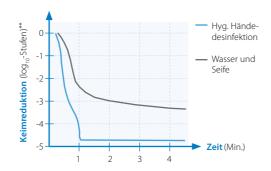

** Reduzierung um 3 log₁₀-Stufen bedeutet eine Keimreduzierung um ≥ 99,9 %


Alkoholische Händedesinfektionsmittel. Die verträgt nahezu jede Haut.

Alkoholische Händedesinfektionsmittel enthalten hohe Konzentrationen an Ethanol, 1-Propanol und /oder 2-Propanol zu unterschiedlichen Anteilen. Immer wieder stellt sich die Frage nach der Hautverträglichkeit dieser hohen Mengen Alkohol. Anders als bei Wasser und Seife verändert sich der hauteigene pH-Wert durch Alkohol bei häufiger Anwendung nicht wesentlich. Die hautschützenden Eigenschaften des natürlichen Säureschutzmantels der Haut werden somit bewahrt. Alkoholart und dessen Konzentration im Produkt sind verantwortlich für Wirksamkeit, Hautverträglichkeit und subjektive Vorlieben.

Die Alkohole in den Einreibepräparaten verflüchtigen sich sehr schnell. Dabei werden die wichtigen Hautfette zwar gelöst, aber nicht entfernt, sondern vielmehr umverteilt – die Hautfettschicht bleibt also intakt.

Die eingesetzten Alkohole verursachen nur in sehr seltenen Fällen eine Kontaktallergie.

Außerdem bieten die hochwertigen Desinfektionsmittel von schülke erhöhten Hautschutz – besonders bei häufiger Anwendung – durch zugesetzte Feuchthaltesubstanzen sowie pflegende und rückfettende Zusatzstoffe.

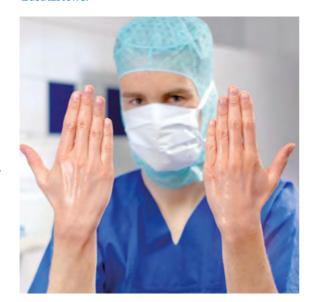

Soviel Zeit muss sein: Compliance im Klinikalltag.

Hygienische Händedesinfektion erfordert konsequente Anwendung.

Was im OP zur unabdingbaren Maßnahme vor jedem Eingriff gehört (chirurgische Händedesinfektion), muss auch im allgemeinen Ablauf des Klinikalltags noch konsequenter durchgeführt werden – die hygienische Händedesinfektion.

Unbestritten ist, dass die hygienische Händedesinfektion Zeit kostet und den Arbeitsablauf unterbricht. Unbestritten ist aber auch, dass Hände die wesentlichen Überträger von Krankheitserregern sind. Somit erhöht jede unterlassene oder nicht ordnungsgemäß durchgeführte Händedesinfektion das Übertragungsrisiko. Nur eine konsequente Händedesinfektion bei Ärzten, Schwestern, Pflegern und Patienten kann die Übertragungskette durch mittelund unmittelbaren Kontakt unterbinden!

Genannte Gründe für nicht angewandte Händedesinfektion (lt. EURIDIKI-Studie zur hygienischen Händedesinfektion):

- eigene Vergesslichkeit / Bequemlichkeit
- mangelnde Schulung, Unkenntnis
- · Zeitdruck, Zeitmangel
- · Angst vor evtl. Hautproblemen
- mangelndes Problembewusstsein

Nicht angewandte Händedesinfektion hat auch psychologische Ursachen. Händedesinfektion wird lediglich als eine vorbeugende Maßnahme empfunden – aber nicht immer auch als lebenswichtig.

Aber: Nicht nur die Erreger, sondern auch das Ausmaß ihrer Gefährlichkeit ist unsichtbar!







Compliance - oder das Einhalten von Richtlinien und Vorgaben.

Verschiedene Studien und Erhebungen haben sich mit dem Thema Compliance in der Händedesinfektion in deutschen Krankenhäusern beschäftigt*. Dabei wurden Häufigkeit und Frequenz der Händedesinfektion nach Anlässen gemessen sowie der Verbrauch von Händedesinfektionsmitteln ermittelt. Diese Daten

wurden mit den Vorgaben verglichen. Mit diesen Studien konnte belegt werden, dass die Compliance im Durchschnitt niedrig ist und bei nur ca. 50 % liegt. Die Ergebnisse variieren sowohl in Bezug auf die eingesetzte Methode wie auch der einbezogenen Fachrichtungen:

Art der Beobachtung	Compl	Compliance-Rate (%)	
	Mittelwert	Variationsbreite	
ngekündigte Beobachtungen	55,2	25,7 – 83,7	Eckmanns, 2001
Inangekündigte Beobachtungen	52,2	keine Angabe	Wendt, 2004
n- und unangekündigte Beobachtungen	41,2	29,6 – 46,8	Eckmanns, 2006

Voller Schutz fürs ganze Jahr!

Mit den Ganzjahresprodukten desderman® pure und desmanol® care das ganze Jahr über Hände wirksam desinfizieren.

GANZ

JAHRES

PRODUKT

Norovirus-Infektionen häufen sich in den kalten Wintermonaten. Zur Prävention und im Ausbruchsfall wird häufig das Produkt gewechselt. Das kostet nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld und ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Als Norovirus-wirksame Produkte akzeptiert das Robert Koch-Institut Präparate mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen Adenoviren und Murine Noroviren*. RKI-gelistete Produkte mit voller Viruzidie nach DVV** müssen nur auf Anordnung des Amtsarztes eingesetzt werden.

Im Frühjahr

Im Winter

treten besonders viele Viren auf; vor allem das Norovirus ist besonders häufig vorhanden. Bei Verdachtsfällen ist kein Produktwechsel notwendig: Mit den Händedesinfektionsmitteln desderman® pure und desmanol® care können Ausbrüche effektiv verringert werden.

Im Herbst

startet die Infektionszeit – somit bleibt die Händehygiene als Prävention im Fokus. Händedesinfektion mit desderman® pure und desmanol® care – der Schutz gegen Keime im ganzen Jahr!



ist kein aufwendiger Wechsel des

Händedesinfektionsmittels notwendig: desderman® pure und desmanol® care bleiben gegen viele saisonal auftretende Viren und Bakterien wirksam, auch gegen Influenza-Viren.

Im Sommer

bleiben desderman® pure und desmanol® care für Personal und Patienten der sichere Schutz vor übertragbaren Keimen durch Patienten- oder Flächenkontakt.

Händedesinfektionsmittel, die nach EN 14476 viruzid und begrenzt viruzid PLUS sind, sind somit auch wirksam gegen Noroviren. Sie können ganzjährig für die prophylaktische Händedesinfektion eingesetzt werden.

desderman® pure

(viruzid gem. EN 14476)

- + mit bewährtem Rückfettungssystem
- + besonders hautfreundlich
- + umfassender Schutz

desmanol® care

(begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476)

- + Nachhaltige Hautpflege***
- + sehr hohe Hautverträglichkeit und Akzeptanz
- + umfassender Schutz
- = die Mittel der Wahl fürs ganze Jahr!

Die Vorteile von präventiv wirkenden Maßnahmen mit Norovirus-wirksamen Präparaten liegen auf der Hand:

- deutlich geringere Anzahl von Norovirus-Fällen, dadurch werden wesentlich seltener behördliche Anordnungen von Entseuchungen notwendig
- geringere Kosten durch den Einsatz der Standard-Präparate
- kein Produktwechsel bei Norovirus-Verdachts-
- höhere Compliance bei der Händedesinfektion aufgrund der bewährten Hautverträglichkeit

Händedesinfektion

desderman® pure Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Präparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

ТВ

VIRU ZID

ТВ

VIRU ZID PLUS



- inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem
- RKI-Liste gem. §18 IfSG (begrenzt viruzid)





Gebindegröße Art.-Nr.

Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche	116823
Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	116802
Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche	116803
Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche	116804
Karton mit 20 x 500 ml-hyclick® Spenderflasche	70000754
Karton mit 10 x 1 l-hyclick® Spenderflasche	70000755





Art.-Nr.

Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110

desmanol® care

Alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel - farbstoff- und parfümfrei.



- · umfassender Schutz und nachhaltige Pflege perfekt kombiniert
- begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- · inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden
- ProPanthenol-Komplex: pflegt mit jeder Händedesinfektion
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt



Gebindegröße

3	
Karton mit 20 x 50 ml-Kittelflasche	70001147
Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche	70001036
Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	7000103
Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche	7000103
Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche	70001039
Karton mit 20 x 500 ml-hyclick® Spenderflasche	7000108

Karton mit 10 x 1 l-hyclick® Spenderflasche 70001086







Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



desmanol® care

Die perfekte Kombination aus Schutz & Pflege

desmanol® care, so sanft, so sicher,

- Ganzjahresprodukt
- Begrenzt viruzid PLUS¹
- ProPanthenol-Komplex
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt²
- Geprüfte Arzneimittel-Qualität
- gem. EN 14476
- Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaTronnier, 2017).

* deutsche Art.-Nr. – CH/AT: Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartne

^{*} Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin Nr. 18, 05,05,2014; S. 2 ** Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V.

^{***} Anwendungs- und Hautverträglichkeitsstudie (DermaTronnier, 2017).

Wir setzen Sie ins Bild! Mit schülke optics Lücken bei der hygienischen Händedesinfektion erkennen.

Erreger – der unsichtbare Feind, dem nur mit gründlicher Händedesinfektion begegnet werden kann. Das Problem dabei ist, dass wir mit bloßem Auge nicht erkennen können, ob alle Hautareale gründlich desinfiziert wurden. Bestimmte Hautstellen, z. B. Fingerspitzen, Daumen oder auch die Haut unter getragenem Schmuck, sind schwer zugänglich und werden häufig vernachlässigt.

Mit schülke optics und UV-Licht können Sie jetzt Lücken bei der Händedesinfektion sichtbar machen:

schülke optics ist ein mit fluoreszierendem Wirkstoff versetztes Produkt zum Training der Technik der Händedesinfektion. Desinfizieren Sie damit Ihre Hände gemäß den gültigen Standards und



einer Wellenlänge von 366 nm betrachten, werden Sie helle, leuchtende sowie auch dunkle Areale auf Ihrer Haut erkennen können. Die leuchtenden Areale sind ein Zeichen für ausreichende Benetzung und damit Desinfektion. Die dunklen Areale zeigen die


Kontakt mit dem Desinfektionsmittel hatten.

Ihrer individuellen Vorgehensweise – so, wie Sie es

Wenn Sie jetzt Ihre Hände unter einer UV-Lampe bei

Ein Tipp zur Anwendung: Je dunkler der Raum bzw. die Umgebung ist, in der die UV-Lampe aufgestellt ist, desto deutlicher wird der sichtbare Effekt.

Hautstellen, die keinen oder keinen ausreichenden

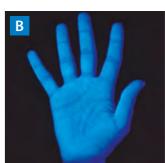

So ist es richtig Keine Benetzungslücken sind zu erkennen der Beweis für eine einwandfrei durchgeführte Händedesinfektion!

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt!

desmanol® pure

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus.



Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche

Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche

Karton mit 10 x 1 I-Euroflasche

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

Gebindegröße

Unser Plus

- begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- · der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege dank innovativem Rückfettungssystem aus Dexpanthenol und Ethylhexylglycerin
- farbstoff- und parfümfrei



RO RO	VAH	(HO)
ni ii		

Zubehör

Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110

Karton mit 20 x 500 ml-hyclick® Spenderflasche 70000817

Karton mit 10 x 1 l-hyclick® Spenderflasche 70001795



* hyclick®-Artikel folgen in Kürze

Händedesinfektion

* hyclick®-Artikel folgen in Kürze

desderman pure® gel

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Händedesinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.



Art.-Nr.*

125210

Unser Plus

- viruzid gemäß EN 14476
- inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden
- · sehr gute Hautverträglichkeit und ein angenehmes Hautgefühl dank bewährtem Rückfettersystem
- kein Heruntertropfen von den Händen durch anwenderfreundliche



Gebindegröße Art.-Nr.* Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche 126908 Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche 126902 Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche Karton mit 20 x 500 ml-hyclick® Spenderflasche 70000815 Karton mit 10 x 1 l-hyclick® Spenderflasche 70000816



Zubehör

Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110

* hyclick®-Artikel folgen in Kürze

desmanol® pure gel

Gebrauchsfertiges alkoholisches Gel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus.



Unser Plus

- begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476
- inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege dank innovativem
- Rückfettungssystem aus Dexpanthenol und Ethylhexylglycerin
- · farbstoff- und parfümfrei
- · kein Heruntertropfen von den Händen durch anwenderfreundliche Gel-



Gebindegröße

Art
 7000

Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche	70001041
Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	70001042
Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche	70001043
Karton mit 20 x 500 ml-hyclick® Spenderflasche	70001793
Karton mit 10 x 1 l-hyclick® Spenderflasche	70001794

Zubehör





schülke optics | schülke optics lotion

Zum Training und zur Überprüfung der Händedesinfektion.





Unser Plus

- fluoreszierende Lösung zur Überprüfung der Händedesinfektion
- · zum Kontrollieren der Ergebnisse der Einreibetechnik
- · Sichtbarmachen von Lücken unter UV-Licht

schülke optics lotion

- fluoreszierende Emulsion zur Überprüfung der Handschuhdichtigkeit
- · Sichtbarmachen von Lücken unter UV-Licht

Gebindegröße

Art.-Nr. schülke optics

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

schülke optics lotion Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche



Zubehör

Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110 schülke UV Box*

* Bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter


Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Sicherheit und Pflege – davon sollte keine Hand unberührt bleiben!



Unsere Haut: Die genialste Verpackung der Evolution!

Optimaler Hautschutz durch gezielte Hautreinigung und wirksame Pflege.

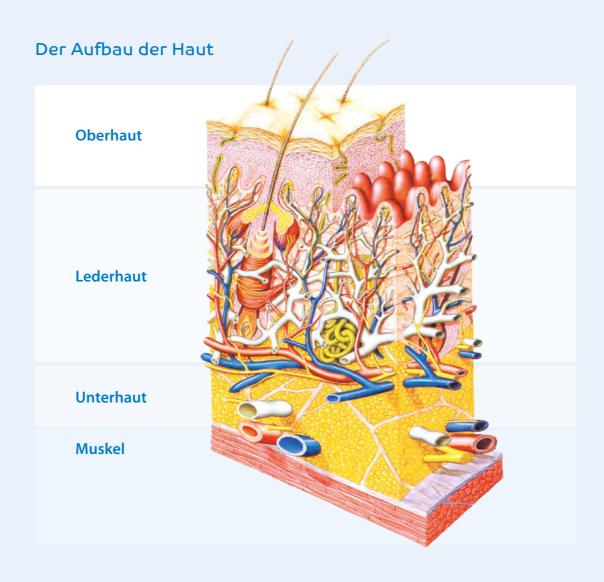

Die Oberhaut (Epidermis)

ist ein sich ständig erneuerndes Gewebe aus mehreren Zellschichten – Keimschicht, Stachelzellenschicht, Körnerzellenschicht und Hornschicht. Von der untersten Zellschicht ausgehend werden ständig neue Zellen gebildet, die in einem konstanten Zyklus von etwa vier Wochen zuletzt als Hornplättchen von der Hornschicht wieder abgeschilfert werden. Die Oberhaut leistet auf diese Weise die wichtigsten Schutzfunktionen gegen chemische und physikalische Einflüsse.

Die Lederhaut (Corium)

besteht aus kollagenen und elastischen Bindegewebsfasern. Sie ist für die Festigkeit und Belastbarkeit der Haut durch mechanische Einwirkungen verantwortlich. In der Lederhaut befinden sich Rezeptoren der Haut sowie zahlreiche Blutgefäße, Fettgewebe, Haarbälge, Nerven sowie Talg- und Schweißdrüsen. Die Lederhaut schützt den Körper vor Temperaturschwankungen und mechanischen Verletzungen.

Die Unterhaut (Subkutis)

ist die Verbindungsschicht zu den tiefer liegenden Muskel- und Organgeweben und besteht aus lockerem Bindegewebe, in dem die Fettzellen eingebettet sind. Die Subcutis schützt unsere Organe vor Druck und Stoß, denn ihre Fetteinlagerungen fungieren als Stoßdämpfer, wirken außerdem wie ein Kälteschutz und dienen als Energiespeicher.





Hände- und Körperwaschung

sensiva® wash lotion

Hautfreundliche farbstoff- und parfümfreie Waschlotion. Unser Plus

• seifenfreie Waschlotion auf Basis hautverträglicher Tenside

- schont die Haut
- · reinigt mild
- · farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Gebindegröße	ArtN
Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	11400
Karton mit 10 x 1 I-Spenderflasche	11400
Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche	11400
5 I-Sparkanister	11400
Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick®	7000013

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®





esemtan® wash lotion

Seifenfreie Waschlotion auf Basis besonders hautmilder Tenside und naturidentischer Wirk- und Pflegekomponenten.



70000138

Unser Plus

- Allantoin schützt die Haut vor Austrocknung und Reizungen
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- für alle Hauttypen geeignet
- pH-hautneutral

Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	116625
Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche	116602
Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche	116603
5 l-Sparkanister	116604
Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick®	70000133
Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®	70000134

Zubehör



Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



s&m wash lotion

Seifenfreie Hände- und Körperwaschung.

- · erhält den Säureschutzmantel der Haut mit einem hautneutralen pH-Wert
- · reinigt wirkungsvoll und hautschonend
- frisch duftend
- für alle Hauttypen geeignet
- auf Basis einer Kombination hautverträglicher Tenside

Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche 112006 Karton mit 10 x 1 I-Spenderflasche 112002 Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche 112003 Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick® 70000135



70000136

Zubehör Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110

Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®

Waschen ohne Wasser – Hände und Körper





schülke -}



esemtan® wash mitts

Waschhandschuhe zur schnellen, pflegenden und sanften Ganzkörperwaschung ohne Wasser.

Unser Plus

- besonders hautschonend mit Allantoin für zusätzliche Pflege
- hervorragende Reinigung und angenehmer Duft
- gebrauchsfertig und einfach in der Anwendung
- flauschig, weiches Tuchmaterial
- · dermatologisch geprüft

esemtan® cleansing foam

Schonender Reinigungsschaum.



- · hautschonend, gut reinigend
- geruchsabdeckend
- hinterlässt keinen klebrigen Film
- mit frischem Duft
- dermatologisch geprüft









Gebindegröße

Art.-Nr. Karton mit 10 x 500 ml-Sprühdose 127001



* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

25

Keine Angriffsfläche bieten!

Rissen, Schrunden und Ekzemen wirkungsvoll vorbeugen.

Wenn äußere oder innere Einflüsse die Haut reizen, d. h. eine zu starke Beanspruchung erfolgt, werden die hauteigenen Regenerationsmechanismen überfordert.

Dann reagiert unsere Haut spürbar: Sie juckt, wird rau, schuppig oder sogar rissig. In der Folge können Hautkrankheiten auftreten. Dabei handelt es sich zu ca. 90 % um Ekzeme, weitere ca. 10 % machen entzündliche, nicht infektiöse Erkrankungen der Oberhaut und der oberen Lederhaut aus. Regelmäßig vorbeugende Maßnahmen sind der beste Schutz vor der Entstehung von Hautreizungen und den daraufhin häufig folgenden allergischen Kontaktekzemen.

Folgende Maßnahmen dienen einer erfolgreichen Vorbeugung von Hauterkrankungen bei stark beanspruchten Händen:

- spezieller Hautschutz / Tragen von Handschuhen (präparativ)
- gezielte und schonende Hautreinigung
- wirksame Hautpflege (reparativ)

Jede dieser Komponenten ist von gleich großer Bedeutung für den Hautschutz.

Eincremen – aber richtig: Produkt aus hygienischen Gründen über Pumpe oder aus Spender entnehmen Produkt in saubere, trockene Hände einreiben Produkt auf den Handrücken auftragen und mit dem anderen Handrücken eincremen anschließend auch Finger und zuletzt Handinnenseiten eincremen beim Einreiben besonders auf Fingerzwischenräume und Nagelbett achten Was Hautschutz Hautreinigung Hautpflege Wann • nach Pausen nach Verschmutzung · ggf. nach hautgefährdender zwischendurch vor Pausen vor hautgefährdender • und nach der Arbeit morgens und abends Tätigkeit sensiva® dry skin balm sensiva® protective cream Womit (z.B.) sensiva® wash lotion sensiva® protective emulsion sensiva® regeneration cream

Auf den Inhalt kommt es an!

Ausgewählte Inhaltsstoffe von schülke Produkten

INCI – Bezeichnung	Inhaltsstoff	Erklärung	Enthalten in
(Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat)	Cetearyloctanoat	Rückfetter Fettsäureester	desderman® pure
Allantoin	Allantoin	beruhigend pflegend lindernd schützend pflanzlich	sensiva® protective cream sensiva® protective emulsion sensiva® wash lotion octenisan® wash lotion octenisan® Waschhandschuhe
Bisabolol	Bisabolol	entzündungshemmend lindernd pflegend Wirkstoff des Kamillenöls <i>pflanzlich</i>	sensiva® regeneration cream octenicare® repair creme
Butyrospermum Parkii Butter	Sheabutter	pflegend fettend Fett aus der Kariténuss pflanzlich	sensiva® dry skin balm
Cera Alba	Bienenwachs	pflegend schützend	sensiva® protective emulsion
Cetearyl Alcohol	Cetylstearylalkohol	Emulgator, Stabilisator, Konsistenzgeber pflanzlich	sensiva® regeneration cream desmanol® care
Cetearyl Ethylhexanoate	Cetearyl Ethylhexanoate	geschmeidig machend Öl-Struktur ähnlich dem Bürzeldrüsenfett	sensiva® protective cream sensiva® protective emulsion
Ethylhexylglycerin	Ethylhexylglycerin	hautpflegend feuchthaltend	sensiva® wash lotion
Glycerin	Glycerin	feucht haltend	sensiva® dry skin balm sensiva® protective emulsion
Glyceryl Stearate	Glyceryl Stearate	Emulgator, Stabilisator, Konsistenzgeber	sensiva® regeneration cream
Hamamelis Virginiana Water / Hamamelis Virginiana Bark/Leaf/Twig Extract	Hamamelis	adstringierend Gerbstoff hautpflegend schützend Extrakt aus verschiedenen Teilen der Zaubernuss pflanzlich	sensiva® protective emulsion sensiva® protective cream
Hydrogenated Castor Oil	Rhizinusöl	hautpflegend Ester mit gehärtetem Rizinusöl pflanzlich	sensiva® protective cream
Isopropyl Myristate	Isopropyl Myristate	hautpflegend rückfettend Fettsäureester pflanzlich	desderman® pure sensiva® protective emulsion
Lauryl Glucoside	Zuckertensid	reinigend nicht ionisch hautfreundlich (mildert die irritative Wirkung von Sodium Laureth Sulfate)	sensiva® wash lotion
Magnesium Sulfate	Magnesium Sulfate	Stabilisator mineralisch	sensiva® dry skin balm sensiva® protective cream
Olus Oil	Olus Oil	Fettsäuretriglyceride aus pflanzlichem Öl pflegend pflanzlich	sensiva® protective cream
Panthenol Ho CH3 O OH	Dexpanthenol	hautpflegend Provitamin B5 regenerierend wundheilungsfördernd	sensiva® regeneration cream octenicare® repair creme desmanol® care
Potassium Sorbate	Kaliumsorbat	Konservierungsmittel (Lebensmittelzusatzstoff E202)	sensiva® dry skin balm sensiva® protective cream sensiva® protective emulsion
Propylene Glycol	Propylene Glycol	feuchthaltend	sensiva® dry skin balm sensiva® regeneration cream sensiva® protective cream
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil	Jojoba-Öl	pflegend pflanzlich	sensiva® protective emulsion
Sodium Benzoate	Natriumbenzoat	Konservierungsmittel (Lebensmittelzusatzstoff E211)	sensiva® dry skin balm sensiva® protective cream sensiva® protective emulsion
Sodium Chloride	Kochsalz, Natriumchlorid	verdickend mineralisch	sensiva® wash lotion
Sodium Hydroxide	Natriumhydroxid	pH-regulierend mineralisch	sensiva® wash lotion
Sodium Laureth Sulfate	Natriumlaurylethersulfat	reinigend	sensiva® wash lotion
Sodium Polyacrylate	Natriumpolyacrylat	Gelbildner	sensiva® protective emulsion
Sorbic Acid	Sorbinsäure	Konservierungsmittel (Lebensmittelzusatzstoff E200)	sensiva® regeneration cream
Sorbitol	Zuckeralkohol	hautpflegend feuchthaltend pflanzlich	desderman® pure desmanol® care
Stearic Acid	Stearinsäure	rückfettend stabilisierend	sensiva® protective emulsion
Tocopherol	Vitamin E	pflegend Antioxidationsmittel pflanzlich	sensiva® dry skin balm
Zinc Stearate	Zinc Stearate	stabilisierend	sensiva® dry skin balm sensiva® protective cream

Gebindegröße

Karton mit 30 x 100 ml-Tube







Händepflege



sensiva® protective cream

Besonders hautverträgliche farbstoff- und parfümfreie Schutzcreme.



Art.-Nr.

129801

Unser Plus

- stärkt die natürliche Hautbarriere
- Schutzcreme W/O (gem. TRGS 401)
- · zieht schnell ein · gut verteilbar
- · Hautpflege kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden
- · farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft



sensiva® protective emulsion

Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut.



Unser Plus

- · leichte Pflege & Schutz
- Schutzlotion O/W
- zieht schnell ein gut verteilbar
- · Hautschutz kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden
- · farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Gebindegröße

Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche 70000155 Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



sensiva® dry skin balm

Farbstoff- und parfümfreier Pflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut.



Unser Plus

- · intensive Pflege
- · spendet Feuchtigkeit
- gut verteilbar
- · farbstoff- und parfümfrei
- · dermatologisch geprüft

Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche 141620

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

Gebindegröße

Karton mit 30 x 50 ml-Tube

Zubehör Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



28

sensiva® regeneration cream

Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut.



Art.-Nr.

100301

Unser Plus

- · reichhaltige Regenerationscreme
- gut verteilbar
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Hautpflege









70000897

70000898



esemtan® skin lotion

Farbstofffreie Körperpflege-Lotion für die normale Haut.

Unser Plus

- · pflegend & feuchtigkeitsspendend
- · zieht schnell ein
- · gut verteilbar
- perfekt abgestimmt auf desderman® pure + desmanol® pure
- · farbstofffrei und angenehmer Duft
- · dermatologisch geprüft

Gebindegröße	ArtNı
Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche	7000089

Zubehör

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche

Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



esemtan® dry skin balm

Farbstofffreier Körperpflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut.



Unser Plus

- · reichhaltige Pflege
- · versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit
- perfekt abgestimmt auf desderman® pure und desmanol® pure
- · farbstofffrei und angenehmer Duft
- dermatologisch geprüft

Gebindegröße

Art.-Nr. 70000985

Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche 70000843

Zubehör

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



esemtan® active gel

Für durchblutungsanregende, belebende Einreibungen.



Unser Plus


- erfrischend und belebend durch ätherische Öle
- zur Heilmassage bei Verspannungen, Schwere in den Beinen u. ä.
- · gezielt und wirtschaftlich einsetzbar

Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 30 x 150 ml-Tube	115503
Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	115506

Zubehör

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



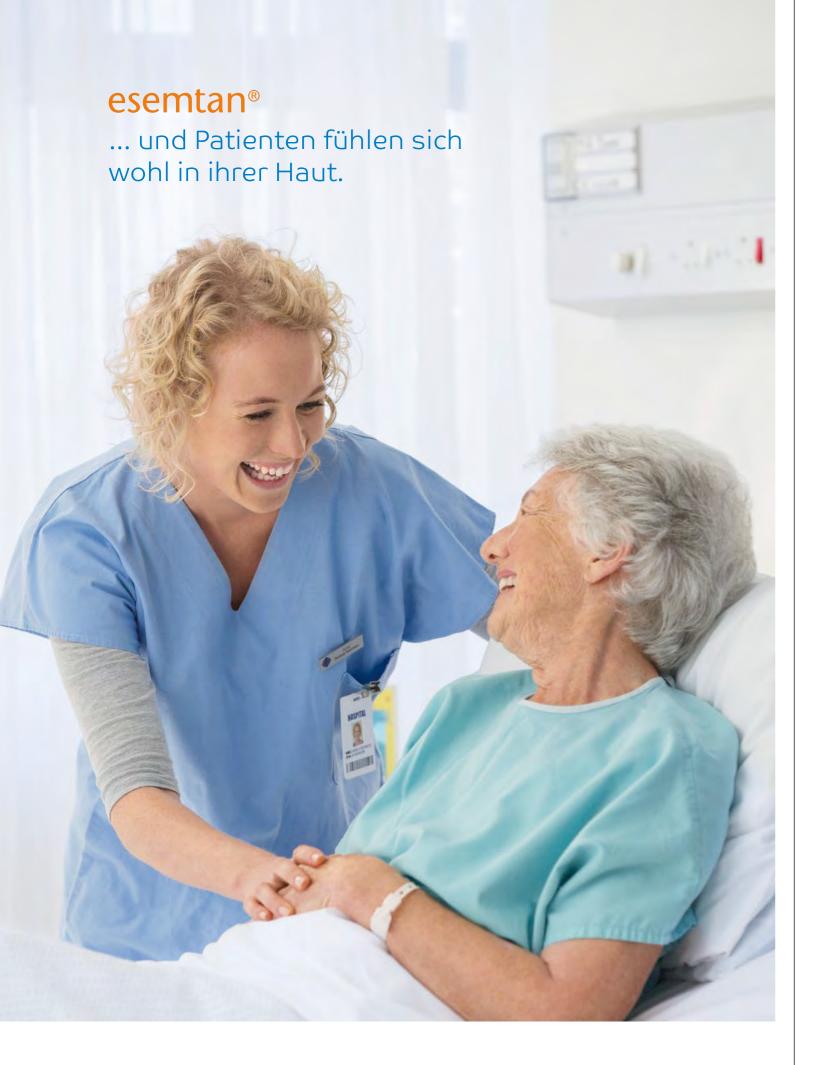

Pflichttexte

zu zugelassenen Arzneimitteln gem. §4 HWG

desderman® pure:
- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Ph.Eur.)


* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren

desmanol® care: 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung

- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96 % 9,9 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Methylethylketon. • Anwendungsgebiete: hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze® und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung "begrenzt viruzid")** ein. • Gegenanzeigen: desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. • Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzeme) sind möglich. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol.

** Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH · 22840 Norderstedt · Tel: +49 40 521 00-0 · Fax: +49 40 521 00-318

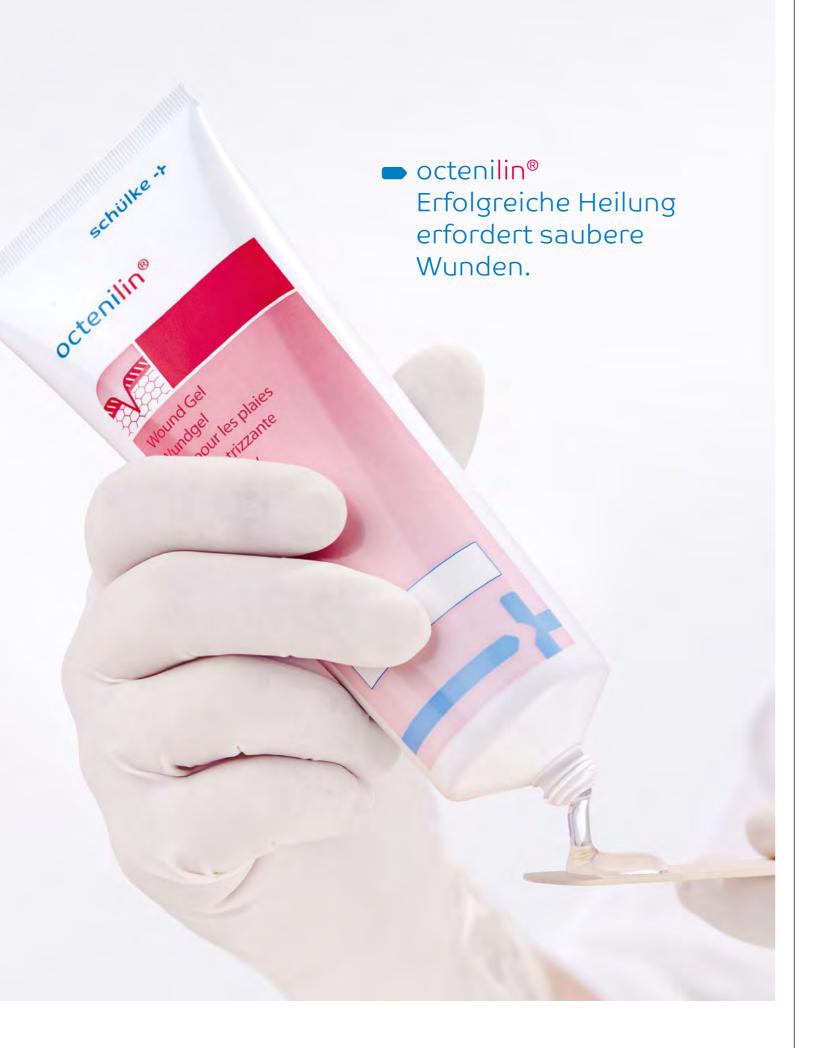

Der Wirkstoff Octenidin. Antiseptisch. Wirkungsvoll. Verträglich.

Mit Sicherheit die richtige Antiseptik für die Schleimhaut und alle Wunden.

Mit der Geburtsstunde des innovativen Wirkstoffes Octenidin Mitte der 1980er Jahre begann der Siegeszug eines neuen antimikrobiellen Wirkstoffs bei schülke.

Auf der Suche nach einem wirksamen und verträglichen antiseptischen Wirkstoff für die Mundschleimhaut synthetisierten Forscher erstmals den positivgeladenen Wirkstoff Octenidin, Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse der Bispyridine.

Die Erfolgsgeschichte des Wirkstoffes begann mit octenisept®:

octenisept® wurde als erstes Octenidin-Produkt im Jahre 1990 als Arzneimittel und Schleimhaut-Antiseptikum eingeführt.

Nur wenige Jahre später (1995) wurde die Zulassung auf die antiseptische Wundbehandlung erweitert.

In nur kurzer Zeit etablierte sich octenisept® zum heutigen Marktführer in der Wund- und Schleimhautdesinfektion*.

Dank der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Wirkstoffes folgten mit den Jahren die Einführungen der Marken octeniderm®, octenisan®, octenidol® und octenilin® für die unterschiedlichen Einsatzbereiche.

Die Vorteile des Wirkstoffes Octenidin:

- breites antimikrobielles Wirkungsspektrum bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid
- 48 Stunden Remanenzwirkung
- sehr gute Haut-, Schleimhaut- und Gewebeverträglichkeit
- führt nicht zur Bildung von Resistenzen
- extrem niedriges Allergiepotenzial
- für Schwangere (nach dem 1. Trimenon), Säuglinge und Frühgeborene geeignet**



^{*} Quelle: IMS Health, DKB Verbrauchsdaten Umsatz 2017

^{**} Anwendungshinweise der Präparate beachten!

35

schülke hat, was Keime fürchten: Wund-, Haut-, Schleimhautantiseptik & MRE-Dekontamination.



Weitere Anwendungsempfehlungen und Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte den produktspezifischen Unterlagen, www.schuelke.



octenisan®

Waschhandschuhe

 Infektionsprävention mit Octenidin.



Wund- und Schleimhautantiseptik | Wundmanagement



octenisept®

Zur schmerzfreien Wund- und Schleimhautantiseptik.





Unser Plus

- breites antiseptisches Wirkungsspektrum
- schneller Wirkungseintritt ab 1 Minute
- sehr gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- für Säuglinge und Frühgeborene geeignet*
- farblos



Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Klappdeckel	121406
Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe	121411
Karton mit 20 x 500 ml-Flasche	121464
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	121403
octenisept [®] Antiseptikum vor Katheterisiert der Harnblase Karton mit 100 x 15 ml-Flasche	ung 121407
octenisept® Wund-Desinfektion zur Wundversorgung: Karton mit 20 x 50 ml-Flasche	121418
Anstaltspackungen	
Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Klappdeckel	173702
Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe	173711
Karton mit 20 x 500 ml-Flasche	173706
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	173704
Zubehör	
Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche	134411
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche	134416
Sprühkopf für 500 ml / 1 l-Flasche	180212



octenilin® Wundgel

Zur Bedeckung, Befeuchtung und Reinigung von belegten, kontaminierten und chronischen Hautwunden sowie von Verbrennungswunden.



- befeuchtet und reinigt Wunden effektiv
- · löst Wundbeläge, nekrotisches Gewebe und Biofilm
- unterstützt den natürlichen Wundheilungsprozess durch ein ideales Wundheilungsmilieu
- schmerzfreie, besonders verträgliche Anwendung





121602

121616

Karton mit 20 x 20 ml-Faltenbalg Karton mit 6 x 250 ml-Tube

Gebindegröße



octenilin® Wundspüllösung

Wundspüllösung zur Reinigung und Befeuchtung von chronischen Wunden.



- Unser Plus
- hervorragende Reinigungsleistung
- · besonders haut- und gewebeverträglich
- für den wiederholten, langfristigen Gebrauch

Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 10 x 350 ml-Flasche 121701

* Anwendungshinweise beachten.

Wund- und Schleimhautantiseptik | Wundmanagement



octenicare® repair creme

Hautcreme zur Pflege und zum Schutz empfindlicher bzw. gereizter Haut.



Art.-Nr.

70001836

Unser Plus

- unterstützt die natürliche Hautregeneration durch Panthenol
- · schützt vor Feuchtigkeit und hemmt geruchsbildende Keime, z. B. bei Inkontinenz
- pflegt epithelisierende Wunden
- · frei von Parfüm- und Farbstoffen
- · dermatologisch getestet







Gebindegröße

Karton mit 20 x 50 ml-Tube

schülke wound pad

Therapeutisch effektiv für Wundheilung und Prävention.



Unser Plus

- · zur Wundbettkonditionierung belegter und / oder infizierter Wunden
- löst schmerzreduziert Fibrin und Debris
- in Kombination mit der octenilin® Wundspüllösung einsetzbar
- regt lokale Durchblutung im Wundgebiet an
- · granulationsfördernd
- individuell anwendbar durch unterschiedliche Porenstruktur

Gebindegröße

Karton mit 4 x 3 Schwämmen (weiß, blau, rot) 146010 Karton mit 10 x 1 Schwamm (blau)

Hautantiseptik



kodan® Tinktur forte farblos | gefärbt

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Hautantiseptikum.



Unser Plus

- mindestens 24 Stunden Langzeitwirkung
- · breites antiseptisches Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid* (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes-simplex-Viren)
- schneller Wirkungseintritt (15 Sek. vor Injektionen)
- sehr gute Hautverträglichkeit



Gebindegröße Art.-Nr.

kodan® Tinktur forte farblos

Karton mit 40 x 6 mi-Flaschchen	104021
Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe	104005
Karton mit 10 x 1 I-Flasche	104007
A r le l	

Anstaltspackungen Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe 104012

The second secon	
Karton mit 5 x 2 l-Flasche	104010
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	70000899

kodan® Tinktur forte gefärbt

Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe	104802
Karton mit 10 x 1 I-Flasche	104804
Karton mit 5 x 2 l-Flasche	104803
Zubehör	
Wandhalterung 1 I-Vierkantflasche	134416

Sprühkopf für 500 ml / 1 l-Flasche 180212

* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014


37


Studien sprechen für octeniderm® farblos

Octenidin ist in Kombination mit Alkohol der optimale remanente Wirkstoff.

Grundlegende und vergleichende Untersuchungen zum Nachweis der Remanenz verschiedener Wirkstoffe zeigen, dass der remanente Effekt von Octenidin (OCT) im Vergleich zu Chlorhexidin (CHX) und PVP-lod mit Bezug auf reinem Isopropylalkohol (kurz: IPA) am ausgeprägtesten ist.*

Remanenz: 0,1 % Octenidin > 2 % Chlorhexidin > 1 % PVP-lod > 0,5 % Chlorhexidin > IPA

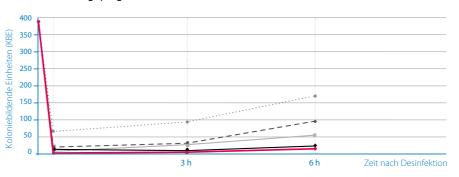


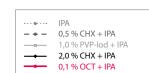

octeniderm® farblos zur Infektionsprävention vor invasiven Eingriffen mit einem sehr hohen Risiko

Keimzahl um die "ZVK (zentraler Venenkatheter)"-Einstichstelle im Zeitvergleich

Im Gegensatz zu einem alkoholischen Handelspräparat mit Benzalkoniumchlorid als Zusatzstoff, zeigt octeniderm® farblos eine hoch signifikante Keimzahlreduktion auch noch 48 Stunden nach Anlage eines Katheters (p = 0,0005).**

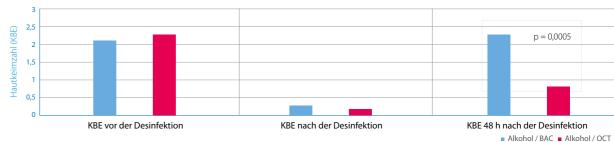

Durch den Wirkstoff Octenidin weist das Arzneimittel octeniderm® farblos eine nachgewiesene Remanenzwirkung von 48 Stunden auf. Dieser anhaltende Effekt gewährleistet insbesondere bei invasiven Eingriffen mit einem hohen Risiko einen wirksamen Schutz – auch vor



octeniderm® farblos

Gebrauchsfertiges, alkoholisches, remanentes Hautantiseptikum.



Art.-Nr.

118211

118212



- mindestens 48 Stunden Remanenzwirkung
- · insb. zur Anwendung vor invasiven Eingriffen mit einem hohen Infektionsrisiko
- breites antiseptisches Wirkungsspektrum: bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid*** (inkl. HBV, HIV, HCV, Herpes-simplex-Viren)
- schneller Wirkungseintritt

Gebindegröße

Karton mit 10 x 250 ml-Flasche

Karton mit 10 x 1 I-Flasche

Zubehör I / 1 I-Flasche 180212 ierkantflasche 134416







- Melichercikova, V.; et al. (2010): Residual effect of antiseptic substances on human skin. Journal of Hospital Infection, 75: 238-239
- ** Lutz J.T. (2016): Efficacy of two antiseptic regimes on skin colonization of insertions sites for two fiffernt catheter types: a randomized, clinical trial. Infection 44, 707-12.

octeniderm® farblos –

mit Remanenzeffekt.

sehr schnellem Wirkungseintritt.

Konzentration auf das Wesentliche. Hervorragende Wirkung und

langer Schutz sind wichtiger als auffälliges Markieren der Haut.

Mit einer Remanenzwirkung von mindestens 48 Stunden bei

alkoholisches Hautantiseptikum




Bündelstrategie zur Infektionsprävention.

Das richtige Produkt für jeden Anwendungsbereich.

Im Sinne der Patientensicherheit sind punktuelle Ein- Dabei werden exogene als auch endogene Fakzelmaßnahmen zur Infektionsprophylaxe nicht ausreitoren berücksichtigt. In der modernen Krankenchend. Bei der sogenannten Bündelstrategie werden mehrere Hygienemaßnahmen mit wirksamen Präven- der endogenen Flora des Patienten. tionspotenzialen zusammengefasst und konsequent angewandt.

haushygiene liegt der Fokus aber zunehmend auf

schülke Bündelstrategie bei MRE: Dekontaminationserfolg im Gesamtkonzept

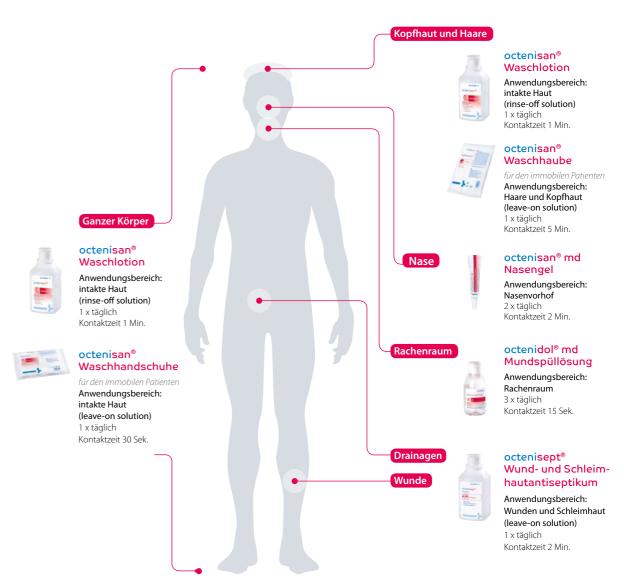

MRE-Dekontamination



octenisan® Waschlotion

Waschlotion für Haut und Haare auf Basis ausgesuchter Pflegesubstanzen.



Unser Plus

- milde und schonende Waschlotion für Haut und Haar
- zur Ganzkörperwaschung bei MRE
- geeignet für alle Hauttypen
- · hautneutraler pH-Wert
- · farbstoff- und parfümfrei
- besonders hautschonend mit Allantoin für zusätzliche Pflege

Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche	121501
Karton mit 20 x 500 ml-Flasche	121505
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	121503



octenisan® Waschhandschuhe

Zur schnellen, zuverlässigen und sanften Ganzkörperwaschung ohne Wasser.



134416

Unser Plus

- frei von Parfüm- und Farbstoffen
- zur Dekontamination bei MRE
- besonders hautschonend mit Allantoin für zusätzliche Pflege
- gebrauchsfertig und einfach in der Anwendung
- · kein Nachspülen notwendig



Gebindegröße

Karton mit 24 Packungen

10 Waschhandschuhe je Beutel

Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche

128022

Art.-Nr.

octenisan® md Nasengel

Zur Befeuchtung und Dekontamination der Nasenvorhöfe durch physikalische Reinigung und zur unterstützenden Wundbehandlung bei Läsionen des Nasenepithels.



Art.-Nr.

121617

Unser Plus

MRE-Dekontamination

- Dekontamination der Nasenvorhöfe durch physikalische Reinigung
- zur unterstützenden Wundbehandlung bei Läsionen des Nasenepithels
- zur Befeuchtung
- sehr gute Verträglichkeit

octenidol® md Mundspüllösung

Gebrauchsfertige Lösung zur Dekontamination des Mund- und Rachenraums durch physikalische Reinigung und zur unterstützenden Wundbehandlung von Läsionen im Mundraum.



Unser Plus

- · Dekontamination des Mund- und Rachenraums
- keine Verfärbung der Zähne*
- · chlorhexidinfrei

Gebindegröße

Gebindegröße

1 Set

Karton mit 10 x 250 ml-Flasche

Gebindegröße

Karton mit 20 x 6 ml-Tuben

Art.-Nr. 70000769

* Eine kosmetische Studie mit 53 Probanden hat gezeigt, dass 94 % der Probanden nach 4-wöchiger Anwendung keine Ver-färbungen aufwiesen. Messverfahren: Vital Skala

antiMREset

Systemlösung für die 5-tägige MRE-Dekontamination.



Art.-Nr.

70000883

Unser Plus

- das antiMREset beinhaltet:
- octenisan® Waschlotion
- octenidol® md Mundspüllösung

- octenisan® md Nasengel

- desderman® pure zur Händedesinfektion - mikrozid® AF wipes zur Flächendesinfektion

- 10 Einmal-Zahnbürsten und 5 Einmal-Kämme für die 5-tägige Behandlungsdauer

- anschauliche und umfangreiche

Informationen



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



42





Unser Plus

- zur Dekontamination von Haaren und Kopfhaut durch physikalische Reinigung
- gebrauchsfertig
- frei von Parfüm- und Farbstoffen

Art.-Nr. Karton mit 24 Packungen 1 Waschhaube-Beutel 129602



Das octenisan® Set

Gibt Sicherheit. Schafft Vertrauen.




Auf 1 cm² Haut leben bis zu 10 Mio. Bakterien.

Diese Keime gehören zur Haut und schützen sie. Eine Operation durchbricht die natürliche Schutzbarriere der Haut. Dadurch können die Keime in das Innere des Körpers gelangen, wo sie nicht hingehören und Infektionen auslösen können. Für die moderne Krankenhaushygiene und das Wohl des Patienten ist es wichtig, solche Infektionen zu verhindern.

Aktuelle Studien zeigen, dass dekontaminierende Ganzkörperwaschungen vor Operationen dieses Risiko erheblich senken können. Mit der octenisan® Waschlotion kann der Patient bereits zuhause damit anfangen. Da die Keimbesiedlung in der Nase eine besondere Rolle bei Infektionen spielt, sollte zusätzlich octenisan® md Nasengel eingesetzt werden.



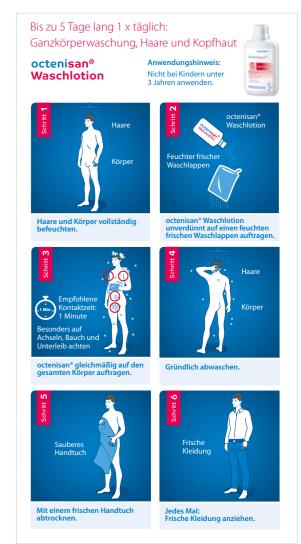



octenisan® Set

octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel zur präoperativen Dekontamination der Haut, Haare und Nasenvorhöfe.



Gebindegröße

Karton mit 10 x 1 Set

Unser Plus

- octenisan® Waschlotion und octenisan® md Nasengel zur pr\u00e4operativen Dekontamination im praktischen Set
- für eine Anwendung von bis zu 5 Tagen vor der Operation
- Gibt Sicherheit: Umfangreiche Patienteninformation für eine sichere Anwendung der Produkte und zur Erhöhung der Compliance
- Schafft Vertrauen: Für das gute Gefühl des Patienten, in besten Händen zu sein.

Mehr Infos unter: www.octenisan.de

Art.-Nr.

70000805

Pflichttexte

zu zugelassenen Arzneimitteln gem. §4 HWG

**Cusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut – und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a. Zur Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzerkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan Tinktur forte farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung "begrenzt viruzid") ein. - Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. - Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur Forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur Forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur forte farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan* Tinktur forte farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborener mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden.

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus

zung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, Gelborange S, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. • Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzerkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan® Tinktur forte gefärbt gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung "begrenzt viruzid") ein. • Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. • Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan* Tinktur Forte gefärbt abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit kodan® Tinktur Forte gefärbt desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur Forte gefärbt sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur forte gefärbt soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis

ung: 100 q Lösung enthalten : Arzneilich wirksame Bestandteile : Octenidindihydrochlorid 0,1 q, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 q. Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfett säureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. - Anw begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen - im Ano-Genitalbereich von Vägina, Vulva, Glans penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase - in der Mundhöhle. Zur zeitlich begrenzten unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden Therapie bei Pilzerkrankungen der Haut zwischen der Pilzerkrankungen der Pilzerkrankungen der Haut zwischen der Pilzerkrankungen der zenden antiseptischen Wundbehandlung. • Gegenanzeigen: octenisept* sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. • Nebenwirkungen: Selten: Brennen, Rötung, Juckreiz und Wärmegefühl, sehr selten: Kontaktallergische Reaktionen, wie z.B. vorübergehende Rötung, nicht bekannt: nach Spülung tiefer Wunden mittels Spritze wurde über das Auftreten von persistierenden Ödemen, Erythemen und auch Gewebsnekrosen berichtet, die z.T. eine chirurgische Revision erforderten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht octenisept* vorübergehend einen bitteren Geschmack. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: octenisept® nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreis lauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung von octenisept® im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

Um Gewebeschädigungen zu vermeiden, darf das Präparat nicht mittels Spritze in die Tiefe des Gewebes eingebracht werden. Das Präparat ist nur zur oberflächlichen Anwendung bestimmt (Auftragen mittels Tupfer oder Aufsprühen).

octenisent® Antisentikum vor Katheterisierung der Harnblase

etzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-[(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumyl]acetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. • Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut auch vor Katheterisierung der Harmblase. • Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept* Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase soll nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. • Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: octenisept[®] Antiseptikum vor Neberwirkungen bei sich leststellen, teilen sie diese bitte in iern Azit oder Aponeker mit. - warminweise und vorsichtsmaßnammen für die Anwendung: octenisept "Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase nicht in größeren Mengen versichlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche hijektion, gelangen lassen. Die Anwendung von octenisept "Antiseptikum vor Katheterisierung der Harnblase im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

ung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph. Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: 2-{(3-Kokosfettsäureamidopropyl)dimethylazaniumylJacetat, Natrium –D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. • Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. • Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile, octenisept[®] Wund-Desinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. • Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende With an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, Lasche). octenisept Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Die Anwendung von octenisept Wund-Desinfektion im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

46

octeniderm* farblos:
- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 30,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. - Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann octeniderm* farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. Die arzneillich wirksamen Bestandteile 1-Propanol, 2-Propanol und Octenidindihydrochlorid wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von octeniderm* farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung "begrenzt viruzid") ein. - Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneillich wirksamen Bestandteilen. - Nebenwirkungen: Bei häufiger Anwendung kann es zu Hautritrationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z.B. Kontaktekzem) sind möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Vermeidung des direkten Kontaktes von octeniderm® farblos mit Röntgenauflagen. Entzündlich. Nicht in offene Flammen sprühen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. octeniderm® farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden.


* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis

Weiteres Infomaterial:

Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüren an!



Folder Händedesinfektion Mat.-Nr. 2021

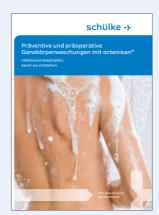

Folder Präventive und präoperative Ganzkörperwaschung mit octenisan® Mat.-Nr. 900804



Folder sensiva® – ... und Ihre Haut ist ge schützt und gepflegt für den Alltag. Mat -Nr 900892



Plan Hygienische Händedesinfektion Mat.-Nr. 236 Plan Chirurgische Händedesinfektion

Mat.-Nr. 219



Folder octeniderm® - Infektionshohem Infektionsrisiko Mat.-Nr. 2948



Folder esemtan® - ... und Patienten fühlen sich wohl in ihrer Haut. Mat -Nr 900891



Anwendungsplan desderman® pure Mat.-Nr. 2464



Anwendungsplan Händedesinfektion Mat.-Nr. 2036



Wundkompendium - Octenidin in der modernen Wundheilung. Mat -Nr 2033

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH · 22840 Norderstedt · Tel: +49 40 521 00-0 · Fax: +49 40 521 00-318



Saubere Flächen. Saubere Arbeit.

Mehr als reiner Schutz auf jeder Oberfläche.

Die Desinfektion kritischer Flächen stellt eine tägliche und entscheidende Herausforderung im Alltag medizinischer Einrichtungen dar.

In medizinischen Einrichtungen – vor allem in kritischen Bereichen – ist die tägliche und gründliche Flächendesinfektion zwingend erforderlich.

Nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen reduziert und vermeidet eine gründliche Flächendesinfektion nosokomiale Infektionen.

schülke Produkte sind in ihrer Zusammensetzung auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt. Sie werden umfassend auf ihre notwendige Wirksamkeit geprüft. Die sorgfältige Auswahl der Hilfs- und Wirkstoffe bei der Entwicklung dieser Produkte bestimmt nicht nur deren Wirksamkeit, sondern auch Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit. schülke Flächenprodukte optimieren die tägliche Desinfektion in allen Einsatzgebieten der Krankenhaushygiene.



Desinfektion und Reinigung von Hospitalflächen.

Infektionsprävention ist heute in allen medizinischen Einrichtungen dringend geboten – und sollte höchsten Anforderungen genügen, um Personal und Patienten zu schützen.

Denn: Mikroorganismen können unter Umständen auf Gegenständen mehrere Monate überleben. Kontaminationen anderer Flächen und Bereiche, z. B. durch Hände- / Hautkontakt, sind somit über lange Zeit möglich.

Um solche Übertragungsketten zu unterbinden, ist die flächendeckende, desinfizierende Reinigung unabdingbar!

Überlebensfähigkeit relevanter Erreger auf Flächen*

	Pseudomonas aeruginosa	bis zu 16 Monate						
	Escherichia coli	bis zu 16 Monate						
Bakterien	Staphylococcus aureus inkl. MRSA	bis zu 7 Monate						
bukterien	Clostridium difficile (Sporen)	bis zu 5 Monate						
	Mycobacterium tuberculosis	bis zu 4 Monate						
	Enterococcus spp. inkl. VRE und VSE	bis zu 4 Monate						
Pilze	Hefen	bis zu 4 Monate						
	Vaccinia-Virus	bis zu 5 Monate						
Vince	Adenovirus	bis zu 3 Monate						
Viren	Norovirus	bis zu 7 Tage						
	HIV / HBV	bis zu 7 Tage						

Desinfektion und Reinigung nach Risikobereichen.

Bereiche**	Ohne Patienten- behandlung Ohne Infektions- risiko	Mögliches Infektionsrisiko	Besonderes Infektionsrisiko	Patienten, die Erreger so in / an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiter- verbreitung besteht	Infektions- risiko für Personal						
Beispiele	Treppenhäuser, Flure, Verwaltung, Büros Speiseräume Unterrichtsräume techn. Bereiche	Allgemeinstationen, Ambulanzbereiche: Radiologie Physikalische Therapie Sanitärräume Dialyse Entbindung Intensivtherapie / -überwachung	OP-Abteilungen, Eingriffsräume, Einheiten für: • besondere Intensivtherapie z. B.: Langzeitbeatmete (> 24 h), Schwerstbrandverletzte • Transplantationen (z. B. KMT, Stammzellen) • Hämatom-Onkologie (z. B. Patienten unter aggressiver Chemotherapie) • Frühgeborenenstation	Isolierbereiche/-pflege: Funktionsbereiche, in denen o. g. Patienten behandelt werden	mikrobiolog. Laboratorien Pathologie Entsorgung unreine Bereiche von: - Wäschereien - Funktionseinheiten z. B. ZSVA						
schülke Empfehlung Reinigung / Desinfektion	mindestens Reinigung	reinigende Flächendesinfektion									

- * Quelle: BMC Infectious Diseases 2006; 6:130: How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review. (A. Kramer, I. Schwebke, G. Kampf)
- ** Quelle: RKI-Empfehlung Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen, Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2004, 47:51-61

schülke hat, was Keime fürchten ...



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

... hochwirksame Desinfektionsmittel für alle Flächen.

Fläc	he	Anwen- dung Darreichungs- form Listungen											Wirksamkeiten													Seite			
Feucl Schn Reini	hdesinfektion httuchspendersysteme elldesinfektion gung und Pflege ialitäten	Reinigung	Desinfektion	gebrauchsfertig	Tücher	Konzentrat	für schülke wipes	EuroNorm geprüft	YAH Desinfektionsmittel-Liste	_	RKI-Listung gem. §18 If5G (Scheuerdesinfektion) Wirkungsbereich AB	alkoholfrei	parfümfrei	Dakterizid	MRSA	EL TB	levurozid	begrenzt viruzid	불률 begrenzt viruzid PLUS	Viruzid	Polioviren	Adenoviren	Noroviren	Polyoma SV40	Rotaviren	Vacciniaviren	Sporizid	न्नि C. difficile	
	terralin® protect	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	2.0		54
	antifect® AF (N)	•	•			•	•	•	•	•				•	•		•	•	•				•		•	•			54
ktion	pursept® AF	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			54
Wischdesinfektion	antifect® extra	•	•			•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		55
Wischo	perform®	•	•			•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	55
	terralin® PAA	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	55
	Desinfektions-Reiniger AF	•	•	•		•	•		•	•		•		•	•		•	•						•	•	•			56
h- eme	schülke wipes	•	•		•		•					•	•															vegeta- tive Form	60
Feuchttuch- spendersysteme	schülke wipes safe & easy bag-in-box system	•	•		•		•					•	•																61
Feu	schülke wipes safe & easy bagless system	•	•		•		•					•	•																61
	terralin® liquid	•	•	•			•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			64
	antifect® N liquid	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			64
	pursept® A Xpress	•	•	•			•	•	•	•				•	•		•	•				•	•		•	•			64
u	mikrozid® AF liquid	•	•	•			•	•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			65
elldesinfektion	mikrozid® AF wipes Jumbo premium	•	•	•	•			•	•	•				•	•	•	•	•				•	•	•	•	•			65
relldes	mikrozid® sensitive liquid	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•		•	•					•	•	•	•			65
Schn	mikrozid® sensitive wipes Jumbo premium maxi	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•		•	•					•	•	•	•			66
	mikrozid® PAA wipes	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	66
	mikrozid® universal liquid	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			67
	mikrozid® universal wipes premium maxi	•	•	•	•			•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•			67
ung	s&m Reinigungsadditiv	•				•						•																	70
Reinigung und Pflege	s&m Pflegeadditiv	•				•						•																	70
Speziali- täten	mikrocount®	mikrocount® duo zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen. mikrocount® TPC zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl. mikrocount® TPC/E zur kombinierten Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zum Nachweis von Enterobakterien.																											

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

53



Flächendesinfektion hat Methode!

Hospitalflächen mögen's ausreichend nass!

In der Praxis hat sich die Nasswischmethode zur Desinfektion bewährt.

Bei dem 1-stufigen Nasswischverfahren wird der Boden mittels eines stark ausgepressten Mopps in einem Arbeitsgang gewischt. Da bei dieser Methode mehr Lösung aufgebracht als aufgenommen wird, besteht die Tendenz, dass sich Rückstände auf der Bodenoberfläche aufbauen. Außerdem führt die begrenzte Menge an Flüssigkeit dazu, dass die Fläche häufig nicht ausreichend benetzt wird. Eine einwandfreie Wirkung kann aber nur dann erzielt werden, wenn Fußböden und Oberflächen mit einer ausreichenden Menge der Lösung in Kontakt kommen!

Die beste Methode: Das 2-stufige Nasswischverfahren

1. Schritt

Die Flotte wird mit einem gut getränkten Mopp satt aufgetragen, wodurch anhaftende Verschmutzungen aufgeweicht und abgelöst werden. Die Wirkstoffe der Desinfektionsmittel beginnen innerhalb von 2 bis 5 Minuten ihre Wirkung zu entfalten.

2. Schritt:

Die überschüssige Flotte wird mit dem zweiten Mopp aufgenommen – und mit ihr die Keime und der noch verbliebene, angelöste Schmutz. Die Restfeuchte benötigt max. 5 Minuten um abzutrocknen.

Das 2-stufige Nasswischverfahren garantiert, dass Flächen ausreichend benetzt werden und Desinfektionsmittel ihre maximale Wirksamkeit entfalten können. Es verhindert Schichtaufbau und hat sich deshalb als Methode der Wahl durchgesetzt.

Unseren Leitfaden zur Vorgehensweise beim Nasswischverfahren können Sie in Englisch #2194, Deutsch #2176, Russisch #2195 und Türkisch #2196 kostenlos bei schülke bestellen: Tel. 040 521 00-666, online: www.schuelke.de.

Wo gewischt werden kann, sollte nicht gesprüht werden!

Wischdesinfektion ist immer gründlicher und umfassender als Sprühdesinfektion. Denn dem Sprühverfahren fehlt die mechanische Reibung des Wischverfahrens. Von Vorteil ist Sprühdesinfektion jedoch bei unebenen, verwinkelten und / oder schwer zugänglichen Flächen. Wenn möglich, sollte trotzdem ein Nachwischen erfolgen, damit eine gleichmäßige Benetzung sichergestellt ist.

Kriterien: Sprühen und Wischen

Eine Wischdesinfektion sollte immer dem Sprühen bevorzugt werden (ggf. muss hausintern entschieden werden).

Sprühen



- verwinkelte, unebene, schwer zugängliche Flächen
- ready to use (gebrauchsfertig)
- lange Haltbarkeit (Gebinde)



Wischen

- geringe, gesundheitliche Belastung (denn beim Wischen entstehen keine nachteiligen Aerosole)
- flächendeckende Desinfektion
- durch Reiben zusätzlich mechanische Entfernung von Erregern

Wischdesinfektion



ТВ

terralin® protect

Konzentrat zur aldehydfreien Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und anderen wischbaren Flächen.



Art.-Nr.

181610

181604

181612

181619

181614

181615

Unser Plus

- frei von Aldehyden und damit besonders anwenderfreundlich
- · riecht angenehm frisch und dezent
- · liefert eine hervorragende Optik
- breites mikrobiologisches Wirkspektrum gegen Bakterien (inkl. Tb, MRSA), 20 l-Kanister Hefen und Viren ("begrenzt viruzid PLUS"; Adeno-, Noro- und Rotaviren)
- besonders für geruchssensible Bereiche und empfindliche Materialien geeignet





antifect® AF (N)

Konzentrat zur aldehydfreien Desinfektion und Reinigung von



Medizinprodukten und anderen wis	chbaren Flächer
■ Unser Plus	

- frei von Aldehyden und damit besonders anwenderfreundlich gute Wirksamkeit gegen Bakterien, Hefen und Viren ("begrenzt viruzid PLUS"; Rotaviren)
- gute Reinigungs- und Schmutzlöseeigenschaften
- · angenehmer Geruch



Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 5 x 2 l-Flasche 180831 5 I-Kanister 180832

Gebindegröße

5 l-Kanister

200 I-Fass

500 I-Container

Gebindegröße

5 l-Kanister

Karton mit 5 x 2 l-Flasche

Karton mit 500 x 20 ml-Beutel

Karton mit 5 x 2 I-Flasche



pursept® AF

Reinigungsstarkes, aldehydfreies Flächenkonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und Medizinprodukten.



Art.-Nr.

230124

230125

Unser Plus

- gute mikrobizide Wirksamkeit und Reinigungskraft durch die aldehydfreie Wirkstoffkombination
- · inaktiviert Noroviren
- frischer Duft
- geeignet für empfindliche Flächen
- kein Klebeeffekt bei Einhaltung der Anwendungsempfehlung



Wischdesinfektion



antifect® extra

Hochleistungskonzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen und Medizinprodukten.



schülke -}

Unser Plus

BAKT. ZID

ТВ

VIRU ZID

SPORI ZID

- · angenehmer Geruch
 - gute Reinigungseigenschaften
- formaldehydfrei
- niedrige Anwendungskonzentration
- gute Materialverträglichkeit







perform®

Aktivsauerstoff-basiertes Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und anderen wischbaren Flächen.



Art.-Nr.

70001859

70001858

122319

Unser Plus VIRU ZID

- umfassendes mikrobiologisches Wirkungsspektrum gegenüber Bakterien Karton mit 250 x 40 g-Dosierbeutel (inkl. Tb), Pilzen, Viren ("viruzid"*) und auch Sporen
- besonders schonend zur Umwelt durch Aktivsauerstoff-basiertes Wirkstoffsystem



RKI Listed

- einfache Dosierbarkeit durch Einmal-Portionsbeutel
- RKI-gelistet für den Einsatz im Seuchenfall gem. § 18 IfSG







terralin® PAA

Aktivsauerstoff-basierte Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten.




Gebindegröße


Karton mit 60 x 40 g-Dosierbeutel

Karton mit 4 x 900 g-Dose






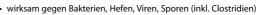

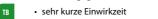





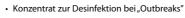





aldehydfrei



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. * gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

54

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wischdesinfektion



Desinfektions-Reiniger AF





Art.-Nr.

120701

180125

Unser Plus

- löst Schmutz, Kalk und Urinstein (sauer eingestellter pH-Wert)
- · angenehmer Geruch
- desinfizierende Wirkung bereits in 1 Minute bei konzentriertem Einsatz
- geprüfte Materialverträglichkeit mit keramischen Belägen (Säurefliesner-Vereinigung e. V.)







Gebindegröße

Kipphebelverschluss

Zubehör

Karton mit 10 x 1 I-Flasche



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wischdesinfektion – Feuchttuchspendersysteme

schülke wipes



schülke wipes safe & easy





Schnell und praktisch

schülke wipes – Tücher und Spender für die Verwendung von Desinfektionsmittellösungen / -mischungen für die schnelle Flächendesinfektion in risikoarmen Bereichen. Verschiedene Größen und Tuchmengen, individuell nach dem eigenen Bedarf auswählbar, bei einer Standzeit von i.d.R. bis zu 28 Tagen.

Sicher und einfach

schülke wipes safe & easy – diese (Einmal)-Systeme sind besonders gut in Bereichen einzusetzen, in denen das Infektionsrisiko für Patient und Personal erhöht bis sehr hoch ist. safe – weil das Kontaminationsrisiko des Systems durch nur einmalige Nutzung der Behältnisse (Eimer / Bag) signifikant minimiert werden kann.

easy - weil das Handling besonders einfach ist.

Mit schülke wipes in Risikobereichen auf höchste Sicherheit setzen! Je höher das Risiko einer Infektion für Patienten und Personal ist, desto wichtiger ist es, auf ein durchweg zuverlässiges Produkt für die Oberflächendesinfektion zu setzen. hoch Infektionsrisiko* nfektionsrisiko und Isolierbereiche Bereiche mit Infektionsrisiko für Bereiche ohne und mit möglichem nfektionsrisiko ungen an die Hygiene bei der Reini Mögliche Kontamination und die Wahrscheinlichkeit des direkten Kontaktes

Wischdesinfektion – Feuchttuchspendersysteme

Der kleine Unterschied mit großer Wirkung.

schülke wipes – Tuchspendersystem zum Wiederaufbereiten.

Für viele Bereiche universal einsetzbar.

- Die entpackte Tuchrolle direkt in den (vorher desinfizierten) Feuchttuchspender einsetzen und anschließend mit Desinfektionsmittellösung tränken und verschließen.
- Das Chargenetikett vollständig ausfüllen.
- Nach Verbrauch oder spätestens nach 28 Tagen (Ausnahme terralin® PAA: 12 Std.) den Inhalt entsorgen, den Behälter und Deckel wieder aufbereiten und für den neuen Einsatz verwenden (eine Aufbereitungsanleitung finden Sie unter www.schuelke.com).



schülke wipes safe & easy systems - sichere Einmalsysteme.

In Risokobereichen Hygienerisiken reduzieren durch einfaches und sicheres Handling mit Tuchspendersystemen, die nicht wieder aufbereitet werden. Keine Kompromisse zu Lasten des Personals oder der Patientensicherheit in Risikobereichen wie (z. B. Neonatologie).

- o safe: Im Eimer / Bag ist die Vliesrolle geschützt. Den Eimer / Bag einfach öffnen, befüllen fertig.
- 2 Das Anbruchsdatum auf der "End-Date-Plakette" markieren.
- 3 easy: Nach Verbrauch oder maximal 28 Tagen (Ausnahme terralin® PAA: 12 Std.) einfach entsorgen.

safe & easy mit dem bag-in-box system ...











Nutzen Sie das safe & easy Schulungsvideo im Internet (www.youtube.com/user/schuelkeChannel) oder scannen Sie den QR-Code ein. Mehr Informationen finden Sie unter: www.safe-and-easy.de

^{* 1.} Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vorgetränksystem für die Flächendesinfektion (2012) 2. Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil (2013)

Wischdesinfektion – Feuchttuchspendersysteme

· sicher und einfach für Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko

Spendereimer

• sicher und einfach für

Infektionsrisiko

Bereiche mit besonderem

So wenden Sie schülke wipes Feuchttuchspender richtig an:

Wischdesinfektion – Feuchttuchspendersysteme

٠	itig an:						
			Feuchttuch	spender systen	ne		
		schülke wipes mini Spendereimer (40 Tücher-System)	schülke wipes 70 Spenderbox (70 Tücher-System)	schülke wipes Spendereimer (100 /111 Tücher-System)	schülke wipes 100/111 Spenderbox (100/111 Tücher-System)	schülke wipes safe & easy bag-in-box system (111 Tücher im Bag)	schülke wipes safe & easy bagless system (130 Tücher inklusive)
		ArtNr. 119530 (VE 1 Stck.) ArtNr. 70000163 (VE 5 Stck.)	ArtNr. 119540 (VE 1 Stck.) ArtNr. 70000160 (VE 5 Stck.)	ArtNr. 119523 (VE 1 Stck.) ArtNr. 70000162 (VE 5 Stck.)	ArtNr. 119541 (VE 1 Stck.) ArtNr. 70000161 (VE 5 Stck.)	ArtNr. 119542 (VE 10 Stck.)	ArtNr. 70000034 (VE 6 Stck.)
Abl	pildung				100	Doc	C in the last of t
Bereiche		mit möglichem Risiko	mit möglichem Risiko	mit möglichem Risiko	mit möglichem Risiko	mit besonderem Risiko	mit besonderem Risiko
Einsatz		Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln in allen Bereichen von Krankenhäusern, Altenheimen, Rettungsdiensten und Arztpraxen. Aufgrund der sehr einfachen Handhabu Einmal-Feuchttuchspendersystem und schützenden Bag Dzw. Einmer sind die ewipes safe & easty die idealen Desinfekti cher für den Einsatz in Bereichen, in den besonders großes Risiko der Übertragun pathogenen Keimen besteht.			ndersystem und dem Eimer sind die schülke lealen Desinfektionstü- ereichen, in denen ein der Übertragung von		
Anwendung			System nach Ablauf / Verbrauch aufbereiten			Bag u. Schraubver- schluss nach Ablauf/ Verbrauch entsorgen	Eimer nach Ablauf/ Verbrauch entsorgen
S	schülke wipes mini 40 Tuchrolle ArtNr. 119532 (VE 10 Stck.)	40 wipes 30 x 30 cm					
nuge	schülke wipes 70 Tuchrolle ArtNr. 119505 (VE 6 Stck.)	70 wipes 28 x 23 cm	70 wipes 28 x 23 cm				
ahl vend	schülke wipes 100 Tuchrolle ArtNr. 119503 (VE 6 Stck.)			100 wipes 30 x 30 cm	100 wipes 30 x 30 cm		
Anzahl / Anwendungen	schülke wipes 111 Tuchrolle ArtNr. 119506 (VE 6 Stck.)			111 wipes 30 x 24 cm	111 wipes 30 x 24 cm		
Tücher	schülke wipes safe & easy bag ArtNr. 119544 (VE 6 Stck.)					111 wipes (im Bag) 30 x 24 cm	
ž	130 Tuchrolle im System inklusive						130 wipes (inklusive 30 x 19 cm
Tränkmenge gebrauchsfertige Desinfektionslösung/Gebrauchslösung		1,5	1,5 Liter 2 Liter gebrauchsfertige Lösung / 3 Liter Gebrauchslösung			2 Liter gebrauchs- fertige Lösung / 2,5 Liter Gebrauchs lösung	
Geeignet für gebrauchs- fertige Lösungen von*:			® N liquid • mikrozid® A alcohol EP • perform® c	F liquid • mikrozid® sen: lassic alcohol EP	sitive liquid • pursept® A	A Xpress • terralin® liqui	d • buraton® rapid
	ignet für Gebrauchs- ngen der Produkte*:	• terralin® PAA** • perf	orm® classic concentrate	ons-Reiniger AF • pursep Q-Plus • TPH protect mer Sales Service (Tel.: +49		@schuelke.com) oder Ihren	Gebietsverkaufsleiter.)

** maximale Standzeit von bis zu 12 Stunden im schülke wipes mini Spendereimer (40 Tuchrolle) mit 3 Litern Tränkmenge beachten



· schnell und praktisch

in Bereichen mit möglichem Infektionsrisiko

schülke wipes

Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln.

Unser Plus

- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- Standzeit mit angesetzter Lösung oder Gebrauchslösung: bis zu 28 Tage, z. B. terralin® protect
- flusenfrei auf der Oberfläche
- verschiedene Rollengrößen
- Medizinprodukt (CE-Kennzeichnung)



Gebindegröße

schülke wipes Feuchttuch-Spendersystem

Karton mit:	5 x Spendereimer	1 x Spendereim
schülke wipes 40	70000163	11953
schülke wipes 100/111	70000162	11952
Karton mit:	5 x Spenderboxen	1 x Spenderbo
schülke wipes 70	70000160	11954
schülke wipes 100/111	70000161	11954

Art.-Nr.

Tuchrollen


schülke wipes 40 (Karton mit 10 x 40 Tücher Tuchrollen)	119532
schülke wipes 70 (Karton mit 6 x 70 Tücher Tuchrollen)	119505
schülke wipes 100 (Karton mit 6 x 100 Tücher Tuchrollen	119503
schülke wipes 111 (Karton mit 6 x 111 Tücher Tuchrollen	119506

Zubehör

Wandhalterung Eimer schülke wipes	134430
Wandhalterung Box schülke wipes	134435

Mehr Infos unter: www.schuelke-wipes.de

schülke wipes safe & easy Innovatives Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln.

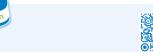

Unser Plus

- innovatives bag-in-box system für 111 Anwendungen
- keine Aufbereitung mehr notwendig
- · sehr einfache Handhabung
- Medizinprodukt (CE-Kennzeichnung)

Gebindegröße schülke wipes safe & easy bag-in-box system

Karton mit 6 x Bags mit 111 Tüchern Karton mit 10 Spenderboxen 119542

Zubehör

Wandhalterung Box schülke wipes 134435



safe – die Tücher sind im Bag sicher geschützt. Kein Kontakt der Tücher mit der Box oder den Händen. easy – den Bag und Verschluss einfach entsorgen.

schülke wipes safe & easy

Innovatives Einmal-Feuchttuchspendersystem für 130 Anwendungen zur Ausbringung von Flächendesinfektionsmitteln.



Unser Plus

- innovatives bagless system für 130 Anwendungen
- · keine Aufbereitung mehr notwendig
- sehr einfache und schnelle Handhabung
- keine Verwechslung / Neubefüllung durch Siegeletikett
- Medizinprodukt (CE-Kennzeichnung)

Gebindegröße Art.-Nr.

schülke wipes safe & easy bagless system Karton mit 6 x Eimern mit 130 Tüchern 70000034

Zubehör

oagless syste

Wandhalterung Eimer schülke wipes 134430







Einmalsystem – jetzt noch schneller:

safe – die Tücher sind im stabilen Eimer sicher geschützt. Das Siegeletikett sorgt für nur einmaligen Gebrauch des Systems.

easy – das gesamte System einfach entsorgen.

Mehr Infos unter: www.safe-and-easy.de

61

Art.-Nr.





Problem erkannt, Problem gebannt!

Professionelle Schnelldesinfektion lässt Keime nicht zu Atem kommen.

Patienten schützen, Kontaminationen verhindern.


Ein hohes Risiko der Infektionsübertragung besteht besonders bei patientennahen Flächen, die häufig mit Händen bzw. Haut in Kontakt kommen.

Pathogene Keime können Wochen oder auch Monate auf unbelebten Flächen überleben, sodass Kreuz-kontaminationen ein ständiges Risiko darstellen, wie Studien belegen*.

Nosokomiale Infektionen in medizinischen Einrichtungen haben in letzter Zeit besorgniserregend zugenommen. Flächendesinfektion ist eine der wichtigsten präventiven Maßnahmen, um Kontaminationen zu begegnen. Insbesondere von patientennahen Flächen werden verschiedenste pathogene Keime übertragen.

Für diesen patientennahen Risikobereich sind mittlerweile eine Vielzahl speziell geeigneter Flächendesinfektionsmittel wie Sprays und Desinfektionstücher entwickelt worden.

Neben Wirksamkeit und Materialverträglichkeit hat schülke dabei großen Wert auch auf die einfache Anwendung, den Geruch und ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis gelegt.

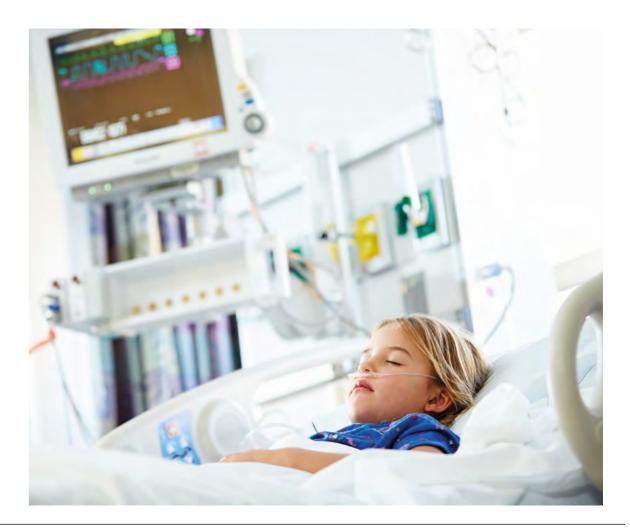

^{*} A. Kramer, I. Schwebke, G. Kampf: How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic review, BMC infect. Dis. 6 (2006) 130

Schnelldesinfektion



terralin® liquid

Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten.



- gebrauchsfertig
- · kurze Einwirkzeit
- breites mikrobiologisches Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. Tb), Pilzen, Viren ("begrenzt viruzid" inkl. HBV, HIV, HCV und Adenoviren)
- rückstandsfreie Abtrocknung









- gebrauchsfertig
- lebensmittelbereichsgerecht, farbstoff- und parfümfrei
- kurze Einwirkzeiten und umfangreiche Wirkung gegenüber Bakterien, Pilzen und behüllten Viren
- schnelle Abtrocknung





Art.-Nr.

102001

102004

134416

7uhehör

Gebindegröße

10 l-Kanister

Zubehör

Karton mit 10 x 1 l-Flasche

Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche

Zubelloi			
Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche	134411		
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche	134416		



pursept® A Xpress

Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion für Sicherheit und frischen Duft in Rekordzeit.



- umfassend mikrobiologisch wirksam
- · Hautverträglichkeit dermatologisch geprüft
- nahezu rückstandsfreie Abtrocknung





Gebindegröße	ArtNr.	
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	230131	
Karton mit 3 x 5 l-Kanister	230128	
Zubehör		
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche	134416	
Wandhalterung	134417	

Schnelldesinfektion



mikrozid® AF liquid

Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.



- schnelle, streifenfreie Abtrocknung
- · aldehydfrei
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, Hefen, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
- gute Benetzungseigenschaften



Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 10 x 250 ml-Sprühflasche	109160
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	109301
10 l-Kanister	109102
Zubehör	
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche	134416



mikrozid® AF wipes | Jumbo | premium

Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.

Mit alkoholischer Lösung getränkte Desinfektionstücher zur



Unser Plus

- schnelle rückstandsfreie Abtrocknung
- aldehydfrei
 - sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Bakterien, Hefen, begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung)
 - · mikrozid® AF wipes auch im praktischen Nachfüllbeutel erhältlich
- mikrozid® AF wipes Jumbo extra große Tücher
- mikrozid® AF wipes premium handliches Softpack-Format, premium-Tuchqualität, extra weich





Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 10 x 200 <i>Jumbo</i> -Tücher-Spenderdose	109157
Karton mit 12 x 200 <i>Jumbo</i> -Tücher-Nachfüllbeute	l 70001405
Karton mit 10 x 150 Tücher-Spenderdose	109203
Karton mit 20 x 150 Tücher-Nachfüllbeutel	109204
Karton mit 12 x 50 wipes <i>premium</i>	70000808

Zubehör

Wandhalterung	134417
Wandhalterung <i>Jumbo</i>	134421
Wandhalterung premium	913273



mikrozid® sensitive liquid

Alkoholfreies Präparat zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.



- gebrauchsfertig
- alkoholfrei und damit besonders gut geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- schnelle und gute Wirksamkeit (Bakterien, Hefen, "begrenzt viruzid"* inkl. HBV, HIV, HCV; Rotaviren)

. WES	VAH	(IH





* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. ** Für die routinemäßige Desinfektion bereits vor dem Abtrocknen der Oberfläche wirksam. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

Schnelldesinfektion



mikrozid® sensitive wipes Jumbo | premium | premium maxi

Mit alkoholfreier Lösung getränkte Desinfektionstücher zur Schnelldesinfektionstücher zur Schnelldesinfektionstelle zur Schnelldesi von Medizinprodukten und anderen Flächen.



Art.-Nr.

70000806

70000807

70001004

Unser Plus

gebrauchsfertig

VAH (HO

- · alkoholfrei und damit besonders gut geeignet für alkoholempfindliche Flächen
- · schnelle und gute Wirksamkeit (Bakterien, Hefen, begrenzt viruzid* inkl. HBV, HIV, HCV; Rotaviren)
- mikrozid® sensitive wipes Jumbo große Tücher
- mikrozid® sensitive wipes premium handliches Softpack-Format, premium-Tuchqualität, extra weich
- mikrozid® sensitive wipes premium maxi extra große Tücher, Softpack-Format, premium-Tuchqualität, extra weich, hohe Reichweite

	137
on	⊚∰
OH	

Zubehör

Gebindegröße

Wandhalterung	134417
Wandhalterung Jumbo	134421
Wandhalterung premium	913273

Karton mit 10 x 200 Jumbo-Tücher-Spenderdose 109184

Karton mit 12 x 200 Jumbo-Tücher-Nachfüllbeutel 70001404

Karton mit 10 x 120 Tücher-Spenderdose Karton mit 12 x 50 wipes *premium*

Karton mit 6 x 80 wipes premium maxi

Karton mit 6 x 100 wipes premium



mikrozid® PAA wipes

Sporizide Desinfektionstücher zur Oberflächendesinfektion auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten (z.B. TEE-Sonden, Endovaginalsonden) und anderen Flächen.



134421

Unser Plus

ТВ

- gebrauchsfertige extra große Tücher
- sehr schnelle und breite Wirksamkeit (Bakterien (inkl. TB), Pilze, Viren
- z. B. HIV, HBV, Noro und Sporen)
- freigegeben für TEE-Sonden***



Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 10 x 50 wipes-Spenderdose 128101

Zubehör

Wandhalterung Jumbo

*** Die Freigaben sind auf spezielle Produktfamilien begrenzt. Detaillierte Informationen erhalten Sie über unse Customer Sales Service Abteilung.



Einzigartig: Peressigsäure "Ready-to-use"!

Die mikrobizide Wirkung von Peressigsäure ist seit über 100 Jahren bekannt. Erst in den 1960er Jahren jedoch erlangte Peressigsäure stärkere Aufmerksamkeit, nachdem Kline und Hull die hervorragende Wirkung bei Viren nachwiesen. Heute erfährt die Peressigsäure erneut eine Renaissance: Entscheidend dafür sind die kurze Einwirkzeit und die sichere Desinfektionsleistung, sogar bei Sporen des Erregers Clostridium difficile.

Ideal für Risikobereiche. Eigenschaften, die Produkte auf Peressigsäurebasis zum idealen Desinfektionsmittel vor allem für Risikobereiche machen. Dies zeigt sich auch an der Empfehlung des Robert Koch-Instituts, das Peressigsäure für die Desinfektion von Hochrisikobereichen empfiehlt.1

schülke – der Peressigsäure-Experte. Mit den mikrozid® PAA wipes ist es schülke erstmals gelungen, Peressigsäure in der Anwendungsform eines Ready-to-use Tuches zur Verfügung zu stellen. Im Vergleich mit anderen Ready-touse Tüchern ist die Einwirkzeit der mikrozid® PAA wipes stark verkürzt.

* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

Die neuen mikrozid® universal-Produkte. Einmalig vielseitig.

mikrozio. Gering alkoholische Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen.

Besonders geeignet für:

- Mobiltelefone Tastaturen
- Touchscreens
- Kunstleder
- Displays
- Möbeloberflächen

Sehr gute Materialverträglichkeit.

Die mikrozid® universal-Produkte sind besonders für die Reinigung und Desinfektion patientennaher Flächen geeignet.

Ein spezielles Tensidgemisch ermöglicht eine hervorragende Materialverträglichkeit. Deshalb können nun problemlos Tablets und Smartphones im Beruf wie im Alltag gereinigt und desinfiziert werden.

Zusätzlich haben Tests aus dem Hause schülke gezeigt, dass die Reinigungsleistung deutlich höher ist als bei vergleichbaren Produkten.



Dermatologisch getestet.

Wenn es einmal schnell gehen muss, können die mikrozid® universal-Produkte auch ohne Handschuhe benutzt werden (sofern Ihr Arbeitsschutz dies zulässt). Durch die gering alkoholbasierte Wirkstoffkombination ist dieses Produkt gut hautverträglich. Dies wurde durch ein unabhängiges Prüflabor bestätigt.



Schnelle Wirkung.

In Ihrem Arbeitsfeld ist eine schnelle Desinfektion mit breiter Wirksamkeit unerlässlich? Dann nutzen Sie die schnelle Wirksamkeit der mikrozid® universal-Produkte, z. B.:

- begrenzt viruzid 15 Sek.
- · Noro 30 Sek.



mikrozid® universal liquid | wipes premium | premium maxi

Gering alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.



- breit wirksam innerhalb kürzester Zeit (Noro in 30 Sek.)
- besonders materialschonend
- · hervorragende Reinigungsleistung
- gebrauchsfertig
- mikrozid[®] universal wipes premium handliches Softpack-Format premium-Tuchqualität, extra weich
- mikrozid[®] universal wipes premium maxi extra große Tücher, Softpack-Format, premium-Tuchqualität, extra weich, hohe Reichweite



Gebindegröße	ArtNr
Karton mit 10 x 1 I-Sprühflasche	70000998
5 l-Kanister	70000997
Karton mit 6 x 100 wipes <i>premium</i>	70000038
Karton mit 6 x 80 wipes <i>premium maxi</i>	70001061
Zubehör	
Wandhalterung <i>premium</i>	913273

Wandhalterung premium maxi



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

* Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zuli

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Schnelldesinfektion

mikrozid® wipes – Schnellübersicht zur Schnelldesinfektion. Sicherheit auf allen Flächen.

Für eine wirksame Strategie zur Bekämpfung pathogener Keime auf Flächen bedarf es einer sorgfältig überlegten Produktauswahl. schülke möchte Sie bei dieser Auswahl unterstützen und bietet mit seinem klaren Schnelldesinfektionskonzept eine Vorauswahl an geeigneten Produkten. Diese sind optimal aufeinander abgestimmt und lassen innerhalb eines Multi-Barrierensystems keine Lücke offen.

mikrozid® AF wipes

Der Klassiker unter den Schnelldesinfektionspräparaten. Die alkoholhaltigen Tücher wirken innerhalb von 1 Minute gegen eine Vielzahl der relvanten Keime. Der Alkoholfilm trocknet sehr schnell und rückstandsfrei ab. Die Materialverträglichkeit ist gut, jedoch kann es bei Kunststoffen zu Spannungsrissen kommen.



/irkstoff: Ethanol, Propan-1-ol

mikrozid® sensitive wipes

Der Spezialist für empfindliche Oberflächen. Im Krankenhaus gibt es viele empfindliche Materialien, deshalb vereinen die mikrozid® sensitive wipes eine gute Wirksamkeit mit einer herausragenden Materialverträglichkeit. Selbst Ultraschallköpfe* können mit den mikrozid® sensitive wipes desinfiziert werden.



mikrozid® universal wipes

Der Vielfältige – auch zur Desinfektion von empfindlichen Kommunikationsgeräten. Smartphones und Tablets gehören zu den häufigen Handkontaktflächen. Mit den mikrozid® universal wipes können diese sicher aufbereitet werden, ohne dabei den Materialien zu schaden.

	HASE HASE SAKT. 200 TB	SSERIE LANGE OF THE PARTY OF TH	SERF CHILDREN SERVICE	O STATE OF THE PARTY OF THE PAR	DE MAN GEREN
mikrozid® universal wipes	ArtNr.	Tuchgröße	Anzahl Tücher	Grammatur	Reichweite
Softpack premium	7000038 (VE 6 Stck.)	20 x 20 cm	100	50 g/m ²	Ø 1,0 m ²
Softpack premium maxi	70001061	25 x 25 cm	80	50 g/m ²	Ø 1,5 m ²

Wirkstoff: Ethanol / Propan-2-ol

mikrozid® PAA wipes

Der Kraftprotz für den Ausbruchsfall. Mit der einmaligen oxidierenden Kraft der Peressigsäure wirken die mikrozid® PAA wipes sporizid und damit auch gegen *C. difficile* in nur 5 Minuten.

->0		VIRU PARTUR NORO BANT. 21D SPORI TB	1880 **	GET GLOW HE SO	S OF THE RESTANDA
mikrozid® PAA wipes	ArtNr.	Tuchgröße	Anzahl Tücher	Grammatur	Reichweite
Jumbo Dose	128101 (VE 10 Stck.)	20 x 30 cm	50	40 g/m ²	Ø 3,5 m ²
	Wirkstoff: Porossiasäu	·0			

Wirkstoff: Peressigsäure

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

mikrozid® -

eine starke Marke.

Reinigung und Pflege



s&m Reinigungsadditiv

Qualitativ hochwertiger Unterhaltsreiniger zur intensiven Reinigung.



Art.-Nr.

107202

Unser Plus

- gutes Schmutzlösevermögen, entfernt auch Desinfektionsmittelrückstände
- mischbar mit schülke Desinfektionsmitteln; Desinfektionswirkung bleibt erhalten
- reduziert das Wiederanhaften von Schmutz auf Bodenflächen



GebindegrößeArt.-Nr.Karton mit 5 x 2 I-Flasche1172015 I-Kanister117203

Gebindegröße

Karton mit 5 x 2 l-Flasche



s&m Pflegeadditiv

Qualitativ hochwertiges Spezialprodukt zur intensiven Reinigung und Pflege.



- hinterlässt auf behandelten Böden einen besonderen Glanzund Pflegefilm
- $\bullet \ \ entfernt \ Desinfektions mittelr\"{u}ck st\"{a}nde$
- geprüfte Abmischbarkeit mit schülke Desinfektionsmitteln
- reduziert das Anhaften von Schmutz auf Bodenflächen

Spezialitäten



mikrocount®

Keimindikatoren zur Überwachung des Umgebungs- und Betriebshygienestatus von Oberflächen und Flüssigkeiten.



schülke -}

Unser Plus

- einfach in der Anwendung
- keine Vorbereitungszeit
- Untersuchung von Oberflächen, halbfesten Materialien und Flüssigkeiten mit nur einem Produkt
- teure Laborausstattung wird nicht benötigt
- Ergebnisse innerhalb von 24 72 Stunden

Gebindegröße

Art.-Nr.

Box mit 20 x mikrocount® duo70000724Box mit 20 x mikrocount® TPC182812Box mit 20 x mikrocount® TPC/E182811

Zubehör

cultura® Brutschrank 230 Volt 183301 cultura® Brutschrank 110 Volt 183302











- zur Bebrütung von mikrocount® Keimindikatorenproben empfehlen wir den Kleinbrutschrank cultura®
- der cultura® Brutschrank bietet
 Platz für bis zu 18 mikrocount®
 Keimindikatoren
- die Auswertung wird durch Vergleich mit einem Auswertungstableau vereinfacht

Weitere Informationen finden Sie unter www.mikrocount.de

Weiteres Infomaterial:



The state of the s

schülke -

Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüren an!

Flyer Aufbereitung TEE-Sonden mikrozid® PAA wipes Mat.-Nr. 2729



Protokollbuch mikrozid® PAA wipes Mat.-Nr. 2799

Weiteres Infomaterial:

Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüren an!



Folder schülke wipes safe & easy Mat.-Nr. 2929



Anwendungsplan schülke wipes "Befüllung unter hygienischen Bedingungen" – Mat.-Nr. 2257

Anwendungsplan schülke wipes -FR- (nur als PDF) Mat.-Nr. 2100

Anwendungsplan schülke wipes -INT- (nur als PDF) Mat.-Nr. 2099



Flyer schülke wipes safe & easy bag-in-box system Befüllung – Mat.-Nr. 2816



Flyer Wischleitfaden Mat.-Nr. 2176 (deutsch) 2194 (engl.)

2176 (deutsch) 2194 (engl.) 2195 (russich) 2196 (türkisch)



Flyer schülke wipes safe & easy bagless system Befüllung – Mat.-Nr. 900825



Dokumentation Bodenbeläge Mat.-Nr. 2275



Folder mikrocount® Keimindikatoren Mat.-Nr. 900792





Mehr Sicherheit durch Reinraum-Bedingungen.

Reinigung und Desinfektion für herstellende Apotheken.

Sterile Desinfektions- und Reinigungsmittel für sterile Produktionsumgebung: Laut EU-GMP-Leitfaden, Anhang 1 müssen Desinfektionsmittel, die in den Reinraumklassen A und B eingesetzt werden, vor dem Gebrauch steril sein.

Dies hat weitreichende Konsequenzen:

Reinräume sind Produktionsräume, in denen unter besonderen hygienischen Anforderungen produziert wird. Seit Änderung der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) am 12. Juni 2012 müssen nach §35 Arzneimittel zur parenteralen Anwendung entsprechend der Definition des EU-GMP-Leitfadens, Anhang 1 hergestellt werden. Für die unterschiedlichen Reinraumklassen gibt es verschieden hohe Sicherheitsstandards. Diese Klassen unterscheiden sich in ihrem Schleusensystems zur Ein- und Ausschleusung von Mitarbeitern bzw. Material sowie in den zulässigen Keimzahlen für die Raumluft.

Empfohlene Grenzwerte für die mikrobiologische Kontamination (a)										
Klasse	Luftprobe KBE / m³	Sedimentationsplatten (Durchmesser 90 mm) KBE / 4 Stunden (b)	Kontaktplatten (Durchmesser 55 mm) KBE / Platte	Handschuhabdruck 5 Finger KBE / Handschuh						
Α	< 1	< 1	< 1	< 1						
В	10	5	5	5						
С	100	50	25	-						
D	200	100	50	_						

(a) Hierbei handelt es sich um Durchschnittswerte. (b) Einzelne Sedimentationsplatten können weniger als 4 Stunden exponiert werden. Quelle: Anhang 1 zum EG-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis

Mit den Produkten der Linie perform® sterile bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Auswahl an sterilen Produkten für den Reinraum. Alle Produkte entsprechen den höchsten Anforderungen, um in Sicherheitswerkbänken und Produktionsbereichen der Apotheke eingesetzt zu werden.

Die perform® sterile-Linie bietet sterile Desinfektionsmittel unterschiedlicher Darreichungsformen. Die verwendeten Wirkstoffe entsprechen der EU-Biozidprodukterichtlinie und besitzen ein breites Wirkungsspektrum.

Für weitere Informationen zum Thema Reinraum wenden Sie sich bitte an den Außendienst oder besuchen Sie den schuelke Channel auf YouTube: Je nach Anforderung finden Sie in der perform° sterile-Range von schülke das passende Produkt zur Reinigung und Desinfektion Ihrer Reinräume. Die Klassifizierung von Reinräumen richtet sich nach der Partikelkonzentration in der Raumluft. Die beiden gängigsten Klassifizierungen sind die nach EU-GMP-Leitfaden, Annex 1 und nach der DIN EN-ISO 14644-1.





 \downarrow 7

... sterile Produkte für alle Apothekenflächen.

Ster	ile Produkte	Anwe	ndung		Da	rreichu	ngsfor	m						V	/irksar	nkeite	en					Seite
		Desinfektion	Reinigung	Format	Auch als nicht sterile Variante erhältlich	Größen	gebrauchsfertig	Konzentrat	Tücher	EuroNorm geprüft	(哥) IHO Viruzidie-Liste	병흙 bakterizid EN 1276 (NB)	Bakterizid EN 13697 (NB)	fungizid 13697 (NB)	fungizid 1650 (NB)	levurozid EN 13697 (NB)	levurozid EN 1650 (NB)	sporizid EN 13697	sporizid EN 13704	B를 begrenzt viruzid BVDV (DVV/RKI)	B을 begrenzt viruzid Vaccinia (DVV/RKI)	
infektion	perform® sterile alcohol EP	•		steril	•	500 ml	•			•	•	1 Min.	1 Min.	2 Min.	2 Min.	1 Min.	1 Min.			1 Min.	1 Min.	7
Alkoholische Schnelldesinfektion	perform® sterile alcohol IPA	•		steril	•	500 ml, 1 l, 500 ml WFI	•			•	•	1 Min.	1 Min.			1 Min.	1 Min.			30 Sek.	30 Sek.	7:
Alkoholisc	perform® sterile wipes IPA	•		steril		20 Stck	•		•	•	•	1 Min.	1 Min.			1 Min.	1 Min.			30 Sek.	30 Sek.	7
tion	perform® sterile PAA	•		steril		500 ml, bald in 300 ml	•			•	•	5 Min.	5 Min.	5 Min.	5 Min.			5 Min.	5 Min.	1 Min.	30 Sek.	7
Sporizide Desinfektion	perform® sterile concentrate PAA	•		steril	•	40 ml		•		•	•	5 Min. 0,25 %	5 Min. 0,25 %	1 Std. 2 %	1 Std. 2 %	1 Std. 2 %	1 Std. 2 %	5 Min. 1 %		10 Min. 0,5 %	10 Min. 0,5 %	7
Spori	perform® sterile concentrate OXY	•		steril	•	40 g		•		•	•	5 Min. 0,5 %	5 Min. 1 %	1 Std. 1,5 %	1 Std. 1,5 %			2 Std. 1 %		5 Min. 0,5 %	5 Min. 0,5 %	7
nfektion nigung	perform® sterile concentrate Q2	•		steril		60 ml		•		•	•	5 Min. 0,5 %	15 Min. 1,5 %			2 Std. 1 %	2 Std. 1 %			5 Min. 1 %	5 Min. 1,5 %	8
Basisdesinfektion und Reinigung	perform® sterile cleaner ND		•	steril		500 ml	•															80
cher	perform® sterile dry wipes	•	•	steril		10 Stück			•													8
Trockene, sterile Tücher	perform® sterile premium dry wipes	•	•	steril		100 Stück			•													8
Trock	perform® sterile mix dry wipes	•	•	steril	•	100 Stück			•													8
Raum- lekonta- nination	schülke Decon Service																					15

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

schülke hat, was Keime fürchten ...

Alkoholische Schnelldesinfektion perform® sterile alcohol EP	
Alkoholische Schnelldesinfektion perform® sterile alcohol IPA Alkoholische Schnelldesinfektion perform® sterile wipes IPA	
Sporizide Desinfektion perform® sterile PAA	

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alkoholische Schnelldesinfektion



perform® sterile alcohol EP

Sterile, alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen.



- schnell und rückstandsfrei
- γ-bestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)
- · gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml-Sprühsystem
- farbstoff- und parfümfrei
- bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- · doppelt umverpackt





Unser Plus

- schnell und rückstandsfrei
- γ-bestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)

zur Desinfektion von Flächen.

- gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml- oder 1l-Sprühsystem
- farbstoff- und parfümfrei
- bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- wahlweise mit / ohne WFI
- doppelt umverpackt



Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 10 x 500 ml-Flasche 136406 Karton mit 6 x 1 l-Flasche 136408 WFI-Variante: Karton mit 10 x 500 ml-Flasche 121101 Zubehör 693540 perform® spray bottle holder perform® spray bottle holder-Platte 693541

Gebindegröße

Zubehör

Karton mit 10 x 500 ml-Flasche

perform® spray bottle holder

perform® spray bottle holder-Platte

Art.-Nr.

121802

693540

693541



perform® sterile wipes IPA

Sterile gebrauchsfertige Tücher mit 70 % v/v IPA zur Desinfektion von Flächen. 55 % Zellulose / 45 % Polyester.



· 20 Tücher im Softpack

Unser Plus

- partikelarm, geeignet für Reinraumklasse A/B / ISO Klasse 5
- γ-bestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)
- farbstoff- und parfümfrei
- bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- · doppelt umverpackt



Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 20 x 20 Tücher Softpack 121103

Sporizide Desinfektion



perform® sterile PAA

Sterile Gebrauchslösung auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Flächen.



- sporizid und schnell
- aseptisch im Reinraum A/B abgefüllt und keimfiltriert (0,2µm)
- · gebrauchsfertig im handlichen, sterilen 500 ml-Sprühsystem
- · farbstoff- und parfümfrei
- bakterizid, fungizid, sporizid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- doppelt umverpackt



Gebindegröße

schülke -}

Karton mit 10 x 500 ml-Flasche mit Sprühkopf 100081 (Flaschen sind einzeln doppelt umverpackt)

Karton mit 10 x 300 ml-Flasche (zum kombinierten Einsatz mit perform® sterile dry wipes; jeweils 5 Flaschen sind doppelt umverpackt)

Zubehör

perform® spray bottle holder	693540
perform® spray bottle holder-Platte	693541
perform® sterile dry wipes	100082



perform® sterile concentrate PAA

Steriles, flüssiges Konzentrat auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Flächen.



Art.-Nr.

Unser Plus

- sporizid und schnell
- aseptisch abgefüllt und keimfiltriert (0,2μm)
- in der praktischen 40 ml-Portionsflasche
- · farbstoff- und parfümfrei
- bakterizid, fungizid, sporizid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- doppelt umverpackt



Gebindegröße

Gebindegröße

Karton mit 50 x 40 g-Beuteln

(jeweils 5 Beutel doppelt umverpackt)

Karton mit 20 x 40 ml-Flaschen

(Flaschen sind einzeln doppelt umverpackt) 100071



perform[®] sterile concentrate OXY

Steriles, pulverförmiges Konzentrat auf Basis von Aktivsauerstoff zur Desinfektion von Flächen.



Art.-Nr.

122351

Unser Plus

- · sporizid und materialverträglich
- im praktischen 40 g-Portionsbeutel
- bakterizid, fungizid, sporizid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- · doppelt umverpackt



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Basisdesinfektion und Reinigung



perform® sterile concentrate Q2

Steriles, flüssiges Konzentrat auf Basis einer Kombination quartärer Ammoniumverbindungen und Aminderivaten zur Desinfektion und Reinigung von Flächen.



Unser Plus

- Desinfektion und Reinigung in einem Schritt
- γ-bestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)
- · alkalisch eingestellter pH-Wert
- bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (BVDV, Vaccinia)
- rückstandsfrei abspülbar
- farbstoff- und parfümfrei
- · doppelt umverpackt



Gebindegröße

Art.-Nr.

Karton mit 20 x 60 ml-Flaschen

(jeweils 5 Flaschen doppelt umverpackt) 70000031



perform® sterile cleaner ND

Sterile gebrauchsfertige Lösung auf Basis von nichtionischen Tensiden zur Reinigung von Flächen.



Unser Plus

- gebrauchsfertig
- γ-bestrahlt und keimfiltriert (0,2 μm)
- im handlichen, sterilen 500 ml-Sprühsystem
- · farbstoff- und parfümfrei
- · hervorragende Reinigungsleistung
- doppelt umverpackt
- bag-in-bottle-System, getestet auf Anbruchsterilität über gesamte Haltbarkeit

Gebindegröße

Art.-Nr. Karton mit 10 x 500 ml-Flasche 182002

Zubehör

perform® spray bottle holder	69354
perform® spray bottle holder-Platte	69354

perform®spray bottle holder

-> Seite 118



Wandhalterung perform® spray bottle holder

Sprühflaschenhalter geeignet für die Reinraumklassen A/B

- kompatibel mit allen Produkten mit Sprühkopf der perform®-Linie
- vollständig autoklavierbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- einfache Montage

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Trockene, sterile Tücher



perform® sterile dry wipes

Sterile trockene Tücher. 100 % Polyester.



Art.-Nr.

100082

Art.-Nr.

100083

Unser Plus

- partikelarme sterile γ-bestrahlte Tücher
- geeignet für Reinraumklasse A/B
- · zum flexiblen Gebrauch für alle perform®-Produkte
- doppelt umverpackt im praktischen wiederverschließbaren 10er Softpack



Gebindegröße

Karton mit 3 x 100 Tücher

Karton mit 10 x 10 Tücher Softpack

Gebindegröße

perform® sterile premium dry wipes

Sterile trockene Tücher. 100 % Polyester.



- partikelarme sterile γ-bestrahlte Tücher
- geeignet für Reinraumklasse A/B
- zum flexiblen Gebrauch für alle perform®-Produkte
- 100 Tücher (10 x 10 Tücher) dreifach umverpackt





- geeignet für Reinraumklasse A/B
- zum flexiblen Gebrauch für alle perform®-Produkte (außer Q2)
- 100 Tücher (5 x 20 Tücher) dreifach umverpackt

Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 5 x 100 Tücher	100085

Produkt	perform® sterile wipes IPA	perform® sterile dry wipes	perform® sterile premium dry wipes	perform® sterile mix dry wipes
Abbildung	IPA.	1	-	
ArtNr.	121103 (VE 20 Stck.)	100082 (VE 10 Stck.)	100083 (VE 3 Stck.)	100085 (VE 5 Stck.)
Wirkstoffe	Isopropanol	keine (trockene Tücher)	keine (trockene Tücher)	keine (trockene Tücher)
Tuchmaterial	55 % Zellulose / 45 % Polyester	100 % Polyester	100 % Polyester	55 % Zellulose / 45 % Polyeste
Tuchgröße	23 x 23 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
Anzahl Tücher	20	10	100	100
Parfümstoffe	nein	nein	nein	nein
steril (γ-bestrahlt)	ja	ja	ja	ja
Grammatur	68 g/m²	130 g/m ²	130 g/m ²	68 g/m²
Haltbarkeit	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Beutel öffnen und Tücher vortränken

6 Tücher sind nach 5 Minuten

Sterile sporizide Tücher – einfach selbstgemacht, einfach effektiv.

Sporizide Desinfektion – ein Muss im Reinraum.

Die sporizide Desinfektion in Reinräumen ist von besonderer Bedeutung und regulatorisch festgehalten:

Annex 1 EU-GMP-Leitfaden:

"61 ... Where disinfectants are used, more than one type should be employed. Monitoring should be undertaken regularly in order to detect the development of resistant strains."

(Pharmaceutical Inspection Convention Scheme):

"9.4.2 Sporicidal agents should be used wherever possible but particularly [...] in aseptic areas"

Sporizide Wirkstoffe – ein komplexes Thema

Sporizide oxidative Wirkstoffe bergen unterschiedliche Herausforderungen im Einsatz. Oftmals ist die Materialkompatibilität problematisch und auch die Exposition ist für den Anwender kritisch.

Selbst die Herstellung von sterilen Desinfektionsmitteln mit solchen oxidativen Wirkstoffen ist kompliziert, da diese in der Regel nicht durch gamma-Bestrahlung sterilisiert werden können.

Auch die Stabilität solcher Wirkstoffe in Kombination mit Tüchern kann ein Problem darstellen. So sind vorgetränkte Desinfektionstücher mit oxidativen Wirkstoffen wie Peressigsäure nur schwer zu stabilisieren, da sich diese Wirkstoffe üblicherweise durch Reaktion mit dem Tuchmaterial zersetzen.

Warum Peressigsäure und warum Tücher?

Peressigsäure zeichnet sich in erster Linie durch seine sehr breite und schnelle Wirksamkeit aus - selbst gegen extrem widerstandsfähige Sporen. Zudem ist Peressigsäure auch bei niedrigen Einsatzkonzentrationen und Temperaturen gut wirksam. Der Wirkstoff ist biologisch abbaubar und hinterlässt nahezu keine Rückstände auf den behandelten Oberflächen. Das Wischen von Oberflächen zeichnet sich gegenüber dem Sprühen durch mehrere Vorteile aus: Gleichmäßigere und bessere Oberflächenbenetzung, zusätzliche mechanische Wirkung neben der chemischen Wirkung des Desinfektiosmittels, bessere Reproduzierbarkeit der Anwendung, geringere Aerosol-Bildung als beim Sprühen sowie Entfernung von Schmutz und Keimen durch Aufnahme durch das Tuch.

schülke empfiehlt daher: Wo gewischt werden kann, sollte nicht gesprüht werden.



Sterile Tücher selbst gemacht: perform® sterile PAA mit den trockenen Tüchern perform® sterile dry wipes kombiniert.

Sterile sporizide Tücher

Trotz der bekannten Problematiken oxidativer Wirkstoffe bezüglich der Bestrahlbarkeit und der Kombination mit Tüchern bietet schülke sterile sporizide Tücher für den Reinraum an.

Hierbei wird die gebrauchsfertige Peressigsäure-Lösung perform® sterile PAA mit den trockenen Tüchern perform® sterile dry wipes kombiniert. Das Desinfektionsmittel wird nach Einschleusen in den Reinraum in das Softpack zu den Tüchern gegeben. Die Tücher im Softpack werden gleichmäßig getränkt und sind 24 Stunden stabil.

schülke hat es auch geschafft, die gebrauchsfertige Peressigsäurelösung perform® sterile PAA ohne Verlust der Wirksamkeit durch gamma-Bestrahlung zu sterilisieren. Dieses Verfahren ist patentiert.

Sie können entsprechend Ihrer Bedürfnissen beide Produkte kombinieren und sich direkt im Reinraum sterile sporizide Tücher ansetzen. Die Einsatzmenge der Desinfektionsmittellösung ist exakt auf die Tücher abgestimmt – dies zeigt der erfolgreiche 4-Felder-Test (EN16615), wonach die Kombination nach einer Einwirkzeit von 2 Minuten wirksam ist. Nach 5 Minuten Einwirkzeit ist das Produkt sporizid wirksam (EN 13697).

■ Eine einfache, sichere und vor allem hoch wirksame Desinfektion in Ihrem Reinraum!

perform® sterile dry wipes

sporizide Wirksamkeit nach 5 Minuten (EN 13697) perform® sterile PAA

Anleitung zur Herstellung von sterilen Tüchern mit perform® sterile

Flasche und Beutel einschleusen

PAA und den trockenen Tüchern perform® sterile dry wipes

(5 Flaschen sind zusammen doppelt umverpackt) auch in der gewohnten 500 ml-Sprühflasche verfügbar

Artikel | Gebindegröße Art.-Nr.

Karton mit 10 x 10 Tücher Beute 100082

Karton mit 10 x 300 ml-Flaschen 70000331



Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüren an!

Unser Plus

individuelle Anwendungslösung

4-Felder-Test (EN16615) nach 2 Minuten

weniger Aerosolbildung durch Wischen

Sterile Tücher selbst herstellen –

Flasche und Beutel doppelt umverpackt

Beutel verschließen und beschriften

so geht's:



Katalog Mat.-Nr. 2963

schülke Decon Service



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gut geschützt durch eine sichere Aufbereitung!

Hygiene ist das wichtigste Instrument.

Sicher. Sauber. schülke.

Die sichere und hygienisch einwandfreie Aufbereitung von Instrumenten verlangt nach effizienten und hochwirksamen Formulierungen, die auf alle Herausforderungen des Klinikalltags abgestimmt sind.

Die zunehmende Komplexität und Materialvielfalt medizinischer Instrumente stellt immer höhere Anforderungen an die Aufbereitungsprozesse. Kurze Einwirkzeiten und geringe Anwendungskonzentrationen sind im Klinikalltag unersetzlich. Nur so können reibungslose und schnelle Arbeitsabläufe sichergestellt werden. Neben einer guten Reinigungsleistung und einem breiten antimikrobiellen Wirkspektrum spielt auch die Materialverträglichkeit eine immer wichtigere Rolle.

Zunehmende Resistenzen und internationale Sicherheitsstandards machen es notwendig, immer wieder neue, innovative Formulierungen zu entwickeln. Durch diese fortlaufende Entwicklung stellt schülke die Anwender- und Patientensicherheit bei der manuellen und maschinellen Instrumentenaufbereitung sicher.

Die gesamte schülke Produktpalette ist umfassend geprüft und auf die gesetzlichen Anforderungen abgestimmt. Alle Produkte unseres Hauses sind nach dem neuesten Stand der Wissenschaft entwickelt.



 \downarrow

schülke hat, was Keime fürchten ...





... Reinigung und Desinfektion für die manuelle und maschinelle Aufbereitung.

Inst	rumente		Anv	vend	ung	Lis	stung	en							Wi	rksan	nkeite	en							Seite
Man	auelle		Reinigung	Desinfektion	Pflege / Instandhaltung	VAH Desinfektions- mittel-Liste	IHO Viruzidie-Liste	EuroNorm geprüft	bakterizid	tuberkulozid	mykobakterizid	levurozid	fungizid	begrenzt viruzid	viruzid behüllte und unbehüllte Vien	Polioviren	Adenoviren	Noroviren	Polyoma SV40	Rotaviren	Papillomavirus	Clostridium difficile	sporizid	im Ultraschallbad	
Instr	rumentenaufbereitung					WH	(10)	URGO	BAKT. ZID	ТВ					VIRU ZID							C. DIFF	SPORI ZID		
	gigazyme® X•tra	**	•						•			•		•										•	92
<u>ē</u>	gigazyme®	***	•																					•	92
Reinigung	mucadont® zymaktiv		•																					•	92
Se.	edisonite® classic		•																					•	93
	edisonite® super		•																					•	93
_	gigasept® instru AF		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•			•		•	•				•	93
Reinigende Desinfektion	gigasept® AF		•	•		•	•		•			•		•										•	94
esinig esinfe	gigasept® AF forte		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•			•		•					•	94
- A	mucocit® T		•	•		•	•		•	•	•	•		•			•		•	•				•	94
_	gigasept® pearls	> 0	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	95
Abschluss- desinfektion	gigasept® PAA concentrate	(Q.)		•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		95
Absch esinfe	gigasept® FF (neu)			•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		96
7 0	mucadont® IS			•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•				96
Pflege	mucadont® fluid				•																				96

Inst	trumente		Anwe	ndung			Einsatz	bereich		Seite
Mas	cchinelle rumentenaufbereitung	Reinigung	Desinfektion	Neutralisation	Klarspüler	Medizinische Instrumente	Endoskope (thermolabile Medizinprodukte)	Bettgestelle	Steckbecken	
	thermosept® X•tra	•				•				100
	thermosept® alka clean forte	•				•				100
püler	thermosept® RKF	•				•				101
Klars	thermosept® NKZ			•		•				101
ion	thermosept® NKP			•		•				101
ralisat	thermosept® BSK				•	•		•		102
Neut	thermosept® NDR	•	•					•		102
tion	mucapur® MP (Pulver)	•				•				102
sinfek	thermosept® EndoCleaner	•					•			105
Des	thermosept® ER	•					•			105
Reinigung Desinfektion Neutralisation Klarspüler	thermosept® ED		•				•			105
Reini	thermosept® PAA		•				•			106
	thermosept® SKS				•				•	107
	mucapur® RS	•							•	107

Weitere Anwendungsempfehlungen und Wirksamkeiten entnehmen Sie bitte den produktspezifischen Unterlagen, www.schuelke.cc

schülke -1-

Sicherheit ist erste Hygienepflicht. Klinisch reine Anwendungen in allen Bereichen.

Einstufung der Medizinprodukte*

Einstufung	Nutzung	betrifft	Aufbereitung			
Unkritische Medizinprodukte	Berührung nur mit intakter Haut	z. B. Stethoskop, EKG-Elektroden	Reinigung und Desinfektion**			
Semikritische Medizinprodukte (Risikogruppe A)	Berührung mit Schleimhaut					
Semikritische Medizinprodukte (Risikogruppe B)	oder krankhaft veränderter Haut sowie Einsatz in nicht sterilen Körperhöhlen. Medizinprodukte mit erhöh Anforderungen an die Auft reitung, z. B. flexible Endosko Zusatzinstrumente		Reinigung und eine viruzide manuelle, aber bevorzugt maschinelle Desinfektion**			
Kritische Medizinprodukte (kritisch A)	Durchdringung der Haut /	z. B. Wundhaken, Roux-Haken, Lidhäkchen				
Kritische Medizinprodukte (kritisch B)	Schleimhaut; Penetration von Gewebe;	z. B. Endoskope, Zusatz- instrumente, Biopsiezangen	Reinigung und Desinfektion sowie zusätzliche Sterilisation**			
Kritische Medizinprodukte (kritisch C)	Einsatz in sterilen Körperhöhlen, in denen Kontakt mit Blut, innerem Gewebe oder Organen besteht	z.B. thermolabile Katheter	Reinigung und Desinfektion sowie zusätzliche Sterilisation** (es bedarf einer zusätzlichen Zertifizie- rung des Qualitätsmanagementsystems durch eine von der zuständigen Behör- de akkreditierten Stelle)			

Zur Vermeidung von Kontamination, zum Schutz von Personal und Patient.

Mit der aktuellen Fassung der KRINKO/BfArM-Empfehlung Stand 10/2012 "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" gewinnt sowohl die effiziente Reinigung von Instrumenten sowie der Personalschutz bei der Aufbereitung weiter an Bedeutung!

Die Anforderungen an das Reinigungsvermögen und die Sicherheit für das Personal sind gestiegen. Als Reaktion darauf wurden in der schülke Forschung neue Produktgenerationen entwickelt. Diese neuartigen Hochleistungsreiniger bestehen aus einer optimalen Kombination von leistungsstarken Enzymen und einem innovativen Tensidsystem. Durch diese Mischung stellen sie eine exzellente Abreicherung infektiöser Anschmutzungen sicher.



Die neuen Reiniger sowie Formulierungen der X·tra-Generation, die reinigende und desinfizierende Eigenschaften aufweisen, stehen für alle relevanten Bereiche der Aufbereitung zur Verfügung:

- 1 | Manuelle Vorreinigung: Reinigung inklusive antimikrobieller Wirkung für ein Plus an Personal-schutz
- 2 | Manuelle Abschlussdesinfektion: Hoch wirksame Desinfektionsmittelkonzentrate mit vollem Wirkspektrum für eine sichere Abschlussdesinfektion
- 3 | Maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Utensilien: Leistungsstarke, moderne Prozesschemikalien zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Medizinprodukten
- 4 | Maschinelle Endoskopaufbereitung: Spezielle Präparate für die erhöhten Anforderungen der chemo-thermischen Aufbereitung von flexiblen Endoskopen. Aufeinander abgestimmte Reiniger und Desinfektionskomponenten zur Verwendung in allen gängigen RDG-E Typen

In Anlehnung an: RKI, DGS

Hygienisch rein bis in kleinste Detail.

Infektionsrisiken in der Endoskopie optimal minimieren.





Ohne gründliche Vorreinigung keine sichere Desinfektion und Sterilisation!

Mikroorganismen können nur dann wirksam inaktiviert werden, wenn sie nicht in Schmutz, Blut oder Sekreten eingeschlossen sind. Eine gründliche Reinigung ist daher die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Desinfektion.

Besonders anspruchsvolle Instrumente wie flexible Endoskope weisen englumige Känale auf, die eine Herausforderung für jede Reinigung darstellen. Komplexes Instrumentendesign und die Gefahr der Ausbildung von Biofilmen erfordert den Einsatz von modernen Hochleistungsreinigern.

Sowohl in der manuellen Vorbehandlung als auch bei der maschinellen Aufbereitung ist die Reinigungsleistung der Prozesschemikalien von besonderer Bedeutung. Denn nur durch hochwirksame, aufeinander abgestimmte Produkte können hartnäckige organische Verschmutzungen wirksam entfernt werden.

^{**} Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung trifft Regelungen zur Aufbereitung in den §§ 2 und 4. Es wird klargestellt, dass die Aufbereitung nach den Vorschriften der MPBetreibV, den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-Vorschriften zu erfolgen hat (§ 2, Absatz 1 MPBetreibV). Die Aufbereitung darf nur qualifiziertem Personal übertragen werden. (Quelle: Empfehlungen für die Überwachung der Aufbereitung von Medizinprodukten (Projektgruppe RKI-BfArM-Empfehlungen 22.01.2008)



schülke -}

Optimale Reinigungsleistung durch Synergie von Enzymen und Tensiden.

gigazyme[®] X·tra: Reinigung im Griff – Personal umfassend geschützt.

gigazyme® X·tra ist ein Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung für die manuelle Aufbereitung von Instrumenten und Endoskopen. Durch die oberflächenaktiven Inhaltsstoffe werden proteinhaltige Verschmutzungen effizient entfernt und eine RKI-konforme Vorbehandlung* gewährleistet.




X•tra Schutz für Personal und Umgebung.

Die Desinfektionswirkung und kurzen Einwirkzeiten sind für die Arbeitssicherheit entscheidend, da die manuelle Aufbereitung eine potenzielle Infektionsgefahr für das Personal birgt. Stark kontaminierte Instrumente bedürfen daher einer kraftvollen Reinigung und einer schnellen antimikrobiellen Wirkung. Die desinfizierende Basiswirkung von gigazyme® X•tra bietet Schutz vor Kontaminationen mit infektiösen Erregern, wie HIV und HBV, für Personal und Umgebung.

Proteinspaltung durch Enzyme Ala Gin Cys Disulfidbrücke Gin Cys Gin Cys Gin Thr Gin Ser Tyr Gin Ser Tyr Protein (Verschmutzung) Proteolytisches Enzym

Enzyme beschleunigen biochemische Reaktionen. Das Enzym Protease spaltet Proteine in ihre Einzelbestandteile (Peptide, Aminosäuren) und löst damit Verschmutzungen.

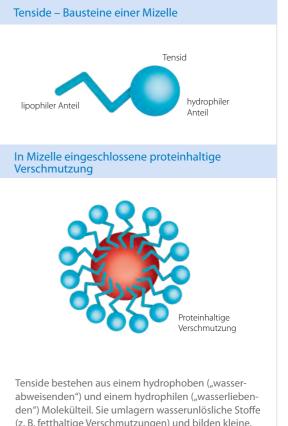

(z. B. fetthaltige Verschmutzungen) und bilden kleine, kugelförmige Aggregate, die Mizellen genannt werden. So werden Anschmutzungen von Oberflächen abgelöst, in Schwebe gehalten und eine effiziente Reinigung ermöglicht.

^{*} Bundesgesundheitsbl 2012 · 55:1244–1310 | © Springer-Verlag 2012, Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

Manuelle Instrumentenaufbereitung – Vorreinigung | desinfizierende Vorreinigung

gigazyme® X·tra

Enzymbasierter Hochleistungsreiniger mit desinfizierender Basiswirkung zur Reinigung von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.



Art.-Nr.

Unser Plus

- · exzellente Reinigungsleistung kombiniert mit Personalund Umgebungsschutz
- · geeignet für die Anwendung im Ultraschallbad
- sehr gute Materialverträglichkeit



Gebindegröße

Karton mit 5 x 2 l-Flasche	12910
5 l-Kanister	129102





gigazyme®

Enzymatischer Reiniger für flexible Endoskope und chirurgische Instrumente.



Unser Plus

- hervorragende Reinigungskraft durch spezielle Enzyme
- sehr materialschonend
- im Ultraschallbad einsetzbar
- · wirtschaftlich durch geringe Einsatzkonzentration
- · angenehmer Geruch

		0

Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 5 x 2 I-Flasche	132105
5 I-Kanister	132106

	-	A
Zubehör		
nstrumentenwannen	1-	Seite 125



mucadont® zymaktiv

Enzymatischer Hochleistungsreiniger für die manuelle Aufbereitung bei besonders hartnäckigen Anschmutzungen.



- die einzigartige ZYMAKTIV-Formel entfernt selbst hartnäckige organische Verschmutzungen wie Blut, Eiweiß und Biofilme
- ideal zur RKI-konformen Endoskopvorreinigung
- · umfassend materialverträglich auch gegenüber empfindlichen
- freigegeben von RICHARD WOLF, KARL STORZ und PENTAX
- frischer Geruch

Gebindegröße

Zubehör

Instrumentenwanner

Art.-Nr. 5 l-Kanister 230146



Seite 125

Manuelle Instrumentenaufbereitung – Vorreinigung | desinfizierende Vorreinigung



edisonite® classic

Kraftvoller, alkalischer Schnellreiniger mit breitem Anwendungsspektrum zur manuellen Aufbereitung.



Art.-Nr.

schülke -}

Unser Plus

- · optimales Reinigungsergebnis schon bei geringer Anwendungskonzentration
- gute Materialverträglichkeit
- · löst selbst hartnäckige Verschmutzungen (z. B. Eiweiß, Öl, Blut, Fett, Wachs und Silikon)
- · schützt nachhaltig vor Korrosionsschäden
- · frei von Ätzalkalien und Chlorverbindungen

230050





edisonite® super

Schonender, pH-neutraler Spezialreiniger für die manuelle Aufbereitung.



- · reinigt selbst alkaliempfindliche Materialien (z. B. eloxiertes Aluminium
- · arbeitet selbsttätig, materialschonend und besonders gründlich
- löst auch hartnäckige Verschmutzungen (z. B. Eiweiß, Öl, Blut, Fette und Wachse)
- · schützt nachhaltig vor Korrosionsschäden
- Materialverträglichkeit für Instrumente der Firma KARL STORZ geprüft

indegröße	ArtNr.



5 I-Kanister

Karton mit 12 x 1 kg-Dose 230051

5 kg-Eimer 230088

Zubehör Seite 125 Instrumentenwanner

Manuelle Instrumentenaufbereitung – reinigende Desinfektion



gigasept® instru AF

Desinfektion und Reinigung für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör usw.; aldehydfrei.*





- sehr gute Reinigungsleistung
- umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- angenehm frischer Geruch
- verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad



Gebindegröße	Art
Karton mit 5 x 2 l-Flasche	1074



Manuelle Instrumentenaufbereitung – reinigende Desinfektion



gigasept® AF

Ein aldehydfreies Präparat zur desinfizierenden Reinigung von starren und flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.*



Unser Plus

- aldehydfrei
- frischer Geruch
- · für Einsatz im Ultraschall geeignet
- begrenzt viruzid** (inkl. HIV, HBV, HCV)



Gebindegröße

Art.-Nr. 100401

Karton mit 5 x 2 I-Flasche 5 l-Kanister 100402





gigasept® AF forte

Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesiematerial und flexiblen Endoskopen.*



Unser Plus

ТВ

- · geeignet für flexible und starre Endoskope
- patentierte Wirkstoffkombination
- · breites mikrobiologisches Wirkspektrum
- geeignet für den Einsatz im Ultraschall





Gebindegröße

Art.-Nr. Karton mit 5 x 2 I-Flasche 125602 5 l-Kanister 125603

Zubehör	T.





mucocit® T

Aldehydfreies Konzentrat für die manuelle Desinfektion kombiniert mit starker Reinigungsleistung.*



Art.-Nr.

Unser Plus

- · breites Wirkspektrum bei kurzen Einwirkzeiten
- besonders kraftvolle Reinigungsleistung
- gute Materialverträglichkeit auch gegenüber empfindlichen Materialien
- für Instrumente der Firma RICHARD WOLF freigegeben
- für Instrumente der Firma KARL STORZ freigegeben



Gebindegröße

Karton mit 5 x 2 I-Flasche 230120 5 l-Kanister 230121



Zubehör Instrumentenwannen

Manuelle Instrumentenaufbereitung – Abschlussdesinfektion



gigasept® pearls

Aktivsauerstoffbasiertes Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Reinigung und Desinfektion mit Multienzymformel.







- wirksam gegen Bakterien inkl. TB, Pilze, Viren, Sporen (inkl. C. difficile-Sporen)
- herausragende Reinigungsleistung durch Multienzymformel (Protease, Lipase und Amylase) in Kombination mit einem neutralen pH-Wert (nicht proteinfixierend) und leistungsstarken Tensiden
- hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber sensiblen Materialien wie flexiblen Endoskopen
- mehr Anwendersicherheit durch die innovative Perlenstruktur staubfrei (daher kein Inhalationsrisiko)
- innovatives Verpackungssystem zur einfachen und sicheren Entnahme
- überraschend angenehmer Geruch



Gebindegröße

Art.-Nr. Karton mit 4 x 1,5 kg-Eimer 70000179 6 kg-Eimer 70000178







gigasept® PAA concentrate

Peressigsäurebasiertes Produkt zur manuellen Desinfektion von flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.







- · wirksam gegen Mykobakterien, Hefen, Viren, Sporen
- (inkl. C. difficile-Sporen)
- kurze Einwirkzeit





Art.-Nr.

12 x (2 x 100 ml)-Doppelgebinde 126202



Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüre an!



Endoskopie im Fokus

^{*} Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukter

Manuelle Instrumentenaufbereitung – Abschlussdesinfektion



gigasept® FF (neu)

Ein auf Bernsteinsäuredialdehyd basiertes Präparat für die manuelle Desinfektion von chirurgischen Instrumenten und empfindlichen medizinischen Instrumenten.



Art.-Nr.

125502

125503

- wirksam gegen Mykobakterien, Hefen, Viren, Sporen (inkl. C. difficile-Sporen)
- formaldehydfrei
- · hervorragende Materialverträglichkeit
- bis zu 7 Tage Standzeit (unbelastete Lösung)
- ${\boldsymbol{\cdot}}\,$ insbesondere zur Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Endoskopen geeignet







mucadont® IS

Viruzide Instrumentendesinfektion für eine sichere manuelle Desinfektion selbst empfindlicher Instrumente.



Art.-Nr.

Unser Plus

- umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- hervorragende Materialverträglichkeit
- minimaler Wirkstoffeinsatz und maximale Desinfektionsleistung
- freigegeben für Instrumente der Firmen Karl Storz und RICHARD WOLF



Gebindegröße

Gebindegröße

5 I-Kanister

Karton mit 5 x 2 I-Flasche

Karton mit 5 x 2 l-Flasche 230122 5 l-Kanister 230123





Manuelle Instrumentenaufbereitung - Pflege/Instandhaltung



mucadont® fluid

Instrumentenpflegespray mit innovativer Fluid-Formel.



Unser Plus

- mit hervorragenden Kriecheigenschaften
- gezielte und sparsame Anwendung
- mit innovativer Fluid-Formel: sanfte Pflegeadditive umschließen das komplette Instrument bzw. Gelenk
- ohne Verkleben, ohne Verschmieren
- mikrobiologisch begutachtet garantiert ohne Beeinflussung des Sterilisationsergebnisses

Gebindegröße

Art.-Nr. 230077

Karton mit 12 x 400 ml-Spraydose

 Hochleistung in der maschinellen Instrumentenaufbereitung.



Studie der Universität Basel bestätigt. Gerne stellen wir Ihnen bei Interesse diese Daten zur Verfügung.

Enzympower in der maschinellen Instrumentenaufbereitung.

schonend für Ihr Instrumentarium.

Die effiziente Reinigungsleistung bei gleichzeitig

optimierter Materialverträglichkeit auch gegenüber

sensiblen Materialien wurde in einer unabhängigen

Die neue Generation der schülke Prozesschemikalien für alle Bereiche der Instrumentenaufbereitung garantiert ein PLUS an Anwendersicherheit und Patientenschutz!

Die neue, starke schülke Produktgeneration

gigasept® pearls

für optimale Hygiene.

Leistungsstarke Reinigung bei umfangreicher mikrobiologischer Wirksamkeit. Auf Basis von Sauerstoffabspaltern kombiniert mit modernen Enzymen und

Tensiden. Kompatibel mit allen schülke Prozesschemikalien zur maschinellen Aufbereitung.





thermosept® X·tra

Moderne, ausgesprochen reinigungsstarke Prozesschemie zur maschinellen Aufbereitung medizinischer Instrumente. Die besonders gute Reinigungsleistung und Materialverträglichkeit wurde bestätigt u. a. durch eine unabhängige Studie des Universitätsspitals Basel. Freigegeben zur

Aufbereitung von Robotikinstrumenten inkl. Intuitive Surgical Endowrist Instrumenten. Entspricht den aktuellen Anforderungen der KRINKO/BfArM-Empfehlung.








thermosept® PAA base und additive

Basis von Peressigsäure für flexible Endoskope. Besonders hohe Materialverträglichkeit garantiert durch ein aufeinander abgestimmtes 2-Komponenten-System. Kompatibel mit dem Reiniger thermosept® EndoCleaner.

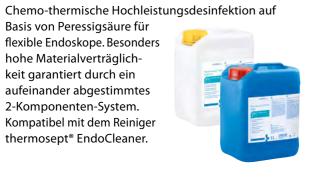




X·tra materialverträglich durch ausgewogenen Korrosionsschutz

thermosept® X·tra: Effizient gegen Verunreinigungen -

thermosept® X·tra dient zur maschinellen Reinigung von medizinischen Instrumenten und Utensilien, zur Verwendung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Taktbandanlagen und Containerwaschanlagen.

Prozentualer Abtrag der Eloxalschicht nach 30 Zyklen

Die synergistische Wirkstoffkombination ermöglicht eine herausragende Materialverträglichkeit, sogar gegenüber empfindlichen Materialien wie eloxiertem Aluminium und Buntmetall.

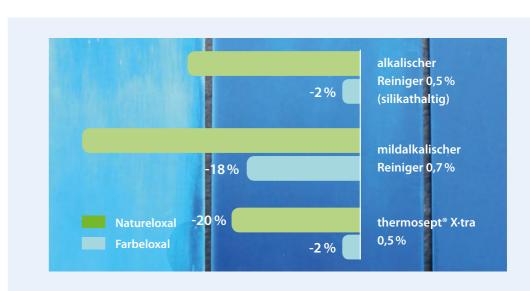

Die Materialverträglichkeit der Prozesschemikalien gegenüber eloxiertem Aluminium wurde an definierten Eloxal-Prüfkörpern im praxisnahen Aufbereitungsprozess untersucht. Hierzu durchliefen die Prüfkörper im maschinellen Verfahren 30 mildalkalische Aufbereitungszyklen (Vorspülen, Reinigen: 10 Min. bei 55°C, Nachspülen, therm. Desinfektion, Trocknung). Aufgrund des Verzichts auf die nachfolgende Sterilisation und die schnelle Abfolge der Reinigungsschritte stellt dieser Prozessablauf besonders hohe Anforderungen an die Materialverträglichkeit. Die dargestellte Grafik zeigt exemplarisch den prozentualen Abtrag einer typischen 15 µm starken Eloxalschicht nach 30 Zyklen in dem beschrieben Prüfmodel. thermosept® X•tra ist bezogen auf die Materialverträglichkeit anderen mildalkalischen Reinigern sowie silikathaltiger Prozesschemie überlegen. Silikate in alkalischen Reinigern bieten einen umfangreichen Materialschutz, stehen jedoch im Verdacht, Verfärbungen und Beläge auf Edelstahloberflächen zu verursachen, die es zu vermeiden gilt.

Maschinelle Instrumentenaufbereitung – ZSVA

Verwechslung ausgeschlossen!

Das schülke Farbcodesystem für Ihre maschinelle Instrumentenaufbereitung:







Neutralisation



Desinfektion



Reiniger

thermosept® X·tra

Mildalkalischer maschineller Reiniger auf Basis von Tensiden und Enzymen (silikatfreies Flüssigkonzentrat) zur universellen Reinigung von medizinischen Instrumenten und Utensilien.



Unser Plus

- herausragende Reinigungsleistung durch synergistische Wirkstoffkombinationen von Enzymen und Tensiden
- · Werterhalt durch optimierte Materialverträglichkeit
- · hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund geringer Anwendungskonzentration
- pH-Wert von >10 in der Reinigungsflotte Risikominimierung bei vCJK gemäß KRINKO-BfArM-Empfehlung
- freigegeben zur Aufbereitung von Robotik-Instrumenten inkl. Intuitive Surgical Endowrist Instrumenten im Miele ROBOTVARIO X-TRA Verfahren.
- besonders schaumarm



Gebindegröße

Gebindegröße	ArtNr.	
5 l-Kanister	127604	
10 l-Kanister	127605	
20 l-Kanister	127612	
200 I-Fass	127607	
500 I-EC Container	70001167	



thermosept® alka clean forte

Mildalkalischer Flüssigreiniger mit Tensiden für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Zubehör aus Chirurgie, Endoskopie, Anästhesie und Pflege.



147304

Unser Plus

- · materialschonend und für Aluminium geeignet, da mildalkalisch
- · kraftvolle Reinigung
- · auch ohne Neutralisation einsetzbar
- · breiter Anwendungsbereich
- zur Risikominimierung einer iatrogenen Übertragung von CJK/vCJK (gem. KRINKO/BfaRM-Empfehlung)

Gebindegröße Art.-Nr. 5 kg-Kanister 147301 147302 10 kg-Kanister 147308 20 I-Kanister

200 kg-Fass

Neutralisator

thermosept® RKF

Alkalischer Flüssigreiniger für die maschinelle Aufbereitung von chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Babyflaschen und Laborutensilien.



Unser Plus

Maschinelle Instrumentenaufbereitung – ZSVA

- sehr starke Reinigungskraft
- · phosphat- und tensidfrei
- schaumfrei
- sehr gutes Abspülverhalten
- optimal zur Aufbereitung von Laborutensilien

Gebindegröße Art.-Nr. 5 kg-Kanister 146305 5 kg-Kanister (Sonderkanister) 146308

Gebindegröße

Gebindegröße

6 kg-Kanister

5 kg-Kanister

Neutralisator

thermosept® NKZ

Neutralisator auf Basis von Zitronensäure für die maschinelle Aufbereitung.



- neutraler Reinigung

	•	5539(

Art.-Nr.

146503

- phosphatfrei
- materialschonend
- · optimiert das Reinigungsergebnis nach alkalischer und



thermosept® NKP

Flüssiger Neutralisator auf Basis von Phosphorsäure zur maschinellen Aufbereitung und Grundreinigung.



- tensidfrei
- optimiert das Reinigungsergebnis nach alkalischer Reinigung
- · auch zur sauren Grundreinigung von Instrumenten und RDG-Kammern verwendbar



Art.-Nr.

146403

Maschinelle Instrumentenaufbereitung – ZSVA



thermosept® BSK

pH-neutrale Klarspülkomponente für die chemothermische Bettenaufbereitung.



Unser Plus

- stellt eine fleckenfreie Trocknung sicher
- beschleunigt den Trocknungsprozess
- · sehr gute Materialverträglichkeit
- geeignet für die Verwendung in allen gängigen RDG, Betten- und Containerwaschanlagen

		•

Gebindegroise	ArtNr.
5 kg-Kanister	144906
20 l-Kanister	144907
200 kg-Fass	144904



Desinfektion

thermosept® NDR

Aldehydfreies Desinfektionsmittel für die chemothermische Bettenaufbereitung.



Unser Plus

- · kombinierte Reinigung und Desinfektion im chemothermischen Prozess
- aldehvdfrei
- · pH-neutral
- sehr gut kombinierbar mit Klarspülkomponente thermosept® BSK

Gebindegröße	ArtNr.
20 l-Kanister	144807
200 kg-Fass	144804



Reiniger

mucapur® MP

Alkalischer Pulverreiniger für die maschinelle Reinigung von Medizinprodukten und Laborutensilien.



Unser Plus

- starke Reinigungsleistung gegenüber hartnäckingen Anschmutzungen
- wirtschaftlich durch geringe Dosierung
- verwendbar in allen RDG und Haushaltsspülmaschinen mit Pulverdosierung
- · Anteil an Chlorabspaltern verstärkt den Reinigungseffekt

230053

230087

ì.
9
•

Gebindegröße Art.-Nr.

5 kg-Eimer



Standardkanister: 244 x 143 x 219 mm

niedrigere Kosten, höhere Ergebnisqualität, schnellere Wege, Werterhalt Soll-Ist-Abgleich, Verifizierung der Werte, A₀-Konzept

Kürzere Aufbereitungszeiten, geringere Verbräuche,

Umsetzung von Gegenmaßnahmen und Gewährleistung

Einhaltung der Grenzwerte, Sicherstellung der Sollwerte, Werterhalt, Vermeidung von Oberflächenveränderungen

- Erfüllung der allgemeingültigen Empfehlungen, z. B. RKI
- Prüfung auf eventuelle Restmengen und Verschleppung
- Vermeidung hartnäckiger Verfärbungen
- Schutz vor Lochfraß

für Ihren Nutzen:

der Funktionalität

- Sicherstellung einer ausreichenden Wasserqualität
- Prüfung und Optimierung der Reinigungsleistung

Vereinfachung der Dosierung, Erfüllung höchster Anfor-

derungen an exakte Dosierung, z. B. für Einzelmaschinen,

Umpumpanlagen und Dosiersysteme: Konzeption, Planung und Installation in bestehenden

Einrichtungen, für Um- und Neubauten, Prüfung und Instandhaltung

Maschinelle Instrumentenaufbereitung – ZSVA

Das Service-Plus

und Gesamtkonzepten

Oberflächenanalytik:

durch Röntgenfluoreszenz

Prozesskontrolle:

• pH-Wert

 Silikat • Chlorid

· Leitfähigkeit

Unsere Leistungen für Ihre ZSVA.

Aufbereitungsergebnis- und Prozessqualität:

Analysen, Bewertungen und Angebote zu Verfahren

Messung und Dokumentation der Programmparameter

Untersuchung von Oberflächenveränderungen u. a.

Wasser- und Flottenzusammensetzung: Analyse ausgewählter Parameter, z. B.:

· Härte, Carbonat- und Resthärte

• Konzentrationsbestimmungen

Dosieranlagen:

Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Reparatur

Produktberatung:

Beratung zur Auswahl der Prozesschemikalien und zur Erstellung individueller Programmabläufe

Gesetzliche Vorgaben:

Vorschläge zur Anpassung der Prozesse

Dauerhaft korrekte und sichere Dosierung

Taktbandanlagen und Containerwascheinheiten

Berücksichtigung der besonderen Bedingungen vor Ort, aufeinander abgestimmte Produkte

Rechtssicherheit durch Erfüllung der gesetzlichen Vor-

Sonderkanister

Als Alternative zur normalen 5 kg-Kanisterform für die maschinelle Instrumentenaufbereitung bietet schülke Ihnen in einigen Anwendungsbereichen wie der Steckbeckenaufbereitung den hohen Sonderkanister an. Im Gegensatz zum normalen Kanister ist dieser höher und schmaler und daher besser für den Einsatz in einigen Maschinen geeignet.



Abmessungen (L x B x H): Sonderkanister: 195 x 149 x 247 mm

Sonderkanister

189901

189910

Gebindegröße

5 I-Kanister

20 I-Kanister

Art.-Nr.

181001 181003

thermosept® ED

Aldehydbasierte Desinfektion für die chemothermische Desinfektion von flexiblen Endoskopen.



- geeignet für die Verwendung gängiger Endoskoptypen

thermosept® EndoCleaner

Mildalkalischer Hochleistungsreiniger für die maschinelle, chemothermische Aufbereitung von flexiblen Endoskopen.



- leistungsstarke Enzyme und Tenside sichern eine effektive Abreinigung auch von starken organischen Anschmutzungen
- besonders schaumarme Formulierung

Maschinelle Instrumentenaufbereitung – Endoskopie

- herausragende Reinigungsleistung bestätigt durch das Institut für angewandte Hygiene, Mag. Dr. Miorini, Graz
- hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund geringer Anwendungskonzentration

Gebindegröße

Art.-Nr.

5 I-Kanister 127610 5 I-Kanister (mit BHT 6 Pin Stecker) 70000879

thermosept* EndoCleaner ist geeignet für den Einsatz in RDG-E aller führenden Hersteller, wie Belimed, BHT, Getinge, Olympus, Steelco, Steris und Wassenburg. thermosept* Endo-Cleaner ist kompatibel mit den Desinfektionskomponeten thermosept* ED (Glutaraldeydbasis) und thermosept* PAA (Peressigsäurebasis) im chemothermischen Aufbereitungsprozess für flexible Endoskope.



thermosept® ER

Enzymatischer Flüssigreiniger für die chemothermische Endoskopaufbereitung.



- gute Reinigungsleistung
- materialschonend
- · kompatibel mit der Desinfektionskomponente thermosept® ED
- pH-neutral





- viruzid, sporizid inkl. C. difficile-Sporen*)
- materialschonend
- kompatibel mit den Reinigungskomponenten thermosept® ER und thermosept® EndoCleaner

* nachgewiesene Wirksamkeit gegen Bakteriensporen im Standard-Aufbereitungsprozess	s (Reinigung und Desinfektion).
--	---------------------------------

Bildquelle: mit freundlicher	Unterstützung	Fujifilm	Europe
------------------------------	---------------	----------	--------

Maschinelle Aufbereitung

flexibler Endoskope.

Maschinelle Instrumentenaufbereitung – Endoskopie







Maschinelle Aufbereitung - Steckbecken





thermosept® PAA

Komponente base und additive.

Aktivsauerstoff-basierte Desinfektionskomponente für die masc chemothermische Aufbereitung von flexiblen Endoskopen.



Unser Plus

- umfassende Wirksamkeit (bakterizid, mykobakterizid, levoruzid, viruzid, sporizid inkl. C. difficile-Sporen)
- kurze Einwirkzeit bei niedrigen Temperaturen
- 2-Komponenten-System ermöglicht nahezu pH-neutralen Wirkbereich
- sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber empfindlichen Materialien thermosept® PAA additive
- optimal abgestimmt auf die Kombination mit thermosept® EndoCleaner als Reinigungskomponente

• NEU! Für große Aufbereitungseinheiten:

thermosept® PAA im Großgebinde für die Verwendung in Kombination mit unserer speziell für Peressigsäure konzipierten Konzentratförderanlage.

chinelle,	∓ <i>i</i> ⊙
dearöße	Ar

Gebindegröße Art.-Nr. thermosept® PAA base 125702

Karton mit 2 x 5 I-Kanister	125/02
Karton mit 1 x 5 l Kanister (flach)	70000168
Neu: 200 I-Fass	70001117

Karton mit 2 x 5 l-Kanister	125802
Karton mit 1 x 5 l Kanister (flach)	70000167
Neu: 200 I-Fass	70001116

thermosept® PAA

Gebinde für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Fa. BHT mit BHT-eigenem Verwechslungsschutz (6 PIN Stecker)

Gebindegröße

Art.-Nr.

thermosept® PAA base (mit BHT 6 Pin Stecker) Karton mit 2 x 5 l-Kanister 70000882

thermosept® PAA additive (mit BHT 6 Pin Stecker) Karton mit 2 x 5 l-Kanister 70000881

Unser Plus

• beseitigt vorhandene bzw. verhindert den Aufbau neuer Kalkbeläge

für die thermische Steckbeckenaufbereitung.

· tensid- und schaumfrei

• verhindert Belagsbildungen durch Wasserrückstände

Schwach saure Enthärterkomponente



thermosept® SKS

Gebindegröße	ArtN
5 kg-Kanister	145806
5 kg-Kanister (Sonderkanister)	145803

Reiniger

mucapur® RS

Neutraler Steckbeckenreiniger mit Frischeduft.



Unser Plus

• pH-neutraler Steckbeckenreiniger

Gebindegröße 5 kg-Kanister

• gute Materialverträglichkeit · hohes Kalkbindevermögen

• optimal abgestimmt auf die sauren Enthärter- und Klarspülkomponenten thermosept® SEK und thermosept® SKS

Art.-Nr.

230176



Die Technik der Sauberkeit.

Die Wirkung selbst des besten Hygieneproduktes kann sich erst voll entfalten, wenn es richtig dosiert und angewendet wird. schülke Hygienetechnik macht es Ihnen mit Sicherheit leicht.

Solange Konzentrate vom Personal zu anwendungsfertigen Lösungen verdünnt werden, stehen auch Fragen nach Gesundheitsschutz, Dosiergenauigkeit und Umweltschutz zur Debatte.


Bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte gilt unsere Aufmerksamkeit sowohl dem Energieverbrauch, der Haltbarkeit, dem Vorhalten von Ersatzteilen als auch der späteren Entsorgung von Altgeräten.

schülke Hygienetechnik entwickelt Dosiergeräte, die unter strenger Einhaltung der Aspekte Arbeitsschutz und Genauigkeit hergestellt werden. Beim manuellen Ansetzen der Lösung besteht häufig das Problem, dass – nach dem Motto "viel hilft viel" – überdosiert wird. Diese Fehldosierung wird durch die Geräte vollständig beseitigt. Damit wird gleichzeitig sowohl die Umwelt wie auch der Geldbeutel entlastet.

Unsere Applikationshilfen sorgen dafür, dass die Präparate in geeigneter Menge und Dosierung unmittelbar zur Verfügung stehen. Dadurch wird ein wesentlicher Beitrag zum Infektionsschutz geleistet. Damit Reinigung, Desinfektion und Sterilisation ortsnah durchgeführt werden können, müssen die Applikationshilfen stets verfügbar sein.

Alle Applikationshilfen werden nach den aktuellesten Anforderungen an Umweltschutz und Arbeitsschutz hergestellt.

Das schülke Hygienetechnik-Konzept umfasst alle Belange, die unseren Kunden das Leben in puncto Produkte und Anwendung so einfach wie möglich machen. Dazu gehören neben ausführlicher Beratung u. a. auch Schulungen, Präparate-Informationen und Produkt-Broschüren.

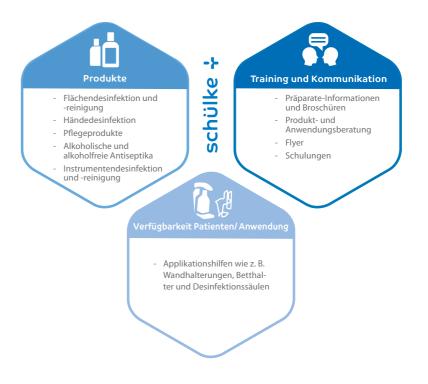

Technisch erfolgreich Hygiene managen.



Hygienetechnik, von der jede Abteilung profitiert!

		Chirurgie I. II A Orthopadie An Orthopadie An					A				10		
		Eingangs- halle	Notauf- nahme	Personal- raum	Patienten- zimmer	Flur	Röntgen- abteilung	OP-Saal	Intensiv- station	Herstellende Apotheke	Endo- skopie	Technik- raum	S
	hyclick*	1	1		I	I	1		1				1
	Typ KHN touchless												1
pender	Тур КНК Тур КНL												1
Präparatespender	sm 2 500 sm 2 universal	7	7		1	7	1		7				1
ā	touchless PA1	1	1			Ī							1
	schülke Desinfektions-Säule												1
	Wandhalterungen für Vierkantflaschen												1
	Universal Flaschenhalter												1
	Betthalter für Vierkantflaschen		G		G.		d						1
Ę	Wandhalterung mikrozid® <i>Jumbo</i> Dose							2					1
Halterungen	Wandhalterung kodan® mikrozid® Dose												1
Hal	Wandhalterung Softpack <i>premium</i>		5		5		5						1
	Wandhalterung Eimer schülke wipes												1
	Wandhalterung Box schülke wipes							4					1
	perform® spray bottle holder												1
Steck- becken- spüler	thermosept® washer BP 31										1.1	1.1	1
zentrale Dosier- anlage	pump des touch										1		1
dezentra- les Dosier- gerät	dosit® des												1
zentrales Druck- gerät	Dosiergerät D											+ =	1
Wasser- filter	FILT'RAY ^{2G} (auch für den Einsatz in Gebärwannen oder bei Verbrennungen)												1
Hygiene- paneel	Hygienepaneel und -kombinationen											2	1
	Dosier- / Applikationshilfen	Dosiers	nentenwani set • Sprüh er • Kaniste	pumpe • D	osierpumpe Kanisterhał	· Kanistero	dosierer • K hilfe mit Ada	ipphebelve apter • Mes	rschluss • F	laschendosi Kittelcip	erer • Kanis	sterpump-	1
	Hygienetechnik in der Küche	dosit® \	/2 compact	• dosit® V2 Schaum •	fluid								1

hyclick So einfach ist sicher. Genial sicher: Flasche und Pumpe fest verbunden.



Genial kombinierbar: Stellen Sie sich Ihr hyclick®-System individuell zusammen.

Weitere hyclick®-Artikel folgen in Kürze.













Produkt		ArtNr.
desderman® pure hyclick®	Flasche	
Karton mit 10 x 1 I-Flasche I	hyclick®	70000755
Karton mit 20 x 500 ml-Flas	che hyclick®	70000754
esemtan® wash lotion hycl	ick® Flasche	
Karton mit 10 x 1 I-Flasche I	hyclick®	70000133
Karton mit 20 x 500 ml-Flas	che hyclick®	70000134
sensiva® wash lotion hyclic	:k® Flasche	
Karton mit 10 x 1 I-Flasche I	hyclick®	70000137
Karton mit 20 x 500 ml-Flas	che hyclick®	70000138
s&m wash lotion hyclick® F	lasche	
Karton mit 10 x 1 I-Flasche I	hyclick®	70000135
Karton mit 20 x 500 ml-Flas	che hyclick®	70000136
desmanol® care hyclick® Fl	asche	
Karton mit 10 x 1 I-Flasche I	hyclick®	70001086
Karton mit 20 x 500 ml-Flas	che hyclick®	70001085
Zubehör	500 ml	1.000 ml
Wandhalter	134411	134416
Universal Flaschenhalter	70001419	70001420
Betthalter (gerade Halterung)	134412	134413
Betthalter (gebogene Halterung)	134414	134415

Genial einfach: Der speziell designte hyclick®-Spender.





hyclick[®]

Spender passend für 500 und 1.000 ml hyclick®-Flaschen. Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen.



Unser Plus

- · Click-System für den einfachen, schnellen Flaschenwechsel
- "Non-Removal"-Schraubverschluss verhindert die Wiederverwendung der Pumpe
- optimaler Schutz vor Kontaminationen
- minimaler Reinigungsaufwand dank abgerundetem Design
- verstellbarer Dosierhub: ca. 1,5 oder 3 ml
- einfache Montage auf schülke- und marktüblichen Wandplatten
- · konstante Haltbarkeit von Produkten

Gebindegröße	ArtNr.
hyclick® Präparate-Spender 1.000 m	60000036
hyclick® Präparate-Spender Vario 500 ml / 1.000 ml	60000045
Zubehör	
hyclick® 500 ml-Adapter (nur Vario)	60000035
Tropfschale (im Lieferumfang enth.)	60000037
Wandhalteplatte	668502

Haltbarkeit hyclick®-Produkte nach Anbruch im hyclick®-Spender:

18 Monate, Arzneimittel 12 Monate

Mehr Infos unter: www.hyclick.com

Präparatespender



Haltbarkeit alkoholischer

Produkte nach Anbruch in KH-Spendern*: 6 Monate

Einfache und exakte Dosierung von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegepräparaten.

Typ KHK | Typ KHL | Typ KHN touchless



Unser Plus

- entspricht den Anforderungen der Berufsgenossenschaft (BGR 250/TRBA 250) und Arbeitsstättenverordnung zur direkten Entnahme der Produkte
- verstellbarer Dosierhub von ca. 0,75 bis ca. 1,5 ml
- Gehäuse Aluminium, eloxiert (wirkt bakterostatisch)
- einfache Montage
- spülmaschinenfest (mit Ausnahme KH touchless)
- · mit Edelstahlpumpe sogar autoklavierbar
- 1 I-Spender = Euroflasche

Gebindegröße

ΑI	rτ	N

	pumpe	pumpe	counter
KHK 500 ml	669600	669602	669605
KHK 1.000 ml	669700	669702	669705
KHL 500 ml	669610	669612	669615
KHL 1.000 ml	669710	669712	669715
KHN touchless 500 m	nl –	60000187	-
KHN touchless 1.000	ml –	60000184	-
			-

Zubehör

für Typ KH Spender:	500 ml	1.000 ml	touchle
Schalenhalter	669240	669390	66956
Verschlussplatte	669620	669720	66955
Winkelplatte	669319	669320	66932
Edelstahlpumpe	669601	669701	(inkl
Kunststoffpumpe	669611	669711	-
Kunststoffpumpe (verpackt)	60000130	60000130	-
Halterung Drägerschiene	669313	669314	-
Halterung Rohrrahmen	669311	669312	-
Einwegpumpe	60000233	60000232	-

Das Robert Koch-Institut empfiehlt: "Spender müssen vor dem erneuten Füllen gründlich gereinigt bzw. desinfiziert werden."

Jeder Präparatespender hat seine eigene Aufbereitungsmethode. Diese müssen unbedingt eingehalten werden, damit bei nachfolgenden Anwendungen optimale Ergebnisse erzielt werden.

Die Aufbereitung eines Typ KH Spenders in Bildern.














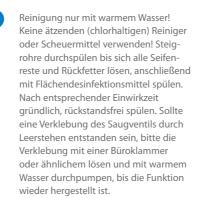







^{*} Gebinde in Wandspendersystemen gelten als geöffnet, auch wenn die besondere Konstruktion der Spender die Produkte in den Gebinden einwandfrei schützt.

Präparatespender



Haltbarkeit alkoholischer Produkte nach Anbruch in sm-Spendern*: 12 Monate

sm 2 500 | sm 2 universal

Präparate-Spender sm 2 500 für alle 500 ml-Flaschen Präparate-Spender sm 2 universal für Flaschen von 500 ml bis 1 l (inkl. 1 l-Euroflaschen).


Unser Plus

- verstellbarer Dosierhub von 1, 2 oder 3 ml
- einfache Montage
- · erfüllt die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung
- · leichte Reinigung (spülmaschinenfest) und ggf. Desinfektion durch einfache Demontage und komplette Zerlegbarkeit der Pumpe
- · herausnehmbare, tropffreie Pumpe
- formschöner, robuster Kunststoffspender
- · Betätigungshebel für Arm oder Ellenbogen


Gebindegröße	ArtNr.
sm 2 500	668600
sm 2 universal	668500
Zubehör	


Schalenhalter sm 2 universal / 500,	
komplett	668510
Ersatzpumpe, komplett	668540

Zwei Methoden der Aufbereitung von Spendersystemen am Beispiel des sm 2 500.

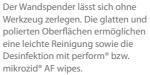





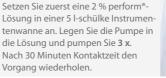

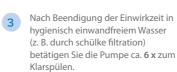



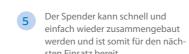

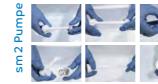




Entnehmen Sie die Produktflasche aus dem Wandspender. Die glatten und polierten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung sowie die Desinfektion mit perform® bzw. mikrozid® AF wipes.





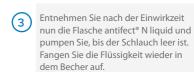





(5) Setzen Sie eine Flasche des gewünschten Produkts ein und pumpen Sie dieses 20 x in den Becher. Der Inhalt des Bechers kann anschließend ins Abwasser entsorgt werden.







^{*} Gebinde in Wandspendersystemen gelten als geöffnet, auch wenn die besondere Konstruktion der Spender die Produkte in den Gebinden einwandfrei schützt.

Präparatespender



Präparatespender touchless PA1

Der neue Standard für berührungslose Händehygiene im öffentlichen Bereich.




Art.-Nr.

60000115

60000116

Unser Plus

- hochwertiges Edelstahlgehäuse
- abschließbar
- · hygienische Sprühkammer
- integrierte Tropfschale
- intuitive Bedienung durch zuverlässigen, berührungslosen Sensor
- einstellbare Dosiermenge
- universell kompatibel mit 1 l-schülke-Flasche und 1l-Euroflasche

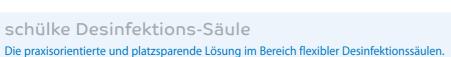

Produkt

touchless PA1

Zubehör

Edelstahlsäule für touchless PA1



Art.-Nr.

Unser Plus

- standardmäßig für die Montage von Spendern des Typs hyclick®, sm 2, KH geeignet
- ideal für Eingangsbereiche sowie Orte, an denen eine Wandanbringung von Spendern nicht erwünscht oder möglich ist
- · pulverbeschichteter Stahl zur optimalen und einfachen Reinigung
- schnelle und einfache Aufstellung

Produkt | Abmessungen

Standsäule	60000141*
Maße (H x B x T)	450 x 1400 x 450 mm
Material	Stahl pulverbeschicht
Gewicht	16,5 kg

* Spender und Zubehör im Lieferumfang nicht enthalten.









Die Euroflasche

... ist die Alternative zur normalen 1 Liter-Flasche für den Einsatz im KH-Spender.

Behälter (L x B x H)

Euroflasche 1 I 89 x 71,5 x 207 mm Standard 1 I 102 x 79,5 x 197,8 mm Standard 500 ml 75,5 x 67 x 170 mm





Furoflasche (Abb. desderman® pure) Abb. KHN (touchless)

Halterungen



Universal Flaschenhalter

Universalhalter zur einfachen Montage an den Rohrrahmen.



70001419

134411

Art.-Nr.

Unser Plus

- zum vertikalen und horizontalen Einsatz
- · lässt sich um 360 Grad drehen
- geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml- und hyclick® Flaschen
- besteht aus Edelstahl und lässt sich somit einwandfrei desinfizieren
- für die rutschfreie Nutzung an Betten sowie Stations- und Verbandswagen



Produkt | Abmessungen Art.-Nr.

500 ml-Universal Flaschenhalter Maße (H x B x T) 105 x 78 x 130 mm

1.000 ml-Universal Flaschenhalter Maße (H x B x T) 125 x 85 x 160 mm 70001420



Wandhalterung für Vierkantflaschen Kunststoff-Wandhalterung für die Applikation u. a. von Pflegeprodukten.






- geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml- und hyclick® Flaschen
- · aus stabilem Kunststoff
- · Rückwand mit vier Bohrungen
- alkoholbeständig

Produkt | Abmessungen Art.-Nr. 500 ml-Vierkantflasche

Maße (H x B x T) 114 x 83 x 80 mm 1.000 ml-Vierkantflasche

Maße (H x B x T) 135 x 94 x 115 mm 134416

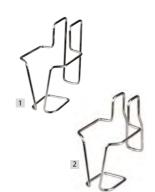

Betthalter für Vierkantflaschen Manuelle Betthalter zur einfachen Montage

an den Rohrrahmen bzw. an das Fußteil vom Bett.



- geeignet für 500 ml- bzw. 1.000 ml- und hyclick® Flaschen
- · robuste Drahtkonstruktion
- mit Halterung zur Befestigung an Rohrrahmen (gerade) und Fußteil (gebogen)
- autoklavierbar
- Edelstahl-Rundmaterial


Produkt | Abmessungen

1 500 ml-Vierkantflasche (gerade Halterung) Maße (H x B x T) 110 x 70 x 120 mm

² 500 ml-Vierkantflasche (gebogene Halterung) Maße (H x B x T) 110 x 70 x 120 mm

1 1.000 ml-Vierkantflasche (gerade Halterung) Maße (H x B x T) 145 x 85 x 150 mm

2 1.000 ml-Vierkantflasche (gebogene Halterung) Maße (H x B x T) 145 x 85 x 150 mm

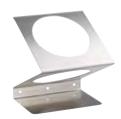

Wandhalterung mikrozid® Jumbo Dose Für mikrozid® AF wipes Jumbo, mikrozid® sensitive wipes Jumbo Dosen und mikrozid® PAA wipes.

Unser Plus

- geeignet für mikrozid® AF wipes Jumbo, mikrozid® sensitive wipes Jumbo und mikrozid® PAA wipes
- · Rückwand mit drei Bohrungen · autoklavierbar

Produkt | Abmessungen Art.-Nr. Wandhalterung Jumbohalterung

Maße (H x B x T) 176 x 150 x 145 mm

119

Halterungen



Wandhalterung kodan® | mikrozid® Dose



Universal Wandhalterung für die kodan® wipes und mikrozid® wipes Dosen.

Produkt | Abmessungen • geeignet für die kodan®-, mikrozid® AF- u. sensitive-Dose (kleine Dose)



Wandhalterung kodan® | mikrozid® Dose Maße (H x B x T) 145 x 74 x 73 mm

Wandhalterung Softpack premium






Universal Wandhalterung für die wipes Softpacks premium / maxi.

Unser Plus

robuste Drahtkonstruktion

Rückwand mit zwei Bohrungen

· autoklavierbar · Edelstahl-Rundmaterial

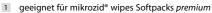

- robuste Drahtkonstruktion
- · Rückwand mit zwei Bohrungen
- · autoklavierbar · Edelstahl-Rundmaterial
- passend für alle mikrozid® wipes Softpackgrößen
 - einhändige Entnahme bis zum letzten Tuch abschließbar
 - · Rückwand mit zwei bzw. vier Bohrungen
 - autoklavierbar Edelstahl

Produkt | Abmessungen

1 Wandhalterung Softpack Maße (H x B x T) 110 x 250 x 90 mm

70001119

2 Softpack-Halterung premium

Maße (H x B x T) 235 x 170 x 155 mm



Wandhalterung schülke wipes Universal Wandhalterungen für schülke wipes Eimer, schülke wipes Box.



Unser Plus

geeignet für den Feuchttuchspender-Eimer schülke wipes und schülke wipes safe&easy bagless system

geeignet für die Feuchttuchspender-Box schülke wipes und das schülke wipes safe&easy bag-in-box system

Produkt | Abmessungen

Art.-Nr.

1 Wandhalterung Eimer schülke wipes Maße (H x B x T) 110 x 70 x 120 mm 134430

2 Wandhalterung Box schülke wipes

Maße (H x B x T) 265 x 180 x 220 mm





669305)

Unser Plus

kompatibel mit allen Produkten mit Sprühkopf der perform®-Linie

- vollständig autoklavierbar
- aus hochwertigem elektropoliertem Edelstahl
- einfache Montage
- · werkzeuglose Demontage

Produkt | Abmessungen Art.-Nr.

perform® spray bottle holder Maße (H x B x T) 146 x 40 x 334 mm 693540 perform® spray bottle holder-Platte

(Empfehlung: glabete Klebsystem

Maße (H x B x T) 150 x 42 mm 693541

Steckbeckenspüler

Steckbeckenaufbereitung leicht gemacht mit dem thermosept® washer BP 31.

Eigens für den Bedarf des Spülens von Steckbecken und Urinflaschen wurde der thermosept® washer BP 31 entwickelt. Er ist ein kompakter Steckbeckenspüler, bei dem Qualität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen.



Die gängigsten Probleme an Auffanggefäßen sind Kalkund Wasserflecken. Diese werden durch die hervorragenden kalklösenden und -bindenden Eigenschaften unserer Produkte im wahrsten Sinne des Wortes

gelöst. Das Gerät ist zudem so konstruiert, dass es an die Platzverhältnisse angepasst werden kann. Es kann direkt an der Wand montiert oder auf dem Boden auf einem Sockel aufgestellt werden.

Der thermosept® washer BP 31 bietet Ihnen folgende Vorteile:

Inbetriebnahmegualifikation

Im Rahmen der Inbetriebnahme des thermosept® washer BP 3 werden vom schülke Service-Team die wichtigsten Parameter wie Waschleistung und A.-Werte gemessen, geprüft und dokumentiert. Eine jährliche Wiederholung bieten wir im Rahmen eines optionalen Wartungsvertrages an.

Totaldesinfektion

Einzigartiges, zum Patent angemeldetes, dezentrales, thermisches Desinfektionssystem, bei dem nicht nur die zu waschenden Gegenstände, sondern auch der eingebaute Kombitank, die Pumpe, das Waschsystem, die Düsen und die Sprühköpfe bei jedem Spülvorgang desinfiziert werden. Die Keimbildung (Biofilm) wird computerüberwacht zuverlässig verhindert und die Hygiene dadurch jederzeit gewährleistet.

Ein Dampfkondensator minimiert den Dampfaustritt beim Öffnen der Klappe und kühlt die Utensilien für die sofortige Entnahme aus der Maschine ab – ein zusätzlicher Schutz für das Personal. Durch den geschlossenen Wasserkreislauf wird eine Rückverkeimung der Aufbereitungsgüter sicher vermieden.

Niedriger Energieverbrauch

Leistungsregelung der Heizung bei der Desinfektion und intelligente Wasserzufuhr tragen zu kurzer Verfahrenszeit und niedrigem Energieverbrauch bei. Das Ergebnis:Verbesserte Wirtschaftlichkeit.

Wartungsfreundlich

Wartungsfreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang von oben oder vorn zu allen Bauteilen. Die praktische Einheit für Kombitank, Heizelement und Pumpe erlaubt einen schnellen Austausch und minimiert damit Ausfallzeiten bei etwaigen Betriebsstörungen.

Benutzerfreundliche Bedienung

Der thermosept® washer BP 31 wird frontbedient. Die Klappe, die als Ausguss dient, schließt automatisch durch einfachen Druck auf die Starttaste. Steckbecken und Urinflaschen werden beim Schließen der Klappe

Display mit Programminfo

Fünf Programme als Standard. Individuelle Anpassung und Zuwahl weiterer Programme (z. B. Schnellvorspülprogramm) möglich. Im Display wird mittels einer digitalen Anzeige durchgehend der Programmstatus angezeigt – u. a. zeigt ein Balken, wie weit der Spülvorgang fortgeschritten ist. Sollte das Programm nicht korrekt ablaufen, so leuchtet zur Warnung eine rote Lampe

Normen und Qualitätssicherung

Der thermosept® washer BP 31 erfüllt die geltenden EU-Richtlinien und wurde gemäß EN ISO 15883-3 konstruiert – darunter beispielsweise die doppelte, nabhängige Temperaturkontrolle, die Abflusskontrolle sowie die Reinigungsleistung nach SIS-TR 3:2001 (früher SPRI). Kombitank und Spülkammer sind aus säurefestem Edelstahl 1.4401(AISI 316). Serienmäßig ist ein A -Wert von 600 programmiert. Als Minimum beschreibt die Norm nur einen Wert von 60.*

Reinigungsfreundlich

Überall glatte, reinigungsfreundliche Flächen. Die nahtlos tiefgezogene Spülkammer trägt zusätzlich zum hohen Hygieneniveau bei. Auch innen reinigungsfreundlich durch glatte Oberflächen

Optional: NetCom - Dokumentation und Kommunikation via Netzwerk

NetCom ist eine neu entwickelte Software für die einfache und betriebssichere Kommunikation mit dem Gerät via Netzwerk, darunter auch die Dokumentation des korrekten Spül- und Desinfektionsablaufes.



thermosept® washer BP 31

Zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.

Unser Plus

- die Klappe dient als Ausguss: Steckbecken und Urinflaschen werden beim Schließen der Klappe automatisch entleert
- Totaldesinfektion
- minimierter Dampfaustritt beim Öffnen durch Dampfkondensato
- wahlweise zur platzsparenden Wandmontage oder mit Sockel als Standmodell

ArtNr.

thermosept® washer BP 31 (400 Volt / 16 Ampere 681000 (400 Volt / 16 Ampere) inkl NetCom 681005 (230 Volt / 16 Ampere) 681100 (230 Volt / 16 Ampere) inkl. NetCom

Zubenor	
Sockel für BP 31 (Höhe 30 cm)	681135
Fußbedienung	681150
Ellbogenbedienung	681140
Kleinteilekorb	681110

^{*} A₀ = 600 entspricht dem Wirkbereich A gemäß der Definition der RKI-Liste und ist das Minimum für die Anwendung von unkritischen Medizinprodukten auf der unverletzten Haut Der in der EN ISO 15883 genannte A,-Wert = 60 gilt u. a. nur für "geringe Belastung"

schülke -}

Zur Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen

Ein starkes Herz für den ZSVA-Kreislauf. Die schülke pump des touch - platzsparend, effizient, wirtschaftlich.

Die schülke Umpumpstation bietet robuste Technik "Made in Germany" auf kleinstem Raum. In platzsparenden, hochwertigen Edelstahlgehäusen sind moderne Baugruppen zu finden, die mit einem Minimum an Wartung und ohne umständliche Programmierung arbeiten.

Die pump des touch bietet Ihnen folgende Vorteile:









- · interne Statusmeldungen (Fälligkeit der Wartung, Reserve-Meldungen, Leer-Meldungen, Störungen) per E-Mail
- Statusmeldungen** an schülke
- Gerätehistorie (beinhaltet Inbetriebnahme, Reparaturen, Wartungen, Produktumstellungen etc.)
- Störungshistorie (Ringspeicher mit bis zu 1.000 Meldungen)
- einstellbare Anwendersprache (9 Sprachen)
- akustische und visuelle Signalisierung von Statusänderungen
- aktueller Status in Bild und Text (Vollfarbe) ablesbar
- · Anzeige der eingesetzten Produktnamen
- · Remotezugriff vom PC, Tablet / Smartphone*

Wirtschaftlich

- · Minimierung des logistischen Aufwands durch zentralen Chemieraum
- großes Einsatzgebiet (ZSVA, Endoskopie, Taktbandanlagen, Containerwaschanlagen, Bettenwaschanlagen, Spülmaschinen in Großküchen, Waschmaschinen)
- kein Umbau der Maschine erforderlich*** und dadurch kein Verlust der Gewährleistung des Maschinenherstellers
- · geringer Verdrahtungsaufwand durch BUS-System.
- · nachträgliche Integration in bestehende Anlagen*** in den meisten Fällen möglich

- Entlastung des Fachpersonals wie z. B. der Hygienefachkraft
- · Reduzierung des chemisch-technisch unterwiesenen Personals

Technische Daten

- · Wirtschaftlichkeit durch zentrale Versorgung von Großgebinden (z. B. 200 I-Fass oder 1.000 I-Container)
- visuelle Signalisierung der Großgebinde-Füllstände auch am
- · unterstützt 2-Gebindebetrieb (zwei Großgebinde an einer Vorlage -> Automatische Fassumschaltung bei Leer-Meldung von Fass 1 auf Fass 2 - sinnvoll z. B. bei Nachtschicht- oder Wochen-
- · bis zu 10 Produkte mit einer Anlage fördern
- Höhenunterschied zwischen Gebinde und Vorlage von bis zu 8 Metern möglich
- Entfernungen zwischen Gebinde und Vorlage von bis zu 100 Metern möglich
- Maximalverbrauch von 4.000 Litern pro Monat und Produkt
- Maximalentnahme 6 Liter pro Stunde je Produkt

Platzsparend und effizient

- · Die Pumpeneinheit enthält leistungsstarke Pumpen, die aufgrund ihrer Effizienz einen sehr geringen Platzbedarf haben.
- · zuverlässige Technik, mit minimalem Wartungsaufwand zu betreiben
- · Die chemikalienresistenten Sauglanzen sind mit elektromechanischen Niveaureglerr ausgestattet, ein notwendiger Gebindewechsel wird rechtzeitig angezeigt.



pump des touch

Die zentrale Umpumpstation für den Einsatz in der ZSVA.

Unser Plus

- · zentrale Versorgung aus Großgebinden
- Logistik und Lagerhaltung von Kleinabfüllungen wird reduziert
- optionale automatische Fassumschaltung von Fass 1 auf Fass 2
- · bis zu 10 Produkte mit einer Anlage fördern

Produkt

Art.-Nr. 692000 pump des touch

- Anbindung an das lokale Netzwerk erforderlich
- *** Voraussetzung: Maschine mit eigener Dosiervorrichtung für flüssige Produkte

dosit® des

Dezentrales Dosiergerät zur Herstellung und Ausbringung wässriger Desinfektionsmittellösungen.



644017

Unser Plus

- · mikroprozessorgesteuertes System
- Überwachung des kompletten Dosiervorgangs durch Sensoren
- Dosierbereich 0,25 5 %, Dosiertoleranz + 5 %, in 0,05 % Schritten einstellba

Zur Herstellung von gebrauchsfertigen Desinfektionsmittellösungen

- · besonders bedienerfreundlich durch übersichtliches Bedienungsfeld und leichten Kanisterwechsel
- nach RKI-Richtlinie geprüft (Zertifikat-Nr.: 99189)
- · Langzeitprüfung durch RKI-zertifiziertes Labor
- · Sauglanze und Kanisterhalter wahlweise links oder rechts am Gerät montierbar
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) / DIN EN 1717
- · Zulassung gemäß KTW Leitlinie W270
- · automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung
- Standzeitüberwachung gemäß Empfehlung des VAH

Produkt	ArtN
dosit® des	64400
Zubehör	
Abschließbare Kanisterhalterung	64401

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe:	51 x 18 x 57,8 cm
Abgabemenge:	7 Liter/Minute
Netzspannung:	AC 230 V – 50 Hz
Leistung:	75 Watt
Wasseranschluss:	3/8" Außengewinde



Dosiergerät D

Zentrales Druckgerät zur Herstellung wässriger Desinfektionsmittellösungen.



Unser Plus

- zur Herstellung und zum Ausbringen wässriger Desinfektionslösungen
- Lösungsabgabe durch Nutzung des hauseigenen Wasserdrucks ohne Druckerhöhung
- Versorgung von Steckbeckenspülern, Sprühlanzen oder festverrohrten Entnahmestellen
- 5 Dosierstufen: 0,25 0,5 1 2 3 %; Dosiertoleranz: max. + 5 %
- · mikroprozessgesteuerte und -überwachte Dosierung
- · Anzeige der Betriebszustände und Funktionsstörungen im Display
- Sauglanze und Kanisterhalter wahlweise links oder rechts am Gerät montierbar
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) / DIN EN 1717
- automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung

Produkt	ArtN
Dosiergerät D	64800

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Tiefe x Höhe:	51 x 21 x 38 cm
Abgabemenge:	8 Liter/Minute
Netzspannung:	AC 230 V – 50 Hz
Steuerspannung:	21 V/8 V
Leistung:	96 Watt
Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde
Lösungsabgang:	1/2" Außengewinde
Abwasseranschluss:	1/2" Außengewinde
7.ulaufdruck:	15 min 6 har may

* Proben-Nr.: RE SN 9038a

Technische Innovation – Filter FILT'RAY^{2G}. Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau.

Patentierte Selbstreinigung der Membran Bubl'air Wash™, robuste Hochleistungs-Tubularmembran, langfristig einsetzbarer Filter mit dreifacher Fläche für Mikrofiltration.

Durch das patentierte System zur Selbstreinigung der Membran Bubl'air Wash™ bleiben FILT'RAY^{2G}-Filter durchlässig und sehr leistungsfähig. Ein ausreichender Wasserdurchfluss ist somit gewährleistet. Die Mikrofiltrationsmembran ist eine äußerst robuste Sterilmembran, die sensorische Wassermerkmale erhält.

FILT'RAY^{2G} -Filter für Wasserhähne und Duschköpfe (Mono- und Mixstrahl) sind für Duschköpfe und Wasserhähne von 1 bis 4 Monate Standzeit erhältlich.

1 Monats- / 2 Monats-Filter	3 Monats- / 4 Monats-Filter
kurzfristiger, vorübergehender Einsatz	durch die Nutzung der langen Standzeit werden Ressourcen auf allen Ebenen
• in der Patientenhygiene	gespart: Wirtschaftlich (Einkauf & Logistik)
oder beim Abspülen medizinischer Geräte	Zeitersparnis beim Personal (Technik, Logistik, Einkauf)
	Ökologisch (weniger Müll, bessere CO, Bilanz Produktion etc.)

FILT'RAY2G

Endfilter für den Duschkopf und Wasserhahn.





Neu

Wasserfilter



- Einweg-Filter für 31 und 62 Tage, sowie 3 und 4 Monate Standzeit
- · wirksamer Schutz vor wassergebundenen Mikroorganismen, wie z.B. Legionella pneumophila und Pseudomonas aeruginosa
- robuste Hochleistungsmembran (Tubularmembran)
- erfüllt alle nationalen Anforderungen (KTW-Zertifikat, DVGW Arbeitsblatt W270, Twin Nr. 12 Newsletter)
- patentiertes System zur Selbstreinigung Bubl'Air Wash™

\bigcirc	
_	



Produktbezeichnung	Wirksan	n gegen:	Format	Einsatzdauer ArtNr.								
Wasserfiter FILT'RAY ^{2G}	Bakte- rien	Legio- nellen		1 Monat	2 Monate	3 Monate	4 Monate					
Monoauslauf	für den Wasserhahn,	x	х	steril	60000153	60000154	-	-				
Monoadsiadi	Monoauslauf	x	x	nicht steril	-	-	60000161	6000016				
		х	х	steril	60000145	60000146	-	-				
Handbrause	inkl. Handbrause	х	х	nicht steril	-	-	60000149	6000015				
	für den	х	х	steril	60000151	60000152	-	-				
Duschauslauf	Wasserhahn, Duschauslauf	х	х	nicht steril	-	-	60000157	6000015				
	für fest montierte Wandduschen	х	х	nicht steril	60000167	60000168	60000169	6000017				
Inline-Filter	Inline-Filter	x	х	steril	60000163	60000164	-	-				
minie-riitei	illilie-Filter	x	х	nicht steril	-	-	60000165	6000016				


Filter der Baureihe FILT'RAY^{AG} sind Medizinprodukte mit CE-Kennzeichnung Klasse I und entsprechen den Zulassungsvorschriften (Attestation de Conformité Sanitaire ACS), KTW, WRAS* und NSF*. (* in Vorbereitung) FILT'RAY^{AG} ist eine eingetragene Marke von aqua-tools.

Für den richtigen Einsatz den richtigen Anschluss!

FILT'RAY^{2G}-Filter enthalten eine Schutzbarriere gegen wassergetragene Mikroorganismen (aerobe Flora bei 22 °C und 36 °C, *Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila* usw.). FILT'RAY^{2G}-Filter mit 31 und 62

Wasserfilter

Tagen Standzeit sind auf das Abspülen medizinischer Geräte wie z.B. flexible Endoskope ausgelegt oder werden in der Patientenhygiene eingesetzt.

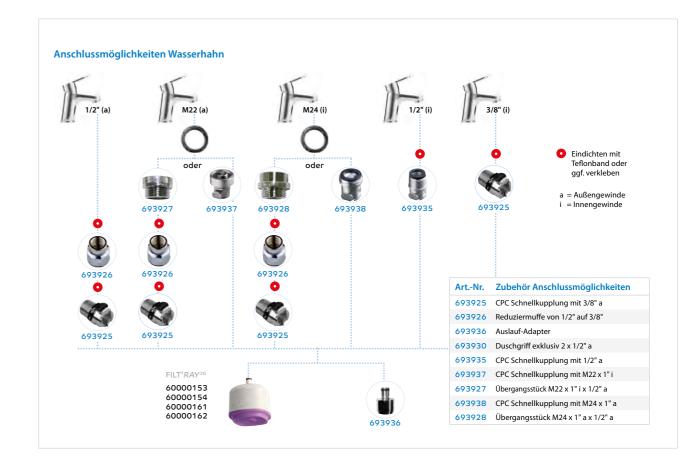







Je nach Anforderung komplett mit Steckbeckenspüler, Ablageregal, Hängeschrank sowie Ober- und Unterschrank inklusive Waschbecken.







Hygienepaneel

Das besondere Highlight: Unser kleines aber sehr vielseitiges Hygienepaneel. Erweiterbar zur Hygienekombi.



Unser Plus

- Ausgussbecken inkl. Ringspülung
- integriertes Desinfektionsmittel-Dosiergerät
- Mischbatterie sowie Wandspender zur berührungslosen Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen
- als Komplettlösung für kleine Spül- und Putzräume
- Ganz einfach an die Wand gestellt, anschließen fertig und los!

Produkt

Wasseranschluss:

Art.-Nr. 682000

Hygienepaneel

Abmessungen | Technische Daten

Material: Chromnickelstahl 1.4301

Abmessungen (H x B x T): 2.100 x 500 x 525 mm

Kalt-/Warmwasseranschluss: 18 L / min, 2 – 8 bar

geräteseitig: ¾" RG bauseitig: Absperrventil,

3/8" Außengewinde

Anschlussstück R3/4" mit Außengewinde flachdichtend

Stromversorgung: 230 V / ~ 50 Hz mit Schuko-Stecker

Abwasser: Sifon DIN70

Instrumentenwannen





Instrumentenwannen

Die Instrumentenwannen werden als Komplett-Sets angeboten, bestehend aus Wanne, Sieb, Beschwerteil und weißem oder transparentem Deckel.




Unser Plu

• gute Materialverträglichkeit gegenüber allen Instrumentendesinfektions- und Reinigungsprodukten

Artikelbezeichnung	ArtNr.	Abmessung in mm innen (L × B × H)	Abmessung in mm außen (L × B × H)
3 I-Wanne – Komplett-Set Deckel weiß Deckel transparent	144307 144308 144311	250 x 150 x 120 250 x 150 x 120 250 x 150 x 120	300 x 185 x 125 300 x 185 x 125 300 x 185 x 125
5 I-Wanne – Komplett-Set Deckel weiß Deckel transparent	144407 144408	500 x 170 x 120 500 x 170 x 120	555 x 205 x 135 555 x 205 x 135
10 I-Wanne – Komplett-Set Deckel weiß Deckel transparent	144507 144508	340 x 260 x 170 340 x 260 x 170	400 x 300 x 180 400 x 300 x 180
30 I-Wanne – Komplett-Set Deckel weiß / mit Auslaufhahn Deckel transparent / mit Auslaufhahn Deckel weiß / ohne Auslaufhahn Deckel transparent / ohne Auslaufhahn	144609 144610 144607 144608	560 x 370 x 225 560 x 370 x 225 560 x 370 x 225 560 x 370 x 225	620 x 405 x 240 620 x 405 x 240 620 x 405 x 240 620 x 405 x 240

Die Komponenten sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich. Aufbereitung nicht über 55 $^{\circ}\mathrm{C}.$

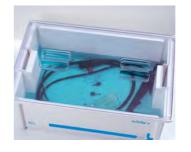





Applikationshilfen



Dosierset Für 500 ml- und 1 l-Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotione

Produkt für 500 ml 134406 134405 für 1000 ml



Kanisterpumpspender Für schülke Küchenprodukte.

70001217

für 5 und 10 l-Kanister (20 ml / Hub)



Kanisterschlüssel

Produkt

Art.-Nr. für 5 und 10 l-Kanister 135810 für 20 und 25 l-Kanister 135901 für 1 l-Euroflasche / 5, 10, 20 und 25 I-Kanister / 200 I-Fass 70000804



Dosierpumpe

Sprühpumpe

1 Sprühpumpe f. Haut- u. Schleim-

2 Sprühpumpe für alkohol. Flächen-

sprühdesinfektionsmittel,

für 500 ml und 1 l

3 Schaumsprühkopf foam

hautantiseptika, für 500 ml und 1 l, **C€**

Produkt



180212

180124

180123


für 500 / 1000 ml (3 ml / Hub) C€ 180303 für 1 l-Euroflasche (3 ml / Hub) C€ 180803



Kanisterhahn



für 5 und 10 l-Kanister 135502 für 20 und 25 l-Kanister 126101

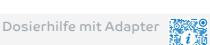

Produkt Art.-Nr. für 5 und 10 l-Kanister (20 ml / Hub) 117101 für 20 und 25 l-Kanister (20 ml / Hub) 182501



tNr.
0515



Kipphebelverschluss für Desinfektions-Reiniger AF.

Flaschendosierer

Kanisterdosierer



Produkt Art.-Nr. für 1 I-Flasche 180125



Messbecher

Produkt

Trichter



Art.-Nr.

117901

Art.-Nr. 500 ml 136101 50 ml 136102





für 2 I-Flaschen Nicht verwendbar für Desinfektionsmittel jeglicher Anwendung und Reiniger für Medi-zinprodukte. Die Dosierhilfe darf ausschließ-Zinprodukte. Die Dosiernile darr ausschiels-lich für folgende Produkte verwendet wer-den: • antifect® plus • s&m Pflegeadditiv • s&m Schaumreiniger A • antifect® S • s&m Reinigungsadditiv • s&m Schaumreiniger S



Kittelclip



einfach für 50 ml / 100 ml / 150 ml ausziehbar für 50 ml / 100 ml / 150 ml

Art.-Nr. 134432 134431

Alle Artikel sind speziell für die schülke-Präparate angefertigt und umfassend geprüft worden. Mit diesen Original-Applikationshilfen erhalten Sie praxisgerechte Ausführungen.

Weiteres Infomaterial:

Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüren an!



Folder Hygienetechnik Mat.-Nr. 237



Folder Steckbeckenhygiene Mat.-Nr. 117



Techn. Beschreibung Steckbeckenspüler | Mat.-Nr. 2090



Anwendungsplan – Reinigung und Desinfektion Wandspender sm 2 Mat.-Nr. 2938



Mat.-Nr. 430

Folder Edelstahleinrichtungen Mat.-Nr. 2487





Folder hyclick®-System Mat.-Nr. 900842





Es ist angerichtet!

Küchenhygiene von Profis für Profis: Glänzender Schutz für Geräte, Geschirr und Flächen.

In medizinischen Einrichtungen ist eine tägliche und gründliche Flächendesinfektion Pflicht – vor allem in kritischen und sensiblen Bereichen.

Wo Speisen und Getränke für Personengruppen zubereitet werden, die besonders anfällig für Krankheitserreger sind, spielt die Hygiene in Küche und Produktion eine lebenswichtige Rolle.

Hygienemaßnahmen tragen genauso entscheidend zur Gesunderhaltung dieser Personen bei wie die Auswahl der Lebensmittel. Wichtig ist auf der einen Seite die persönliche Hygiene des Einzelnen (z. B. Händedesinfektion, Hygienekleidung einschließlich Kopfbedeckung und Einmalhandschuhe, Verzicht auf Schmuck). Auf der anderen Seite muss eine sorfältige Geräte- und Umgebungsreinigung und -desinfektion durchgeführt werden.

Maximale Sicherheit, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit:

schülke bietet wegweisende Hygiene-Lösungen für alle Großküchen. Diese sind speziell ausgelegt auf Krankenhäuser, pflegende Einrichtungen, Seniorenheime und lebensmittelproduzierende Betriebe. Hier trägt das Küchen- und Produktionspersonal täglich die Verantwortung nicht nur für sich selbst, sondern auch für Patienten oder Bewohner.

Als weltweit anerkannter Experte in der Hygiene und Desinfektion legt schülke großen Wert auf den Umweltschutz und darauf, mit unseren Vorräten sparsam umzugehen. Gleichzeitig übernehmen wir unternehmerische Verantwortung für Mitarbeiter und Produkte.



Hygienische Sauberkeit in der ganzen Küche ...



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

vom Geschirr bis zur Fläche.

Gesc	hirr		Anwe	ndung		Eigens	chaften	Auszeicl	nnungen	Seite
		Dosiersystem	Reinigung	Klarspüler	Entkalker Entschäumer	chlorfrei	Wasserhärte	EU-Ecolabel	Nordic Swan Ecolabel	
	dosit® V2 compact dosit® V2 fluid Spender	•								134
	dosit® Reiniger standard		•			•	bis 15 °dH	•		135
	dosit® Reiniger WS		•			•	bis 5 °dH			135
	dosit® Reiniger CL		•				bis 10 °dH			135
<u> </u>	dosit® Klarspüler			•		•	bis 15 °dH			135
gun	dosit® Klarspüler S			•		•	ab 15 °dH			135
Geschirrreinigung	dosit® Entschäumer				•	•	alle			135
į.	Spülmaschinenreiniger A		•			•	alle		•	136
esch	Spülmaschinenreiniger ACL		•				alle			136
G	Klarspülkomponente			•		•	alle		•	136
	Entkalker				•	•	alle			136
	Spülmaschinenreiniger Pulver		•				alle			137
	Manueller Geschirrreiniger		•			•	alle		•	137
	Vorreinigungskomponente		•			•	alle		•	137

Fläch	en		5	pezif	ikatio	n		Lis	stunge	en	Eig scha	en- ften					Wirk	samk	eiten					Seite
in der	Küche	Reinigung	Desinfektion	gebrauchsfertig	Tücher	Konzentrat	für schülke wipes	EuroNorm geprüft	VAH Desinfektions- mittel-Liste	IHO Viruzidie-Liste	alkoholfrei	parfümfrei	bakterizid	MRSA	28	levurozid	fungizid	begrenzt viruzid	Adenoviren	Noroviren	Polyoma SV40	Rotaviren	Vaccinia-Viren	
								WE C	VAH	(110)			BAKT. ZID		ТВ					NORO				
	Fettlöser	•				•					•	•												139
	Grill- und Ofenreiniger	•				•					•													139
5 5	Konvektomatenreiniger	•				•					•													139
iche 3öde	antifect® S	•				•																		139
Reinigung von Flächen, Oberflächen und Böden	Glasreiniger	•		•		•					•													139
	Schneidbrettbleiche	•		•							•													140
läch	Produktionsreiniger A	•				•					•													140
einig berf	s&m Schaumreiniger S	•				•					•													140
œ 0	Spezial Flächenreiniger	•				•					•	•												140
	Chlorschaumreiniger	•				•					•													141
	Wischpflege plus	•				•					•													141
Kombi-	quartacid® plus	•	•			•		•		•			•				•							141
produkt	quartasept® plus	•	•			•		•				•	•				•							141
Pflege	Edelstahlpflege			•																				142
Schnell- desinfek-	antifect® N liquid	•	•	•			•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	142
tion	schülke wipes		•		•		•				•													142
Hygiene- technik	Dosiersysteme – für Flächenreinigung und Desinfektion	dosit	t® des	• sm	8 Sch	aum •	dosi	t® trio																143

Haut	Hände		An۱	ven	dun	g		Listungen				jen							Wi	rksa	ımk	eite	n					Eig	en:	scha	fter	S	Seite
in der	Küche	Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec. Sec.	Desinfektion	Hautpflege	Hautschutz	Hygienische Händedesinfektion	VAH Desinfektionsmittel-Liste	VAH Liste Hygienische Händedesinfektion (EN 1500)	IHO Viruzidie-Liste	RKI / DVV-Listung	Listung gemäß § 18 IfSG Hygienische Händedesin- fektion Wirkungsbereich A	Listung gemäß § 18 lfSG Hygienische Händedesinfektion bei TB	Listung gem. §18 Hygienische Händedes- infektion begrenzt viruzid	Euro Norm geprüft	bakterizid	MRSA	TB	Listeria monocytogenes	EHEC	Helicobacter pylori	begrenztviruzid	viruzid (EN 14476)	Polioviren (n.B.)	Adenoviren	Noroviren	Rotaviren	Herpes-simplex-Virus	farbstofffrei	parfümfrei	seifenfrei	hoher Fettgehalt (W/O)	Scillell ellizierieria (O/ w/)	
Händedes-	desderman® pure					•	VAH	30 Sek.	(H)	LISTED		bei zweimailig	30 Sek.	EAS	30 Sek.		30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	30		ZID 1	1 1 Vin. S		15	30	30	•	•				145
infektion	desderman* pure		-	'		-	-	Sek.	_	-	Sek.	Anwendung	Sek.	_	Sek.	Sek.	Sek.	Sek.	Sek.	Sek.	Sek. 1	∕lin. /	Min. S	ek. S	sek. S	Sek. S	Sek.	_	_				145
lände- und Körper- waschung	sensiva® wash lotion	•																										•	•	•			146
	sensiva® protective cream				•																							•	•		•		146
Haut- pflege	sensiva® protective emulsion																											•	•		•		146
pflege	sensiva® dry skin balm																											•	•		•		147
	sensiva® regeneration cream																											•					147

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Und immer schön sauber bleiben!

Geschirrreinigung professionell durchführen.

Ob von Hand gespült wird oder Geschirrspüler zum Einsatz kommen – Hygiene ist das oberste Gebot und gehört auch in den Verantwortungsbereich von Küchenchef und -personal.

Speziell aufeinander abgestimmte Reinigungsund Desinfektionsmittel vereinfachen die Geschirrreinigung um ein Vielfaches. Im Küchen- und Produktionsbereich treffen wir auf ganz unterschiedliche Arten von Verschmutzungen und Materialien. schülkes Produkt-Sortiment ist entsprechend den Richtlinien der Lebensmittelhygiene entwickelt worden und erfüllt alle Anforderungen einer Großküche.

schülke bietet Ihnen ein breit gefächertes Produktsortiment hochqualitativer Präparate – von Spülmaschinenreinigern mit und ohne Chlor, über Klarspüler und Entkalker bis zu Handspülmitteln.

Highlight in unserem Sortiment: dosit®, das intelligente, computergesteuerte Dosiersystem. Es kombiniert genau aufeinander abgestimmte Reinigungs-

und Pflegeprodukte zur Geschirrreinigung in gewerblichen Spülmaschinen. Es wurde entwickelt von Profis für Profis. Es bietet maximale Sicherheit, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit.

Für weitere Informationen fordern Sie gerne unsere Broschüre an!



Küchenhygiene mit System Mat.-Nr. 900838





Für Geschirr, das sich sehen lassen kann!

dosit® - einzigartiges, vollautomatisches Dosiersystem mit speziell aufeinander abgestimmten Konzentraten.

Mit dosit® von schülke werden Bedienung, Produktanwendung sowie exakte Dosierung spielend einfach und äußerst wirtschaftlich in den Alltag in Küche und Produktion integriert – und das mit glänzendem Erfolg!

Alle Produkte sind frei von NTA, EDTA und Phosphaten.



dosit® V2 compact Spender für dosit® Reiniger standard, dosit® Reiniger WS und dosit® Reiniger CL.



dosit® V2 fluid Spender für dosit® Klarspüler | Klarspüler S und dosit® Entschäumer.

Dosiersysteme – für gewerbliche Spülmaschinen

dosit®-System

Unser Plus

- ein System: die komplette Produktlinie ist als handliche Kartusche erhältlich.
- Die permanente Optimierung der Dosierung durch die Fuzzy Logic Technologie und die integrierte Leitfähigkeitssteuerung ermöglicht jederzeit einen effizienten Ressourceneinsatz und optimale Verbrauchskosten.
- Durch das modulare System sind Sie flexibel: Bis zu vier Feststoff- und vier Flüssigdosieranlagen können mit einer Steuerungseinheit koordiniert werden. Je nach Wasserhärte, Spülgut und Verschmutzungsgrad können Sie flexibel den Einsatz von Produkten wählen. Und darüber hinaus pro Tag bis zu fünf unterschiedliche Dosierungen einstellen.
- Die dosit® V2 Spender sind intuitiv zu bedienen. Die Steuereinheit besitzt ein gut lesbares Display und leicht verständliche Alarmmeldungen – akkustisch und optisch. Der Schulungsaufwand ist gering.

dosit® V2 compact

Modernste computergesteuerte Dosiertechnik zur exakten Dosierung von dosit® Reiniger standard, dosit® Reiniger WS und dosit® Reiniger CL.



Art.-Nr.

60000011

Unser Plus

· festes, blockförmiges Konzentrat wird mit Wasser aus der

Kartusche ausgespült

Produkt

dosit® V2 compact Spender

dosit® V2 fluid

Modernste Dosiertechnik zur exakten Dosierung des dosit® Klarspüler | Klarspüler S und dosit® Entschäumer.



Unser Plus

· die speziell konzipierte Pumpe garantiert eine exakte Dosierung, selbst bei niedrigsten Mengen

Produkt Art.-Nr. dosit® V2 fluid Spender 60000012

Geschirrreinigung – mit dem dosit® - Dosiersystem



dosit® Reiniger standard | WS

Hochkonzentrierte Kompaktreiniger.




- · hervorragend geeignet für Wasserhärten bis 15 °dH
- · kraftvolle Reinigung · extrem wirtschaftlich
- · ausgezeichnet mit dem EU Ecolabel

dosit® Reiniger WS

- · hervorragend geeignet für Wasserhärten bis 5 °dH
- · wirkt besonders kraftvoll und intensiv
- verzögert nachhaltig den Stärkeaufbau

Aut N

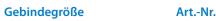

dosit® Reiniger standard

4 x 4 kg

Gebindegröße

4 x 4 kg

4 x 4 kg 185806 dosit® Reiniger WS



dosit® Reiniger CL

Chlorhaltiger*, hochkonzentrierter Kompaktreiniger.



70001670

Unser Plus

- hervorragend geeignet für Wasserhärten bis 10 °dH
- enthält Bleichmittel, daher bestens geeignet gegen Verschmutzungen wie Kaffee- und Teeränder



dosit® Klarspüler Neutraler, hochkonzentrierter Glanztrockner.



Unser Plus

- hervorragend geeignet für Wasserhärten bis 15 °dH
- optimale Ergiebigkeit verhindert Wasserflecken
- · hervorragender Tiefenglanzeffekt



dosit® Klarspüler S

Saurer, hochkonzentrierter Klarspüler.

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


Art.-Nr.

70001656

Unser Plus

- · hervorragend geeignet für Wasserhärten ab 15 °dH • entkalkende Wirkung • verhindert Wasserflecken
- hervorragender Tiefenglanzeffekt verkürzt die Trocknungszeit



Gebindegröße

4 x 2,5 kg

Gebindegröße

2 x 2,5 l

dosit® Entschäumer

Flüssiger Entschäumer.



Art.-Nr.

185807

- Unser Plus
 - vermindert übermäßige Schaumentwicklung
- · keine Schlieren und Schaumrückstände
- · neutraler pH-Wert

* Nicht geeignet für Aluminium und alkaliempfindliche Materialien.

Geschirrreinigung - ohne Dosiersystem



Spülmaschinenreiniger A

Chlorfreie Reinigung von alkalibeständigem Geschirr, rostfreiem Stahl, hitzebeständigem Kunststoff und Porzellan mit stabilen Dekorationen.



- hervorragende fettlösende und proteinentfernende Eigenschaften*
- wirkt dem Aufbau von Proteinstoffen auf Geschirr entgegen
- ausgezeichnet mit dem NORDIC SWAN ECOLABEL

Gebindegröße	ArtNr.
12,5 kg-Kanister	187804
25 kg-Kanister	187805
200 kg-Fass	187806



Spülmaschinenreiniger ACL

Chlorhaltiger* Reiniger für industrielle Geschirrspülmaschinen.



- · hervorragende fettlösende und proteinentfernende Eigenschaften
- entfernt starke Verschmutzungen von Kaffee, Tee, Lippenstift, etc.
- nicht-schäumend

Gebindegroße	ArtNr.
12,5 kg-Kanister	187704
25 kg-Kanister	187705



Klarspülkomponente

Klarspülkomponente für industrielle Geschirrspülmaschinen.



Art.-Nr.

Unser Plus

- beugt Kalkablagerungen vor
- materialschonend
- schaumarme Formulierung
- ausgezeichnet mit dem NORDIC SWAN ECOLABEL



Gebindegröße

10 l-Kanister	144912
200 I-Fass	144913



136

Entkalker

Flüssiger, saurer** Entkalker für industrielle Geschirrspülmaschinen.



Unser Plus

· löst und entfernt effektiv mineralische Verkrustungen und

Kalkablagerungen sowie die darin gebundenen Verunreinigungen

- unterstützt dadurch die Sicherstellung der hygienischen Anforderungen in der Küche
- · wirkt schnell und intensiv
- ohne Schaumbildung

Gebindegröße

Art.-Nr.

10 I-Kanister 146512

Nicht geeignet für Aluminium und alkaliempfindliche Materialien.
 Nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle sowie säureempfindliche Oberflächen.
 In Zweifelsfällen ist vorher die Materialverträglichkeit zu prüfen.

Geschirrreinigung – ohne Dosiersystem

Spülmaschinenreiniger Pulver

Pulverförmiger Spülmaschinenreiniger zum Abwasch von alkalibeständigem Geschirr, rostfreiem Stahl, hitzebeständigem Kunststoff und Porzellan mit stabilen Dekorationen in gewerblichen Geschirrspülmaschinen.



Unser Plus

- · für Aluminium geeignet*
- · einfache Dosierung
- · hervorragende fettlösende und proteinentfernende Eigenschaften



Art.-Nr.

10 kg-Eimer

186701



Manueller Geschirrreiniger

Neutraler Geschirrreiniger zum manuellen Abwasch.



Unser Plus

- besonders gute Reinigungsleistung
- sichert eine gute Abtrocknung von Glas, Geschirr und Werkzeug
- pH-neutral
- · Hochkonzentrat, besonders sparsam und wirtschaftlich
- · ausgezeichnet mit dem NORDIC SWAN ECOLABEL

Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 12 x 500 ml-Flasche	186901



Vorreinigungskomponente

Neutraler Vorreiniger für Geschirr und Besteck zur manuellen Vorbehandlung im Tauchbad.



Unser Plus

- löst schnell Fett, Öl und festgebrannte Essensreste
- pH-neutral
- materialschonend
- · ausgezeichnet mit dem NORDIC SWAN ECOLABEL

Gebindegröße	Geb	ind	leg	rö	ße	
--------------	-----	-----	-----	----	----	--

Art.-Nr. Karton mit 2 x 5 l-Kanister 186902

Zubehör

Kanisterpumpspender 5 I (20 ml / Hub)

* Nicht für alkaliempfindliche Materialien geeignet In Zweifelsfällen ist vorher die Materialverträglichkeit zu prüfen

Glänzende Ergebnisse auf allen Flächen!

Hygienische Sauberkeit in der ganzen Küche vom Fußboden bis zur Arbeitsfläche.

Flächenhygiene ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen die Übertragung von Krankheitserregern, die überall vorkommen können – so auch in der Küche und Produktion.

Um Infektionen zu vermeiden, muss heute mit geeigneten Maßnahmen vorgebeugt werden. Führt man sich dann noch vor Augen, dass Krankheitserreger auf Oberflächen mehrere Monate überleben und von hier z. B. durch Händekontakt auf andere Flächen und Bereiche übertragen werden können, empfiehlt sich eine gründliche, flächendeckende, desinfizierende Reinigung. Nur so lassen sich Infektionsketten unterbrechen.

schülke bietet auch hier ein aufeinander abgestimmtes Komplettprogramm für alle Küchen- und Produktionsflächen. Hochqualitative Produkte, die auch für das Personal ein rundum sauberes Umfeld schaffen.





Reinigung von Flächen, Oberflächen und Böden



Fettlöser

Entfettung und Reinigung von Oberflächen.



Art.-Nr.

194501

Unser Plus

· löst und entfernt alle fettigen Verschmutzungen und Ablagerungen von Küchenoberflächen und Küchenzubehör*

Karton mit 12 x 500 ml-Flasche

Karton mit 12 x 1 l-Flasche

Art.-Nr.

187901

Grill- und Ofenreiniger

Stark alkalisches* Mittel zur Reinigung von stark verschmutzten Öfen, Grills, Backöfen, Konvektomaten etc. in der Lebensmittelindustrie.

Gebindegröße

· löst Verschmutzungen schnell und effektiv

als Konzentrat sowie mit Wasser verdünnt anwendbar

· leicht aufzutragen und gut abspülbar



Konvektomatenreiniger

Stark alkalisches Mittel zur Reinigung von stark verschmutzten Konvektomaten*, Öfen, Grills, Backöfen etc. in der Lebensmittelindustrie.



Unser Plus

Unser Plus

· löst Verschmutzungen schnell und effektiv

• als Konzentrat sowie mit Wasser verdünnt anwendbar

• leicht aufzutragen und gut abspülbar

Gebindegröße Art.-Nr.

Karton mit 2 x 5 l-Kanister 187601

Zubehör

Kanisterpumpspender 5 I (20 ml / Hub) 70001217



antifect® S

Sauer eingestelltes Konzentrat zur hygienischen Flächenreinigung.



Unser Plus

• saurer pH-Wert – beugt Kalkablagerungen vor

• für alle Bereiche mit Anspruch auf hygienische Sauberkeit

aldehydfrei

Gebindegröße	ArtNr.
Karton mit 5 x 2 l-Flasche	115702
10 l-Kanister	115703





Zur streifenfreien Reinigung aller Glasoberflächen, Spiegel, Kunststoffe, Armaturen etc.



Unser Plus

trocknet streifenfrei

• entfernt zuverlässig Verschmutzungen wie Fingerabdrücke und Wasserspritzer etc.

· farblos und parfümfrei, ohne Ammoniakgeruch

• ausgezeichnet mit dem NORDIC SWAN ECOLABEL

Gebindegröße Art.-Nr. Karton mit 12 x 1 l-Flasche 188002

Nicht geeignet für Aluminium und alkaliempfindliche Materialien. In Zweifelsfällen ist vorher die Materialverträglichkeit zu prüfen.

Reinigung von Flächen, Oberflächen und Böden



Schneidbrettbleiche

Alkalischer*, chlorhaltiger Reiniger für die Entfernung von Verfärbungen auf Schneidbrettern.



Unser Plus

gebrauchsfertig

Gebindegröße

Gebindegröße

10 I-Kanister

Karton mit 12 x 1 l-Flasche

Art.-Nr. 187401



Produktionsreiniger A

Stark alkalisches* Reinigungsmittel für alle Arten von Lebensmittelschmutz.



Art.-Nr.

188202

Unser Plus

• löst schnell und effektiv alle Arten von Lebensmittelschmutz

- · vielseitig einsetzbar in Küche und Produktion
- für alle Flächen und Böden und wasserfesten Oberflächen
- · sehr gut als Vorreiniger im Tauchbad einsetzbar
- hervorragende Aufschäumeigenschaften



140

s&m Schaumreiniger S

Saurer Spezialreiniger für Flächen, Maschinen und Gerätschaften in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.



Art.-Nr.

107511

Unser Plus

farbstoff- und parfümfrei

· saurer pH-Wert, löst Kalkablagerungen, Rostflecken und mineralische Ablagerungen

- hervorragende Aufschäumeigenschaften
- lebensmittelbereichsgerecht



Spezial Flächenreiniger

Alkalisches* Konzentrat zur Entfettung und Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen.



Unser Plus

• sehr schnelle und effektive Reinigungsleistung

· löst problemlos Fette und Proteine

geruchsneutral

• geeignet für manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung



Gebindegröße


Gebindegröße

10 I-Kanister

Art.-Nr.

10 I-Kanister

143700

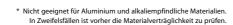

Reinigung von Flächen, Oberflächen und Böden



Chlorschaumreiniger

Alkalischer, chlorhaltiger* Schaumreiniger zur Entfettung und Reinigung von Oberflächen.



Unser Plus

• schnelle und effektive Reinigung von stark verschmutzten und verfärbten Flächen wie Maschinen, Anlagen, Fussböden, Wänden etc.

• ergibt einen feinporigen, durchdringenden Schaum, der besonders gut an senkrechten Oberflächen haftet





Wischpflege plus

Zur kraftvollen, schonenden Reinigung von Böden und Oberflächen, z. B. in der Kantine



Unser Plus

antistatisch

· mit Glanzeffekt

· sehr gute Reinigungsleistung

• geeignet für die manuelle und maschinelle Wischpflege

|--|

Gebindegröße 10 I-Kanister

Gebindegröße

5 l-Kanister

20 I-Kanister

Karton mit 5 x 2 I-Flasche

174604

Art.-Nr.

Desinfektion und Reinigung - Kombiprodukt



quartacid® plus

Sauer eingestelltes Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion in einem Schritt.



Unser Plus

- · Desinfektion und Reinigung in einem Schritt
- saurer pH-Wert, beugt Kalkablagerungen vor
- · hervorragende Aufschäumeigenschaften
- · breite mikrobiologische Wirksamkeit auch gegenüber lebensmittelbereichsspezifischen Problemkeimen (inkl. Salmonellen, Listerien)
- · farbstoff- und parfümfrei







quartasept® plus

Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung im Großküchenbereich und anderen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung.



Art.-Nr.

114302

114306

114307

Unser Plus

lebensmittelbereichsgerecht

• wirksam gegen Bakterien (inkl. Salmonellen, Listerien) und Pilze (inkl. Aspergillus brasiliensis)

• leicht alkalisch eingestellter pH-Wert fördert gute Löslichkeit von Fett- und Ölverschmutzungen

· farbstoff- und parfümfrei

• hervorragende Aufschäumeigenschaften



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Pflege von Flächen und Oberflächen



Edelstahlpflege

Zur Pflege und Aufrechterhaltung von rostfreiem Stahl.



Unser Plus

- · verleiht Glanz, auch bei bereits mattiertem Stahl
- macht rostfreien Stahl widerstandsfähig gegenüber Schmutz
- · bewahrt die natürliche Struktur und wirkt Mattierungen entgegen

Art.-Nr.

188101

Schnelldesinfektion



antifect® N liquid

Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen.



Art.-Nr.

Art.-Nr.

Unser Plus

- gebrauchsfertig
- lebensmittelbereichsgerecht, farbstoff- und parfümfrei
- kurze Einwirkzeiten und umfangreiche Wirkung gegenüber Bakterien, Pilzen und behüllten Viren
- schnelle Abtrocknung



Karton mit 20 x 500 ml-Flasche	113939
Karton mit 10 x 1 l-Flasche	113940
5 l-Kanister	113941
Zubehör	
Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche	134411
Wandhalterung 1 l-Vierkantflasche 134	



· schnell und praktisch in Bereichen mit möglichem Infektionsrisiko

schülke wipes

Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von schülke Flächendesinfektionsmitteln.



- umfassend einsetzbar
- einfache Handhabung
- · Standzeit mit angesetzter Lösung oder Gebrauchslösung: bis zu 28 Tage, z. B. terralin® protect
- flusenfrei auf der Oberfläche
- · verschiedene Rollengrößen
- Medizinproduktstatus CE



Gebindegröße

Gebindegröße

Gebindegröße

Karton mit 10 x 500 ml-Flasche

schülke wipes Feuchttuch-Spendersystem

Nation mil.	3 x speridereimer	i x speridereimer
schülke wipes 40	70000163	119530
schülke wipes 100/111	70000162	119523
Karton mit:	5 x Spenderboxen	1 x Spenderbox
schülke wipes 70	70000160	119540
schülke wipes 100/111	70000161	119541

Tuchroller

schülke wipes 40 (Karton mit 10 x 40 Tücher Tuchrollen)	119532
schülke wipes 70 (Karton mit 6 x 70 Tücher Tuchrollen)	119505
schülke wipes 100 (Karton mit 6 x 100 Tücher Tuchroller)119503
schülke wipes 111 (Karton mit 6 x 111 Tücher Tuchroller	119506

Zubehör

Wandhalterung Eimer schülke wipes	134430
Wandhalterung Box schülke wipes	134435

Mehr Infos unter: www.schuelke-wipes.de

Dosiersysteme - für Flächenreinigung und Desinfektion

dosit® des

Dezentrales Dosiergerät zur Herstellung und Ausbringung wässriger Desinfektionsmittellösungen.



644017

Unser Plus

- · mikroprozessorgesteuertes System
- Überwachung des kompletten Dosiervorgangs durch Sensoren
- Dosierbereich 0,25 5 %, Dosiertoleranz + 5 %, in 0,05 % Schritten einstellha
- besonders bedienerfreundlich durch übersichtliches Bedienungsfeld und leichten Kanisterwechsel
- nach RKI-Richtlinie geprüft (Zertifikat-Nr.: 99189)
- · Langzeitprüfung durch RKI-zertifiziertes Labor
- Sauglanze und Kanisterhalter wahlweise links oder rechts am Gerät montierbar
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) sowie DIN EN 1717
- · Zulassung gemäß KTW Leitlinie W270
- automatische Abschaltung bei Konzentrat- bzw. Wassermangel sowie Konzentratflussunterbrechung
- Standzeitüberwachung gemäß Empfehlung des VAH

Produkt	ArtNr
dosit® des	644000

Abschließbare Kanisterhalterung

Zubehör

Abmessungen | Technische Daten Breite x Tiefe x Höhe: 51 x 18 x 57,8 cm

Abgabemenge:	7 Liter/Minute
Netzspannung:	AC 230 V - 50 Hz
Leistung: 75	
Wasseranschluss:	3/8" Außengewinde

sm 8 Schaum

Dosiergerät zur Herstellung und Ausbringung wässriger Desinfektionsmittellösungen.



Unser Plus

- Betrieb nur mit Wasserenergie
- Spülen, Schäumen oder Versprühen in Einem
- · einfache Bedienung durch Hebelschaltung
- Dosierung stufenlos einstellbar bis 2 %
- kein Nachfüllen nur Austausch des Produktgebindes
- · Montageplatte und Haube aus Edelstahl
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) sowie DIN EN 1717
- · Ausbringpistole mit Spüldüsen, Schaumdüse und ergonomischer Verlängerungslanze

Produkt	ArtNr.
sm 8° Schaum	626000

Abmessungen | Technische Daten

Breite x Here x Hone:	28,3 X 10 X 40 CM
Abgabemenge:	ca. 10 l / Minute bei 3 bar
Systemtrennung:	Systemtrenner nach DIN 1988, DVGW-geprüft
Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde

dosit® trio

Stationäres Zumischgerät zur Herstellung von Reinigungsund/oder Desinfektionsmittellösungen im Küchenbereich.



Unser Plus

- Betrieb nur mit Wasserenergie
- einfache Bedienung
- · drei verschiedene Lösungen mit unabhängigen Dosierungen
- kein Umfüllen des Produktes notwendig nur Austausch des Produktgebindes
- · Gehäuserückwand und Haube aus Edelstahl
- Systemtrennung nach DIN 1988, Teil 4 (TRWI) sowie DIN EN1717
- Lösungsabgabe über Schwenkauslauf so lange der Knopf gedrückt wird
- keine Vermischung der Lösungen innerhalb der Anlage möglich

Produkt Art.-Nr. 627500 dosit® trio

Abmessungen | Technische Daten Breite x Tiefe x Höhe:

Breite x Tiefe x Höhe:	28,3 x 10 x 40 cm
Abgabemenge:	ca. 7 Liter / Minute
Systemtrennung:	Systemtrenner nach DIN 1988, DVGW-geprüft
Wasseranschluss:	1/2" Außengewinde

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gepflegte Haut optimiert die Händehygiene.

Unsere Hände bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit in puncto Reinigung, Desinfektion und Pflege – zum eigenen Schutz und dem der Patienten.

Wissenschaftlich ist klar: Die Hände sind der wichtigste Ausgangspunkt für die Übertragung von Krankheitserregern! In Küche und Produktion können sie sich beispielsweise im Spülwasser, auf Flächen, Türklinken oder Geschirr tummeln und von dort unbemerkt auf die Hände gelangen.

Händehygiene à la Carte.

Händehygiene ist eine der wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen, um zu verhindern, dass Krankheitserreger übertragen werden. Richtig durchgeführt, kann sie diese Keime um mindestens 99,99 % reduzieren.

Gepflegte Hände sind mehr als ein schöner Anblick!

"Je gesünder die Haut, je glatter, unverletzter die Oberfläche, desto weniger Keime werden haften bleiben. Es ist daher nicht nur für das subjektive Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung, sondern vor allem für die Effektivität desinfizierender Verfahren, dass die Hände nicht nur desinfiziert und gewaschen, sondern genauso konsequent gepflegt werden."*

* Quelle: EURIDIKI. Ein Leitfaden zur hygienischen Händedesinfektion, mhp-Verlag 1996.

Händedesinfektion

desderman® pure

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Präparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

Unser Plus

- viruzid gemäß EN 14476
- inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem
- RKI-Liste gem. §18 IfSG (begrenzt viruzid)



VIRU ZID

Gebindegröße

Art.-Nr.*

Karton mit 30 x 100 ml-Taschenflasche 116823 Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche 116802 Karton mit 10 x 1 I-Spenderflasche 116803 Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche

Karton mit 10 x 1 I-hyclick® Spenderflasche 70000755

Karton mit 20 x 500 ml-hyclick® Spenderflasche 70000754



Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110

Die 6 Schritte der hygienischen Händedesinfektion:

Achten Sie beim Einreiben darauf, dass die Hände bis zu den Handgelenken über 30 Sekunden vollständig benetzt und feucht sind. Bei Bedarf erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen.



Handfläche auf Handfläche, zusätzlich gegebenenfalls die Handgelenke.



Rechte Handfläche über linken Handrücken und umgekehrt.



Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern.



Außenseite der verschränkten Finger auf gegenüberliegende Handflächen.



Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche - und umgekehrt.



Kreisendes Reiben mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche – und umgekehrt.

* gemäß DVV-/RKI-Leitlinie 12/2014

schülke -}

Hände- und Körperwaschung





sensiva® wash lotion

Hautfreundliche farbstoff- und parfümfreie Waschlotion.



Art.-Nr.

114006

114002

114005

114003

70000137

70000138

Unser Plus

- seifenfreie Waschlotion auf Basis hautverträglicher Tenside
- · schont die Haut
- · reinigt mild
- · farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft



5 I-Sparkanister Karton mit 10 x 1 l-Flasche hyclick® Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®

Gebindegröße

Gebindegröße

Zubehör

Karton mit 30 x 100 ml-Tube

Gebindegröße



Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche

Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche

Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche



Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110

Händepflege



Besonders hautverträgliche farbstoff- und parfümfreie Schutzcreme.



Art.-Nr.

129801

Hautschutz J

Unser Plus

- · stärkt die natürliche Hautbarriere
- Schutzcreme W/O (gem. TRGS 401)
- zieht schnell ein gut verteilbar
- · Hautpflege kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden
- · farbstoff- und parfümfrei
- · dermatologisch geprüft

sensiva® protective emulsion

Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut.



Art.-Nr.

70000155

Unser Plus

- · leichte Pflege & Schutz
- Schutzlotion O/W
- zieht schnell ein
- · gut verteilbar
- · Hautschutz kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Händepflege

sensiva® dry skin balm

Farbstoff- und parfümfreier Pflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut.



Art.-Nr.

Unser Plus

- · intensive Pflege
- · spendet Feuchtigkeit
- · gut verteilbar
- · farbstoff- und parfümfrei

· dermatologisch geprüft

Gebindegröße

Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche 141620 Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche 141621

Zubehör

Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110



Art.-Nr.

sensiva® regeneration cream

Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut.

Unser Plus

- · reichhaltige Regenerationscreme
- gut verteilbar
- farbstoff- und parfümfrei
- · dermatologisch geprüft

Gebindegröße

Karton mit 30 x 50 ml-Tube 100301

Zubehör

Passende Wandhalterungen für die 500 ml- und 1 l-Flaschen. Sowie geeignete Spender und Applikationshilfen – zum praktischen Gebrauch der Produkte.











Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. §4 HWG

desderman® pure:
- Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/ $octadecyl) \ (2-ethylhexanoat), Sorbitol-L\"{o}sung \ 70\% \ (kristallisierend) \ (Ph.Eur.), 2-Propanol \ (Ph.Eur.), gereinigtes \ Wasser. - Anwendungsgebiete: \ Hygienische und chirurgische \ H\"{a}ndedesinfektion. Ethanol \ (Ph.Eur.), 2-Propanol \ (Ph.Eur.), 2-Propanol$ $und \ Biphenyl-2-ol \ wirken gegen \ Bakterien \ (inkl. \ Mykobakterien), Pilze \ und \ viele \ Viren. \ Die \ Wirksamkeit \ von \ des derman* pure gegen \ Viren \ schließt \ behüllte \ Viren \ (Klassifizierung "begrenzt viruzid")* \ und \ viren \ viruzid")* \ und \ viruzid")* \ und \ viruzid")* \ und \ viren \ viruzid")* \ und \ viruzid"$ igen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. • Nebe gen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missempfindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 8-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. • Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman* pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16°C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen

* Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus

utischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH · 22840 Norderstedt · Tel: +49 40 521 00-0 · Fax: +49 40 521 00-318




Wandhalterung 500 ml-Vierkantflasche Spender, Wandhalter, Applikationshilfen ab Seite 110







146

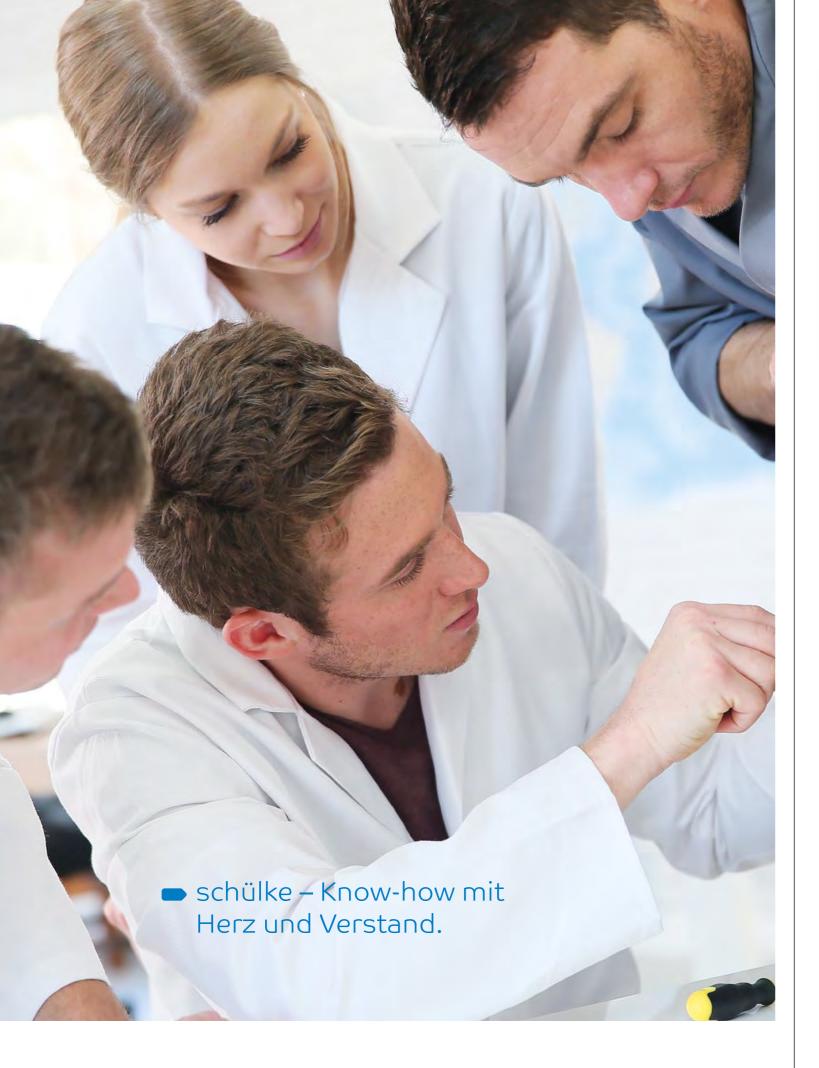


148

Eine rundum saubere Leistung.

Nicht nur Hygieneprodukte und -technik, auch unser Leistungsspektrum in punkto Service und Beratung wird ständig erweitert.

Mit 5 Fachbereichen – siehe Grafik – bietet unser Leistungspaket umfangreiche Information zu allen relevanten Hygienethemen, Know-how auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und ausgefeilte Unterstützung in allen Bereichen.

Unser Anliegen ist es, alle Anforderungen unserer Kunden optimal zu erfüllen. Dabei zählen wir nach wie vor auf den Austausch mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern – ein schülke-Prinzip, das bisher bereits erfolgreich gelebt wurde.

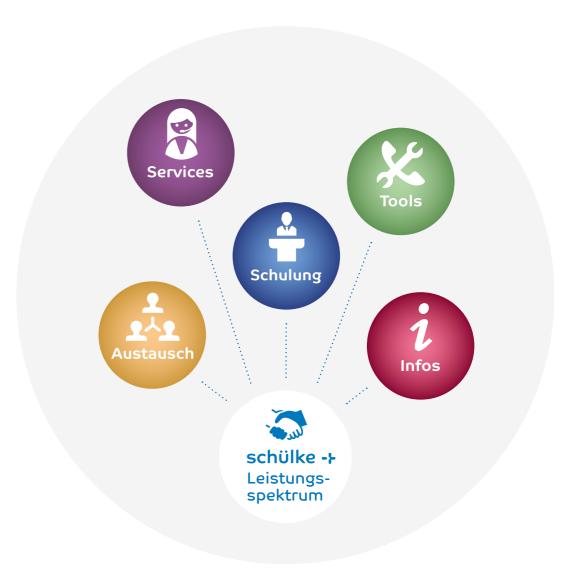

schülke -}

Support auf allen Ebenen ...



Außendienst	Der Außendienst, der sich vorort um Ihre Bedürfnisse kümmert	152
Customer Sales Service	Antworten zu Produkten, Anwendungen oder auch behördlichen Auflagen und Vorgaben https://www.schuelke.com/de-de/infektionspraevention/Service/Produktanwendungsberatung.php	152
Serviceleistungen Hygienetechnik	Exzellenter Service für Ihre Hygiene- und Desinfektionstechnik https://www.schuelke.com/de-de/Infektionspraevention/Service/Kundendienst_Hygienetechnik.php	154
Hygieneberatung	Umfangreiche Beratung durch erfahrene Hygienefachkräfte https://www.schuelke.com/de-de/Infektionspraevention/Service/Hygieneberatung.php	154
SDS schülke Decon Service	Schnelle, effiziente und rückstandsfreie Raum- dekontamination durch modernste HPV-Technologie https://www.schuelke.com/de-de/Industriehygiene/Service/Raumdekontamination.php	155
Hygieneplan	Kompetente Unterstützung Ihres Hygieneplan- Managements https://www.mein-hygieneplan.de	157



hygiene club	Eine Plattform, um sich mit anderen Hygieneexperten auszutauschen https://www.hygiene-club.com/hygiene-club/	158
food club	Eine Plattform, um sich mit anderen Hygieneexperten aus der Lebensmittelindustrie auszutauschen http://www.food-club.de/	159
pharma club	Eine Plattform, um sich mit anderen Hygieneexperten aus der Pharmaindustrie auszutauschen http://www.pharma-club.de/pharma-club/	159



Fort- und Weiterbildungen zum Thema Hygiene	Fundierte Schulungen durch unseren Außendienst zum Thema Hygiene in der Produktion	160
OPAL Akademie	Weiterbildungsmöglichkeiten für medizinisches Personal http://opal-gmbh.com/opal/akademie/index.php	161

... der keine Wünsche offen lässt.



Konzentratrechner	Rechnen Sie aus, in welcher Konzentration ein Produkt angewendet werden muss http://www.konzentrat-rechner-schuelke.de/dosage-calculator-schuelke/	162
Downloadcenter	Bilder, Broschüren, Flyer oder sonstige Materialien zu unseren Produkten https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/downloadcenter/index.php?navid=990696186444	163
schülke Sticker	Sticker, die Ihnen den Arbeitsprozess leichter machen	163



		Seite
Wissensportal	Alles zu Infektionsprävention, Industriehygiene und Spezialitätenchemie https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/Wissensportal-Startseite.php	165
Informationsportale	Detaillierte Produktinformation zu unseren 'Top-Produkten' https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/article/Informationsportale.php	165
Informationen: Infektionserreger – Die Verursacher von Infektionen	Krankheiten und deren Erreger https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/article/Infektionserreger.php	165
Publikationen	Publikationen zum aktuellen Stand der Forschung https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/article/Publikationen.php	165
News & Views by Dr. Siebert	Neues zu aktuellen Hygienethemen https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/article/News-and-Views-by-Dr-Siebert.php	166
Wundmanagement	Informationen zu Wundarten, Wundheilung und Wundbehandlung https://www.schuelke.com/de-de/Wissensportal/article/Wundmanagement.php	166
Flächenhygiene	Informationen rund um die Flächenhygiene www.flaechendesinfektion-online.de	166
Nachhaltigkeit	Informationen zur Nachhaltigkeit https://www.schuelke.com/de-de/unternehmen/Verantwortung/Nachhaltigkeit.php	167
Qualitätsmanagement	Vom Produkt bis zur Nachhaltigkeit	168
schülke online	schülke im World Wide Web	170



Interviews	Stimmungen und Meinungen	172

.... dass wir sie nicht im Einzelnen vorstellen können.

Unser stetig wachsender Außendienst bringt von Haus aus umfangreiches Know-how mit, wird konsequent geschult und ist somit fit in allen Belangen der Hygiene. Zuverlässigkeit und Termintreue gehören unbedingt dazu – und kleine Einsatzgebiete unserer Mitarbeiter sorgen für schnelle Reaktionszeiten.



Hygieneberatung und Schulungen durch erfahrene Mitarbeiter aus allen Bereichen des Hygienemanagements vor Ort – auch das gehört selbstverständlich zu unserem Service. Ebenso unterstützen wir unsere Kunden individuell bei der Umsetzung von Hygienekonzepten oder wirken tatkräftig bei Aktionstagen mit. Ergänzt werden diese Leistungen durch Vorträge im Hause schülke (Hamburg / Frankfurt), die hygienerelevante Entwicklungen beinhalten und auch innovative Produkte und Methoden vorstellen.

Service - mehr ist besser.

Customer Sales Service

Getreu diesem Motto engagieren wir uns für unsere Kunden mit einem Kundenservice, der auf allen hygienerelevanten Gebieten zuhause ist.

Unsere Kundenbetreuung

Mehr als 220 schülke Produkte plus Zubehör – da könnte sich schon mal die eine oder andere Frage, beispielsweise zur richtigen Präparatewahl,

Dosierung oder auch der Anwendung, stellen. Unsere telefonische Produktberatung steht Ihnen dabei ganz unkompliziert zur Seite. → weiter nächste Seite

Dienst am Kunden heißt auch ...

... sich Zeit nehmen für die Kunden. Und die haben wir für Sie. Immer! Telefonisch, persönlich und bei Notfällen auch am Wochenende.

Sei es in puncto Beratung, technische Lösungen und Anwendung. (Darüber hinaus unterstützen wir Sie mit Schulungen rund um die Themen Desinfektion, Infektionsprävention und Krankenhaushygiene.)

Das Wesentliche in Kürze:

- Beratung: Telefonische Produktanwendungsberatung, Hygieneberatung vor Ort
- Technischer Service: Inspektion, Wartung, Instandhaltung aller technischen Geräte / Dosiergeräte
- Regelmäßig aktuelle Informationen aus Wissenschaft und Rechtsprechung
- Datenbanken / kostenloser Download
- Kundenschulungen

Außerdem finden Sie aktuelle Informationen rund um die Hygiene, neuste wissenschaftliche Erkenntnisse und gültige Rechtsprechung unter "Service" auf www.schuelke.com. Dort sind auch Datenbanken mit Dokumenten wie Gutachten oder auch Sicherheitsdatenblätter zum kostenlosen Download hinterlegt.

Hygiene nach Plan

Online warten unter www.mein-hygieneplan.de diverse branchenspezifische Standardhygienepläne auf Sie, die individuell angepasst werden können.

Gut zu wissen:

Wir haben eines der modernsten und größten Forschungslabore der Branche, das auch für Ihre Belange arbeitet. So z. B. zur Untersuchung von Wasserproben bei Hygieneproblemen.



Customer Sales Service:

Telefon: +49 40 521 00-666 Telefax: + 49 40 521 00-660

E-Mail: info@schuelke.com





Senior Manager Customer Sales Service

Exzellenter Service für Ihre Dosiertechnik.

Serviceleistungen Hygienetechnik

Für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unserer Kunden.

Von der Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Dosiertechnik bis zur Planung und Umsetzung individueller Spezialanlagen – praxisorientierte Beratung und kompetente technische Unterstützung sind unseren Kunden sicher! → weiter nächste Seite

Umfangreiche technische Beratung:

Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden. Telefonisch, persönlich und in Notfällen auch am Wochenende.

Selbstverständlich gehört zu unserem Service auch ein qualifizierter Kundendienst, der stets auf dem neusten Stand der Technik ist.

Unsere Service-Techniker sind Spezialisten für Hygiene- und Desinfektionstechnik.

Ihre Kompetenz in den Bereichen Desinfektion, Elektro-, Installations- und Steuerungstechnik paart sich mit bester handwerklicher Arbeit.

- Technische Beratung von der Planung bis zur Einweisung der Betreiber.
- Unser Technik-Support übernimmt für Sie die Inbetriebnahme, Inspektion und Instandhaltung von zentralen wie dezentralen Dosierautomaten gem. DIN 31051 – selbstverständlich auch für spezielle Desinfektionstechnologien in medizinischen Einrichtungen und Industrie. Nicht zu vergessen die technische Betreuung von Dosiersystemen in Bettenwaschanlagen, Containerwaschstraßen, Instrumentenaufbereitungsanlagen.
- Unser Team betreut, repariert und wartet auch die auf dem Markt befindlichen Geräte und Anlagen anderer Fabrikate.



(g)

Sales Service Technik:

Telefon: + 49 40 521 00-112 Telefax: + 49 40 521 00-228

E-Mail: sales_service_so-ts.sm@schuelke.com

Post:

Schülke & Mayr GmbH Vertrieb Hygienetechnik 22840 Norderstedt





Schnelle, effiziente und rückstandsfreie Raumdekontamination.



SDS – schülke Decon Service

Als Ergänzung zur manuellen Desinfektion von Oberflächen in Räumen bietet schülke Ihnen die Bio-Dekontamination von Räumen mit HPV-Technologie als Rundum-Service an.

Der schülke Decon Service (SDS) basiert auf der modernen und hochwirksamen HPV-Technologie, bei der hochreines Wasserstoffperoxid verdampft wird. HPV steht hierbei für Hydrogene Peroxide Vapour. Diese Technologie gewährleistet vollständige mikrobiologische Wirksamkeit bei sehr guter Materialverträglichkeit.

Die HPV-Technologie wird als Maßnahme zur Raumdekontamination in der Liste des Robert Koch-Institut (RKI, RKI-Liste 3.3.2) genannt.Durch den vollständigen Zerfall von Wasserstoffperoxid zu Wasser und Sauerstoff am Ende des Prozesses ist die HPV-Technologie besonders umweltfreundlich und rückstandsfrei.

schülke Decon Prozess

Die H₂O₂-Dekontamination mit dem SDS eignet sich zur Desinfektion von Räumen nahezu jeder Größenordnung. Er umfasst den gesamten Ablauf – von der Vorbereitung der Räume über die Durchführung durch unsere speziell geschulten Techniker bis hin zur Auswertung und Dokumentation. Der Gesamterfolg der Dekontamination wird mit Hilfe von Bioindikatoren mit 6-log *Geobacillus stearothermophilus* Sporen direkt in unserem Labor überprüft.

$\label{thm:phasen} \mbox{ Die Phasen der Dekontamination mit HPV-Technologie. }$





Die Vorteile auf einen Blick:

- modernste Hochleistungs-Dekontamination (inkl. Sporen) von Räumen und Inventar
- besonders hohe Wirksamkeit und Materialverträglichkeit (auch empfindliche Elektronik)
- umweltfreundlich und rückstandsfrei
- Rundum-Service durch unser geschultes Personal
- Erfolgsmessung und Abschlussbericht

Das besondere Plus für Sie:

 schülke bietet Ihnen die komplette Raumdekontamination inklusive Abschlussbericht als Service an.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.schuelke-decon-service.de oder rufen Sie uns an: + 49 40 52100-8666



Von der Planung über die Durchführung bis zur Dokumentation.



Für Sie konzipiert: mein-hygieneplan.de



Hygieneplan

So pflegeleicht waren Hygienepläne noch nie!

schülke hat auf Basis gültiger Rechtsvorschriften ein Hygieneplan-System eingeführt, mit dem wir Ihr Qualitätsmanagement unterstützen.

- über 180 topaktuelle Pläne für alle Branchen
- automatischer Update-Alarm bei gesetzlichen Veränderungen
- einfach einloggen und passwort-gesicherten Hygieneplan-Account einrichten
- Hygienepläne individuell anpassen, im eigenen Account speichern und ausdrucken
- mit der automatischen Alarm-Funktion keine Hygieneplan-Änderung mehr verpassen
- kostenlos
- mit dem Know-how des Hygienespezialisten schülke

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline:

Telefon: + 49 40 521 00 - 106 Mo bis Do 7:00 - 15:30 Uhr Fr 7:00 - 14:00 Uhr


E-Mail: meinhygieneplan@schuelke.com

Überzeugen Sie sich auf www.mein-hygieneplan.de







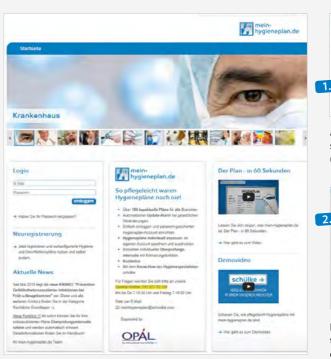



Alle Pläne sind individuell in "meine Pläne" abspeicherbar. Änderungen werden sofort per E-Mail übermittelt und hier angezeigt.



Den für Ihren Bereich individuell zusammengestellten und geänderten Plan können Sie nun einsehen, downloaden und verwenden.



Wissensaustausch

Wir haben 2017 den hygiene club ins Leben gerufen – ein Netzwerk, das Hygieneexperten in ganz Deutschland verbindet.



Wissenstransfer und Netzwerken im hygiene club.

Der hygiene club ist eine Veranstaltungsserie die 2017 erstmalig stattfgefunden hat und sich an Hygieneexperten aus Krankenhäusern in Deutschland richtet. Die Plattform www. hygiene-club.com erleichtert die Information, Anmeldung und den gegenseitigen Austausch. Zukünftig wird die Homepage um weitere regionale Netzwerktreffen erweitert.

Das professionelle Einhalten der Richtlinien und Empfehlungen zu Hygienemaßnahmen ist zum Schutz der Patienten und des Personals essenziell. Bei steigenden Anforderungen an Desinfektionsmaßnahmen und der vorherrschenden dünnen Personaldecke in deutschen Krankenhäusern gestaltet sich dieses Ziel jedoch als Herausforderung.

Die Verknüpfung von spannenden Fachvorträgen zu diesem Thema und dem Austausch zwischen Hygieneexperten bietet die Möglichkeit neue Perspektiven zu entdecken, in der Gemeinschaft Probleme zu bewältigen und von den Erfahrungen aller Teilnehmer zu profitieren.

Im Netzwerk erhalten die Teilnehmer wichtige Informationen, Tipps & Tricks und können dabei ihre unterschiedlichsten Erfahrungen und Wissen teilen. So bereichert jede/r Einzelne das Netzwerk hygiene club mit Fragen und Erfahrungen.

Für weitere Informationen zu den Veranstaltungen besuchen Sie die Homepage des hygiene clubs.

www.hygiene-club.com



Clubbing à la schülke.





Was ist der food club?

Die Themenvielfalt, mit der sich die Lebensmittelindustrie auseinandersetzen muss um wettbewerbsfähig und erfolgreich am Markt zu bleiben, wird immer größer. Zeitgleich müssen Wirtschaftlichkeit, die hohen Ansprüche des Verbrauchers und die zunehmenden Vorschriften vereint werden.

Ein fachlicher Wissenstransfer unter Kollegen und ein gutes Netzwerk innerhalb der Branche sowie der Input durch Experten werden dabei immer wichtiger. – Dazu möchten wir Ihnen mit der Veranstaltungsreihe food club die Möglichkeit bieten.

www.food-club.de



Hohe Anforderungen im komplexen Umfeld.

Die Anforderungen an die Sicherstellung der Hygienestandards werden immer höher, die regelmäßigen Novellierungen des GMP-Leitfadens undurchsichtiger, die Ansprüche der Sie inspizierenden Behörden und Kunden immer spezieller.

Schnelles und professionelles Handeln ist für das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften essenziell. Doch stellt auch dies aufgrund der Vielzahl detaillierter Vorschriften auch eine immer größere Herausforderung dar.

Sich untereinander innerhalb der Branche auszutauschen und von Experten zu lernen, ist unter diesem Aspekt wichtiger denn je. Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe pharma club haben Sie die Möglichkeit mit anderen Teilnehmern aus ähnlichem beruflichem Umfeld an spannenden Fachvorträgen und praxisrelevanten Workshops teilzunehmen.

www.pharma-club.de



Daher ist die kontinuierliche Fortbildung des Personals in der Produktion in allen Bereichen des Gesundheitswesens unumgänglich. Unsere Hygiene-Experten im Außendienst stehen Ihren Mitarbeitern dabei zur Seite: entweder durch direkte Anwendungsbeispiele Vorort oder durch Vermittlung von fundierten Schulungen zu den verschiedensten Hygienethemen.

schülke bietet sowohl für die Hände- als auch für die Flächendesinfektion hochqualitative Produkte,

Spender und Desinfektionstechnologien. Um eine sichere Prophylaxe und Anwendung zu gewährleisten, sollte das Personal immer auf dem neuesten Wissenstand zum Thema Reinigung und Desinfektion von Händen wie Flächen, Instrumenten und im Wundmanagement sein. Dazu zählt neben kontinuierlicher Mitarbeiterinformation und -training auch die Weiterbildung. Hier bietet unser Partnerunternehmen, die OPAL-Akademie, ein breitgefächertes Angebot zu allen relevanten Hygienethemen











Beispiel Händedesinfektion:

In der Theorie werden z. B. Grundkenntnisse des "Wie" und "Warum" aufgefrischt, Wirkweise von Produkten und Gefahren bei Nichtanwendung erläutert. Praktisch wird u. a. die Händedesinfektion Schritt für Schritt durchgeführt. Weiter kommen 1. die UV-Lampe – sie zeigt nicht ausreichend desinfizierte Hautareale an – und 2. die Skin Diagnostic® (Sebumeter) zum Einsatz, mit der die Hautbeschaffenheit nach Desinfektion und Pflege bestimmt werden kann.

Beispiel Flächendesinfektion:

Theoretische Grundlagenschulung u. a. zu Produkten und deren Inhaltsstoffen, Erklärung von Wischtechniken und Handhabung von Applikationen. Praktisch werden die einzelnen Reinigungs- und Desinfektionsschritte vorgeführt und geübt. Auch hier kommt die UV-Lampe zur Kontrolle der desinfizierten Flächen zum Einsatz. Darüber hinaus wird mittels mikrocount® Dipslides Keimindikatoren-Technik die Anwendung und Beurteilung von Abklatschproben demonstriert.

Selbstverständlich bieten wir auch in den Bereichen Instrumenten-Hygiene und Wundmanagement fachspezifische Schulungen in Theorie und Praxis an.



OPAL und OPAL Akademie

So ausgezeichnet wie die schülke Produkte – OPAL, Ihr Dienstleister für Hygieneberatung und Schulungen.



Die OPAL Service GmbH arbeitet partnerschaftlich und kosteneffizient, indem vorhandene Potenziale und Ressourcen genutzt werden. Ein funktionierendes Hygienemanagement benötigt kompetente Fachkräfte, validierte Verfahren, den Einsatz wirksamer Desinfektionsmittel und eine hohe Compliance bei allen Mitarbeitern.

OPAL bietet Ihnen höchste Beratungskompetenz und Unterstützung, u. a.:

- kontinuierliche Hygieneberatung: Gemäß RKI-Richtlinie und entsprechend den Vorgaben der hygienerelevanten gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Infektionsschutzgesetzes und des Medizinproduktgesetzes, sowie den darauf beruhenden Verordnungen und technischen Regelwerken
- · Hygiene- und Infektionsmanagement
- spezielle Beratung für Risikobereiche (z. B. OP, ZSVA, Endoskopie)
- Unterstützung bei Ausbrüchen / Infektionssurveillance
- Coaching Ihrer in Ausbildung befindlicher Hygienefachkraft
- Etablieren eines Hygienebeauftragten-Teams
- · Kooperation mit Krankenhaushygienikern, wenn gewünscht
- · kontinuierliche Schulung sämtlicher Berufsgruppen Ihrer Einrichtung



Erfolg durch Bildung – Fortbildung in der OPAL-Akademie, z. B.:



- DGSV-anerkannte Fachkunde I & II
- DGSV-anerkannte Sachkunde für Arztpraxis, Endoskopie, Tattoo und Piercing
- Hygienebeauftragter Altenheim, Krankenhaus, Gesundheitswesen
- Refresher Angebote zur Aktualisierung Ihrer Kenntnisse

Unser aktuelles Kursangebot entnehmen Sie bitte unserer Homepage. Neben den Akademie-Standorten Norderstedt, Frankfurt/Main, Leipzig und München bieten wir sämtliche Kurse auch Inhouse an.

Online-Akademie



Flexibilität in Arbeitszeiten, Fortbildungswunsch und Familienmanagement prägen die Planungen heutiger moderner Pflegefachkräfte.

Der neue E-Learning-Kurs ist modular aufgebaut und verknüpft aktuelles Hygienewissen mit schülke-Produkten und schülke-Hands-on-Videos, genau da, wo es Sinn für den Anwender macht.



Telefonische Verfügbarkeit / Beratung, auch außerhalb der Einsatzzeiten vor Ort, ist für OPAL selbstverständlich.

OPAL Service GmbH

Post: OPAL Service GmbH, 22840 Norderstedt

Telefon: + 49 40 521 00 - 670 Fax: + 49 40 521 00 - 675 E-Mail: info@opal-gmbh.com







Konzentratrechner

So viel wie nötig, so wenig wie möglich.

Der Erfolg von Hygienemaßnahmen hängt neben der eingesetzten Chemie auch maßgeblich von der richtigen Dosierung ab.

Die richtige Konzentration von Desinfektionsmitteln und Reinigern ist entscheidend für das Ergebnis der jeweiligen Hygienemaßnahme.

Eine zu niedrige Dosierung hat zur Folge, dass das eingesetzte Produkt nicht ausreichend wirken kann. Eine Überdosierung auf der anderen Seite bedeutet, unnötig Präparat zu verschwenden und somit wirtschaftliche Verluste zu erleiden.

Wir möchten erreichen, dass Sie unsere Produkte ebenso wirksam wie wirtschaftlich und umweltfreundlich einsetzen können. Mit den Dosiergeräten von schülke sind Sie in der Lage, unsere Konzentrate komfortabel und exakt zu bemessen und zu gebrauchsfertigen Desinfektionsmittel- oder Reinigungslösungen zu verdünnen.



DosageCal

Zusätzlich zu unserer Dosiertabelle können Sie mit unserem DosageCal Ihre gebrauchsfertigen Lösungen jetzt einfach online und offline berechnen.

Auf unserer Website ist der Rechner über Computer, Tablet oder Smartphone nutzbar. Und das Beste: Sie können den Rechner immer und überall nutzen auch wenn Sie mal keinen Internetempfang haben! Hierfür müssen Sie die Seite nur einmalig über Ihren Internetzugang aufrufen und speichern.

Zusätzlich können Sie mit dem Rechner Ihren Monats-, Quartals- und Jahresverbrauch an den jeweiligen Desinfektions- und Reinigungsmitteln abschätzen. So haben Sie immer den Überblick über die verbrauchten Mengen.

Mehr unter:

www.konzentrat-rechner-schuelke.de



Die richtige Konzentration für Ihre Lösung und die Verwendungsdauer, oder für den benötigten Zeitraum die richtige Lösung ansetzen - exakt kalkuliert und somit höchst effizient. So geht's:

Kotomichino Victoria (Inglia)	the state of
Konzentratrechner	
Produit	
dancel 4"	
Menge der gebrauchsfertigen Lösung (L)	
16	
Konzentration (%)	
8	
Serietnen	0
Kostorinstrumpe	
9.5.1. Vibrour birrolled 500 oil Kirryunited besidagi	

South and the Monte Charles	DosageCal
Verbrauchsrechner	
Schillberi Sie Prem Verbrauch as Deurseklommitel- und Remgungskörzentralen ab	
Produkt	
elleticis	
Menge der gebrauchsfertigen Lösung (L)	
P	
Menge im Zeitrahmen benötigt	
100m	
Konzentration (%)	
V	
Zeitrahmen für Schätzung	
70	
Sestine	
Korpedamenge	
0.141 Koszastial bookigi	



Downloadcenter



Bilder, Broschüren, Flyer oder sonstige Materialien zu unseren Produkten.


In unserem eigenen Downloadcenter haben wir alle Informationen zu unseren Produkten für Sie zum Download aufbereitet. Sodass Sie von überall und zu jeder Zeit darauf zugreifen können.

https://www.schuelke. com/de-de/Wissensportal/

Kostenlose Helfer für den Klinikalltag.

schülke Sticker


Sticker, die Ihnen den Arbeitsprozess leichter machen: Sie sind für den Einsatz einzelner Anwendungsbereiche gedacht, zeigen z. B. das Ablaufdatum auf einen Blick, kennzeichnen Hospitalbereiche, machen auf zwingende Schutzmaßnahmen aufmerksam u.v.m.

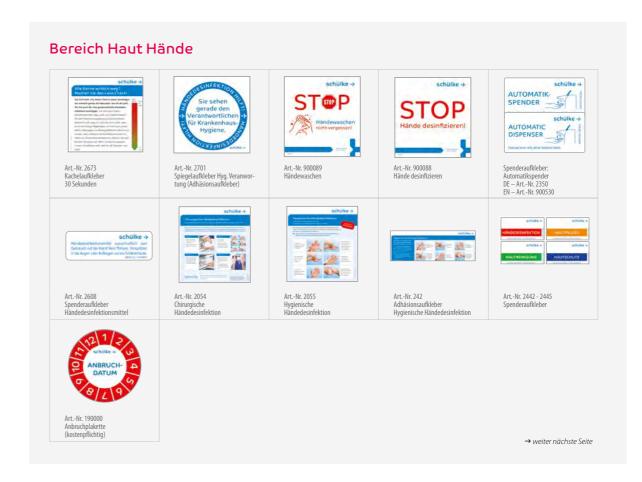

163

162

Kostenlose Helfer für den Klinikalltag.

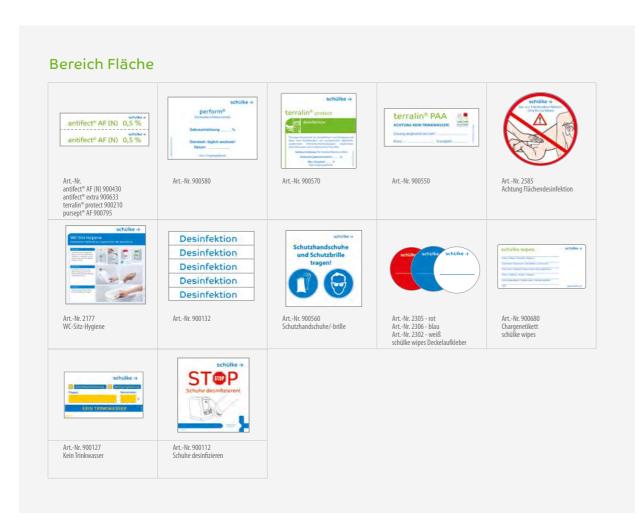



Mikroorganismen im Fokus.

Wissensportal

Alles zu Infektionsprävention, Industriehygiene und Spezialitätenchemie.

Als Spezialisten im Bereich Hygiene und chemisch-technische Konservierung mit über 125 Jahren Erfahrung wissen wir, worauf es in der Welt der Mikroorganismen ankommt. In unserem Wissensportal finden Sie alles rund um die Themen Infektionsprävention, Industriehygiene und Spezialitätenchemie. Denn wir möchten unser Wissen gerne an Sie weitergeben!





Informationsportale

Detaillierte Produktinformation zu unseren ,Top-Produkten'



Wir sind die Spezialisten für Hygiene und Infektionsprävention, Industriehygiene, chemisch-technische Konservierung und antimikrobielle Fragestellungen. Detaillierte Informationen zu ausgewählten Produkten sowie zu Spezialthemen erhalten Sie auf unseren Informationsportalen.





Informationen: Infektionserreger – Die Verursacher von Infektionen

Krankheiten und deren Erreger

Infektionen können durch eine Vielzahl von Erregern verursacht werden. Diese Mikro- oder Makroorganismen setzen in anderen Organismen gesundheitsschädigende Prozesse in Gang und werden daher in der Medizin der Eigenschaft der Pathogenität zugeordnet.





Publikationen

Publikationen zum aktuellen Stand der Forschung



Damit auch Sie immer auf dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung sowie sich immer wieder ändernden Vorgaben, Richtlinien und Gesetzen sind, haben wir die nachfolgenden Seiten in unsere Homepage integriert. Hier finden Sie alle relevanten Publikationen aus den verschiedenen Bereichen.



164

Mikroorganismen im Fokus.



News & Views by Dr. Siebert



Neues zu aktuellen Hygienethemen

Mit "News & Views" fasst schülke brisante Hygienethemen zusammen, erläutert sie und stellt sie in den Zusammenhang.



Wundmanagement

Informationen zu Wundarten, Wundheilung und Wundbehandlung



Die richtige Behandlung einer Wunde kann sehr komplex, zeitaufwändig und mit hohen Kosten verbunden sein. Insbesondere deshalb finden sich auf dem Markt zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen zur richtigen Therapie von Wunden. Nicht immer ist es einfach, die Ursache einer Wunde festzustellen, eine Wunde zu typisieren und ein klares Behandlungsschema festzulegen. Dennoch weisen Wunden auch Gemeinsamkeiten auf, die den richtigen Weg zur Behandlung aufzeigen können. Wir möchten Ihnen im Folgenden den Bereich Wundbehandlung näher bringen und einige für Sie hilfreiche Informationen zur Verfügung stellen.



Flächenhygiene

Informationen rund um die Flächenhygiene



Flächenhygiene ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen nosokomiale Infektionsrisiken in medizinischen Einrichtungen. Sie ist Teil unseres Flächenkonzeptes, das wir – wie alle anderen Leistungen und Aktivitäten unseres Unternehmens – unter strengen ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten entwickelt




Unser Beitrag für die Umwelt: Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit

Für eine ökologisch, soziale und ökonomisch intakte Welt.

Die Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung liegt unserem Denken und Handeln bei allen Aktivitäten zugrunde.

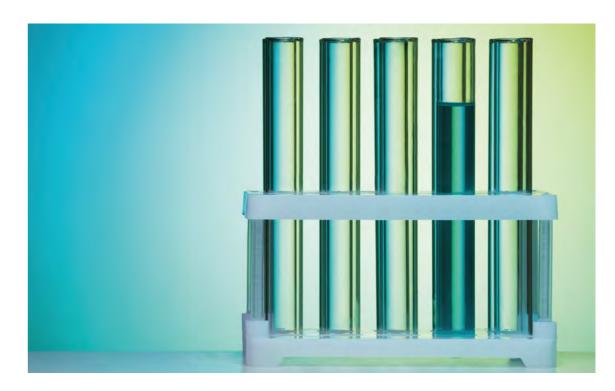

schülke Produkte leisten einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Im Bereich Hygiene bekämpfen wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen aktiv und vorbeugend Infektionen. Dadurch schützen wir die Gesundheit und damit das Leben des Menschen. Ferner reduziert jede Krankheit, die nicht eingetreten ist, den Einsatz von Medikamenten. Damit wird gleichzeitig die Umwelt geschont. Zusätzlich entstehen volkswirtschaftlich weniger Kosten für Arztbesuche, Medikamente und krankheitsbedingte Arbeitsausfälle.

Auch bei unseren Konservierungsmitteln tragen wir zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. In den unterschiedlichsten Industrien verhindern diese, dass Produkte durch Mikroorganismen verderben. Damit verlängern unsere Konservierungsmittel die Lebensdauer vieler Wirtschaftsgüter, was wertvolle Ressourcen schont und die Nutzbarkeit von Waren verlängert. Erst durch die Konservierung ist es außerdem möglich, Wasser als Basis für Produkte wie Farben zu verwenden. Somit kann auf umweltgefährdende organische Lösungsmittel verzichtet werden.

Weitere Ausführungen zu Nachhaltigkeit und Qualität unserer Produkte finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2017, den wir Ihnen gern zuschicken. Oder Sie laden sich den Bericht ganz einfach herunter:





Nachhaltigkeitsbericht 2017

Qualitätsmanagement

In allen Bereichen unseres Unternehmens.

schülke hat unter dem Dach Total Quality Management (TQM) ein integriertes Managementsystem (Risikomanagement, Industrial Management System (IMS), Krisenmanagement, Qualitätsmanagement, Personalmanagement, GMP/GVP/GDP, Arbeitssicherheitsmanagement, Umweltmanagement) eingeführt.

Klassisch definiert sich Qualität über das Produkt oder die Dienstleistung. schülke ist fest davon überzeugt, dass Qualität mehr umfasst und wählt deshalb einen erweiterten Ansatz. Alle Aspekte, die auf den Geschäftsprozess einwirken, bestimmen unseren Begriff von Qualität.

Wir verpflichten uns in unseren Unternehmensgrundsätzen, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen vorrangig zu behandeln. Dabei schließt der Begriff Qualität für uns auch Aspekte des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit mit ein. Gleichzeitig legen wir Wert auf einen offenen Dialog zwischen Führung und Mitarbeitern sowie eine gute Partnerschaft mit unseren Kunden.

Ziel ist es, Produkte kontinuierlich zu verbessern und folgendes sicherzustellen:

- sicheres und nachhaltiges Handeln
- den wirtschaftlichen Erfolg
- die Kundenzufriedenheit
- · die Mitarbeiterzufriedenheit
- · die gesellschaftliche Akzeptanz

Zur Umsetzung des TQM wird ein integriertes Managementsystem aufrecht erhalten und weiterentwickelt, das nach den ISO-Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 zertifiziert ist. Das Managementsystem bildet zudem die Erfordernisse aus dem Produktrecht ab und enthält die erforderlichen, internen Managementwerkzeuge zur Umsetzung der Konzernforderungen insbesondere des IMS (Industrial Management System).

Vorschriftenverzeichnis und systembegleitende Dokumente

Die aufgeführten Dokumente, Richtlinien und Verweise sind systembegleitende Unterlagen, in die das Managementsystem unseres Unternehmens eingebettet sind.

N	or	m	en

Normen	
DIN EN ISO 9000	QM-System-Modell
DIN EN ISO 9001	QM-Systeme
DIN EN ISO 9004	QM und Elemente eines QM-Systems
DIN EN ISO 14001	Umweltmanagementsysteme
DIN EN ISO 13485	QS-Systeme für Medizinprodukte







Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

AMG	Arzneimittelgesetz
Richtlinie 93/42 EWG	EU-Richtlinie Medizinprodukte
MPG	Medizinproduktegesetz
AMWHV	Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung
GMP	Good Manufacturing Practice
GVP	Good Pharmacovigilance Practices
GDP	Good Distribution Practice
EMAS III	Eco-Management and Audit Scheme

Mit der Ethik im Verbund.

Qualitätsmanagement

Unsere Arzneimittel und Medizinprodukte unterliegen strengsten Kontrollen.

Damit sind sowohl ethische Verantwortung gegenüber Anwendern und Patienten, als auch gesetzliche Verpflichtungen (AMG-, MPG-, EU-Verordnungen und Richtlinien) verbunden. Unabhängige Prüfungen stellen sicher, dass unsere Produkte ihre medizinische Zweckbestimmung sicher erfüllen. Auf unserer Homepage finden unsere Kunden ein Formular, das ihnen die Möglichkeit gibt, eventuell

auftretende Mängel in puncto Qualität, Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Wirksamkeit, Sicherheit und Funktionsweise zu melden. Der Meldebogen fragt die wichtigsten Informationen ab, die für die Einstufung und Bewertung einer möglichen Nebenwirkung/Reklamation notwendig sind.

www.schuelke.com



Kundenfreundlich, klar verständlich und einfach in der Navigation – so, wie der Internet-User sich eine Website wünscht. Ganz besonders dann, wenn es um so komplexe Themen wie Hygienemanagement, Konservierung oder Spezialitätenchemie geht. Das ist schülke mit dem neuen Online-Portal perfekt gelungen.

Wer sucht, der findet hier auch. Die Navigation ist so übersichtlich gehalten, dass Besucher der Website schnell zur gewünschten Information gelangen. Das Hauptmenü besteht aus sechs Themenblöcken, die neben den drei Haupttätigkeitsbereichen "Infektionsprävention", "Industriehygiene" und "Spezialitätenchemie" auch das "Wissensportal" präsentieren. Vorgestellt werden hier innovative Produkte und Verfahren und ihre Anwendung sowie Erkenntnisse aus über 125 Jahren Forschung und Entwicklung. Es folgen die Themenblöcke "Über uns" und "Karriere". Die jeweiligen Drop-down-Menüs vertiefen – klar und nachvollziehbar gegliedert – jedes Thema. Hier gelangt der Besucher der kundenfreundlichen Website auch zu seiner Branche, Kundengruppe und zum Produkt, erfährt alles über schülkes umfassenden Service oder gelangt mit einem Klick zu den News.

Genauso einfach wird er auf jeder Seite mit dem schülke Channel auf You-Tube verlinkt, kann den Kontakt zum Unternehmen aufnehmen oder den richtigen Händler

über die "Bezugsquellen" finden.

Tradition trifft Zukunft: Als Hygienespezialistin stellt schülke jetzt ihr breitgefächertes Know-how zu Prävention, chemisch-technischer Konservierung und zum mikrobiologischen Qualitätsmanagement ins Netz. Hier gelangt jeder mit wenigen Klicks zur richtigen Seite und zur gesuchten Information.

Schauen Sie noch jetzt vorbei www.schuelke.de



Ein Imagefilm sagt mehr als 1000 Worte.

So unterhaltend kann Firmengeschichte sein!



Knapp fünf Minuten schülke Historie mit den spannendsten Szenen aus Forschung und Entwicklung.

Von der Gründung im Jahre 1889 der Schülke & Mayr GmbH durch Rudolf Schülke und Julius Mayr über die siegreiche Bekämpfung der Cholera-Epidemie in Hamburg 1892 mit Lysol® bis heute.

Mittlerweile ist schülke ein international agierender Konzern, der seine Kunden weltweit in puncto mikrobiellem Qualitätsmanagement berät und mit hochqualifizierten Produkten und innovativen Verfahren Krankheiten vorbeugt und bekämpft.

Aber: sehen Sie selbst, Film ab! www.youtube.com/user/schuelkeChannel



YouTube, facebook und Newsletter.



Neben unserem Imagefilm finden Sie auf YouTube auch Training-Videos. So z. B. ein Film über korrekt durchgeführte Hygiene, in dem wir Ihnen u. a. konkrete Maßnahmen zur Flächen- und Händehygiene vorstellen. Und wer sich für hocheffektive, hautfreundliche Desinfektion interessiert, für den sind die Videos zum Thema Octenidin interessant. Sie zeigen Einsatz und Wirkweise des von schülke entwickelten Wirkstoffs Octenidin. Der schülke YouTube Channel hält darüber hinaus noch weitere Informationen bereit, u. a. Produktanwendungsfilme und Videos zur Infektionsprävention.

Klicken Sie sich rein, es lohnt sich.

Hier geht's zum schülke YouTube Channel. Viel Spaß! www.youtube.com/schuelkeChannel





Treffen Sie uns und unsere Fans auf facebook werden Sie Fan! Hier stehen Professionals und interessierte Laien in regem Austausch miteinander. Was immer sich bei schülke und in der Welt der Hygiene tut, findet oft auch auf unserer facebook-Seite statt. Außerdem posten wir z. B. auch Messetermine, Veranstaltungen und auch unseren aktuellen Newsletter.

Schlagen Sie die medizinische facebook-Seite auf, wir freuen uns auf Sie!

Hier gelangen Sie zu schülke auf facebook, willkommen! www.facebook.com/myschulke





Bleiben Sie auf topaktuellem Stand in Sachen Hygiene, lassen Sie sich regelmäßig informieren! Unser **online-Newsletter** hält Sie auf dem Laufenden über wichtige Themen der Branche, Produktneuheiten und Nachrichten aus dem Unternehmen. Er erscheint zwei- bis viermal pro Jahr, ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. Registrieren Sie sich – wir machen es Ihnen leicht. Denn die Newsletter-Anmeldung ist nur einen Klick entfernt:

> schülke Newsletter Anmeldung über www.schuelke.com/de/de/newsletter/





Stellvertretend für viele andere kommen hier Mitarbeiter aus sechs unterschiedlichen Bereichen zu Wort, den allen eins gemeinsam ist: Sie arbeiten nicht nur engagiert für die Ziele des Unternehmens, sondern auch mit ganzem Herzen. Und das spiegelt sich sowohl im Teamgeist wie auch bei unseren zufriedenen Kunden wider.



Dr. Katrin Steinhauer

Seit 2002 arbeite ich im Bereich Forschung und Entwicklung bei schülke und habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Mikrobiologie angefangen. Seit 2007 habe ich die Abteilung Product Development Hygiene/Bioscience geleitet und bin seit April 2015 verantwortlich für das Microbiology Department. Mich begeistert und fasziniert die Vielfalt der Aspekte wirksamer Infektionsprävention, die immer wieder neue und spannende Herausforderungen bietet, und ich finde es toll, an einem so wichtigen Thema wie der Infektionsprävention mitarbeiten zu können.

schülke würde ich als ein verantwortungsbewusstes und dynamisch wachsendes Unternehmen mit nachhaltiger Mission beschreiben, in dem Hygiene in ihrer ganzen Vielfalt ein extrem spannendes und in Zeiten der Globalisierung immer bedeutsamer werdendes Betätigungsfeld darstellt. Wir sind im Spannungsfeld komplexer regulatorischer Anforderungen, Infektionsprävention und Kundenanforderungen mit unserem Produktportfolio breit aufgestellt und verfügen über ein großes Wissen in Bezug auf die Wirksamkeit und den Einsatz von Desinfektionmitteln, welches wir dem Kunden als umfassenden Service zur Verfügung stellen. Die Prävention von Infektionen wird durch die Zunahme von Antibiotikaresistenzen immer bedeutsamer und wir können wirksam bei der Vermeidung nosokomialer Infektionen mit unseren Produkten helfen.

National wie international werden Hygiene und Infektionsprävention in einer sich immer stärker vernetzenden Welt mit alternden Bevölkerungen auch weiterhin wichtige Herausforderungen darstellen.



Volfgang Merkens Senior Manager Marketing

Seit nunmehr 28 Jahren arbeite ich in verschiedenen Positionen und Aufgaben bei schülke und bin seit mehr als einem Jahrzehnt in vielen Ländern dieser Welt unterwegs. Es ist eine höchst spannende Aufgabe und eine reiche Erfahrung zu beobachten und zu lernen, wie unterschiedlich die Herangehensweise an ein funktionierendes Management zur Prävention von Infektionen ist.

Natürlich spielt die finanzielle Ausstattung eines Landes eine wichtige Rolle. Aber eben nicht nur! Gesetzliche Regularien, Bildung, Ausbildung von Fachpersonal, kulturelle Gegebenheiten, klimatische Bedingungen und landesspezifische Gewohnheiten sind nur einige Beispiele von vielen, die die Unterschiede deutlich machen. Für uns als forschendes und produzierendes Unternehmen bedeutet es immer wieder eine ganz besondere Herausforderung, diese spezifischen Besonderheiten zu erkennen, damit unser Produkt-und Leistungsangebot als maßgeschneiderte Lösung erfolgreich in den jeweiligen Geographien möglichst viele Abnehmer und zufriedene Anwender findet. Am Ende zum Wohle der Patienten.



Heiner Franke seit 1991 bei schülke Service-Techniker

Als Service-Techniker bin ich seit 1991 bei schülke beschäftigt. Mein Einsatzbereich befindet sich im Ballungsgebiet von NRW. Ich betreue überwiegend Krankenhäuser, Altenheime und Industrieunternehmen. In meiner Anfangszeit wurden überwiegend noch Formaldehyd-Produkte eingesetzt, obwohl die Aldehydfreien-Produkte schon im Kommen waren. Im Laufe meiner Tätigkeitsjahre haben sich nicht nur die Geräte vermehrt, sondern auch das Tätigkeitsfeld: Durch neue Projekte wie z.B. Einsatz in ZSVA, Küchen (neue Dosiertechniken) und Steckbeckenautomaten. Zu meinem Aufgabenbereich gehört auch der Verkauf von Dosiergeräten, Spendern und Wasserfiltern. Durch die ständig wachsenden Anforderungen und Einsatzbereiche wächst unsere Abteilung stetig.



Heiko Strohkirch seit 2007 bei schülke

Ich bin seit acht Jahren bei schülke als Gebietsverkaufsleiter in Schleswig-Holstein und Hamburg sowie als Key Account Manager für Einkaufsgemeinschaften beschäftigt. Darüber hinaus betätige ich mich auch als Dozent in verschiedenen Einrichtungen für die Ausbildung von Hygienefachkräften. Unser Anspruch bei schülke, alles auf die jetzigen und kommenden Kundenansprüche auszurichten, funktioniert nur durch Kundennähe und flexible Innovations- und Produktionsprozesse. In den bisher acht Jahren habe ich die spannende Entwicklung zum Vollsortimenter - u. a. und ganz neu der Bereich Küche – und Produktinnovationen im Bereich der Ready-to-use Lösungen, der Peressigsäure sowie Tuchsystemen miterleht



Sandra Pfeifer seit 2006 bei schülke

Ich arbeite als Sales Managerin im Customer Sales Service. Durch den täglichen Kundenkontakt kann ich behaupten, dass schülke die Bedürfnisse der Kunden nicht nur wahrnimmt, sondern in den meisten Fällen auch eine Lösung präsentiert. Denn schülke hat es geschafft, die Wünsche der Kunden zu analysieren und so ein Produktportfolio zu entwickeln, welches den Bedarf des Kunden bestens deckt. Durch Produktinnovationen ist ein Mehrwert für den Anwender geschaffen worden. Beispielsweise haben wir mit unserem innovativen Hygieneplansystem einen neuen zukunftsorientierten Standard im Bereich der Hygiene gesetzt. Dabei ist uns immer die nachhaltige Beziehung zu unseren Kunden wichtig. Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern stehen unseren Kunden off- wie online jederzeit gern beratend zur Seite.





Seit 2010 arbeite ich im Vertrieb Innendienst – und dort im Bereich Hospital – bei schülke in einem Team, dessen Umgang untereinander ich immer wieder als sehr positiv empfinde. Mir gefällt auch, dass das Unternehmen durch Innovationen, Investitionen und Akquisition stets erfolgreich auf den Markt reagiert. Wir bieten hochwertige Produkte aus verschiedenen Anwendungsgebieten in einem Gesamtkonzept, das auf langjähriger Erfahrung und Expertenwissen beruht. Dazu gehören auch hohe Zuverlässigkeit und qualifizierte, engagierte Mitarbeiter, die den Kunden umfassende Beratung und Serviceleistung bieten können.

Index

Produkt	PZN	Bestell-Nr.	verpackungseinneit	Seite
antifect® AF (N)	02706218 06784882	180831 180832	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 5 I-Kanister	54
	08834868	118302	Karton mit 5 x 2 I-Flasche	
antifect® extra	08834874	118305 118331	5 I-Kanister 20 I-Kanister	55
antifect® N liquid	04218078 04218084	113939 113940 113941	Karton mit 20 x 500 ml-Flasche Karton mit 10 x 1 l-Flasche 5 l-Kanister	64/142
antifect® S		115702 115703	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 10 I-Kanister	139
antiMREset	10637000	70000883	1 Set	43
Applikationshilfen				126
Betthalter für Vierkantflaschen		134412 134414 134413 134415	für 500 ml-Vierkantflaschen (gerade Halterung) für 500 ml-Vierkantflaschen (gebogene Halterung) für 1000 ml-Vierkantflaschen (gerade Halterung) für 1000 ml-Vierkantflaschen (gebogene Halterung)	117
Chlorschaumreiniger		187501	11 I-Kanister	141
desderman® pure	09297958 01510559 01510542 01475314 11551163 11551186	116823 116802 116803 116804 70000754 70000755	Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche Karton mit 20 x 500 ml-hyclick* Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-hydick* Spenderflasche	19/145
desderman® pure gel	13353993 13353970 13353987 13354001	126908 126902 126903 126913 70000815 70000816	Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche Karton mit 20 x 50 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Ependerflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche Karton mit 20 x 500 ml-Hydick* Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-hydick* Spenderflasche	20
Desinfektions-Reiniger AF	03676436	120701	Karton mit 10 x 1I-Flasche	56
Desinfektions-Säule		60000141	Standsäule	116
desmanol® care	13354018 12427838 12427844 12427815 12427809 12501552 12501546	70001147 70001036 70001037 70001038 70001039 70001085 70001086	Karton mit 20 x 50 ml-Kittelflasche Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche Karton mit 10 x 11-Spenderflasche Karton mit 10 x 11-Ependerflasche Karton mit 10 x 11-Euroflasche Karton mit 20 x 500 ml-hydick* Spenderflasche Karton mit 20 x 11-hydick* Spenderflasche	19
desmanol® pure		125210 125211 125212 125213 125215 70000817 70001795	Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche S-1-Kanister Karton mit 20 x 500 ml-hydick* Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-hydick* Spenderflasche	20
desmanol® pure gel		70001041 70001042 70001043 70001793 70001794	Karton mit 30 x 100 ml-Kittelflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche Karton mit 20 x 500 ml-hydick* Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-hydick* Spenderflasche	20
Dosiergerät D		648000		121
losit® des		644000		121/143
osit® Entschäumer		185807	4 x 2,5 kg	135
osit® Klarspüler		70001655	2 x 2,5 l	135
osit® Klarspüler S		70001656	2 x 2,5 l	135
osit® Reiniger CL		70001670	4 x 4 kq	135
losit® Reiniger standard		185806	4 x 4 kg	135
losit® Reiniger WS		185801	4 x 4 kg	135
losit® trio		627500		143
losit® V2 compact Spender		60000011		134
losit® V2 fluid Spender		60000012		134
delstahlpflege		188101	Karton mit 10 x 500 ml-Flasche	142
disonite® classic	00316513 00316536	230047 230050	Karton mit 12 x 1 kg-Dose 5 kg-Eimer	93
disonite® super	2722039 2722080	230051 230088	Karton mit 12 x 1 kg-Dose 5 kg-Eimer	93
ntkalker		146512	10 I-Kanister	136
semtan® active gel	01246915 05702913	115503 115506	Karton mit 30 x 150 ml-Tube Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	29
semtan® cleansing foam	03473555	127001	Karton mit 10 x 500 ml-Sprühdose	25
semtan® dry skin balm	11729649 11729661	70000985 70000843	Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	29
semtan® skin lotion	11729678 11729684	70000897 70000898	Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	29
esemtan® wash mitts	10131364	129701	Karton mit 24 x 10 Waschhandschuhe	25
esemtan® wash lotion	05702741 07707429 06099502 07707435	116625 116602 116603 116604	Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche 5 l-Sparkanister	24
	11146221 11146215	70000133 70000134	Karton mit 10 x 1 I-Flasche hyclick® Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®	
Fettlöser		194501	Karton mit 12 x 500 ml-Flasche	139

gigasept® AF			Verpackungseinheit	
		100401	Karton mit 5 x 2 I-Flasche	94
		100402 125602	5 I-Kanister Karton mit 5 x 2 I-Flasche	
gigasept® AF forte		125603	5 I-Kanister	94
gigasept® FF (neu)	05963915	125502	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 5 I-Kanister	96
	04197442	125503 107411	Karton mit 5 x 2 I-Flasche	
gigasept® instru AF	04197465	107412	5 I-Kanister	93
gigasept® PAA concentrate	07644947	126202	Karton mit 12 x (2 x 100 ml)-Doppelgebinde	95
gigasept® pearls	02450070	70000179 70000178	Karton mit 4 x 1,5 kg-Eimer 6 kg-Eimer	95
gigazyme®	02458878 02458884	132105 132106	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 5 I-Kanister	92
gigazyme® X•tra		129101 129102	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 5 I-Kanister	92
Glasreiniger Grill- und Ofenreiniger		188002 187901	Karton mit 12 x 1 I-Flasche Karton mit 12 x 1I-Flasche	139 139
3		6000036	hyclick® Präparate-Spender 1.000 ml	
hyclick®		60000045	hyclick® Präparate-Spender Vario 500 ml / 1.000 ml	113
Hygienepaneel (Hygienekombis)		682000	Hygienepaneel	124
Instrumentenwannen		144912	10 I-Kanister	
Klarspülkomponente		144913	200 I-Fass	136
kodan® Tinktur forte farblos	02386624 02335549 06099519	104021 104005 104007 104012 104010	Karton mit 40 x 6 ml-Fläschchen Karton mit 10 x 250 ml-Fläsche mit Sprühpumpe Karton mit 10 x 11-Fläsche Anstaltspackungen Karton mit 10 x 250 ml-Fläsche mit Sprühpumpe Karton mit 5 x 21-Fläsche	37
		70000899	Karton mit 10 x 1 I-Flasche	
kodan® Tinktur forte gefärbt	02335561 06099531 02335578	104802 104804 104803	Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe Karton mit 10 x 1 l-Flasche Karton mit 5 x 2 l-Flasche	37
Konvektomatenreiniger	02333370	187601	Karton mit 2 x 5 I-Kanister	139
Manueller Geschirrreiniger		186901	Karton mit 12 x 500 ml-Flasche	137
mikrocount®		70000724 182812 182811	Box mit 20 x mikrocount® duo Box mit 20 x mikrocount® TPC Box mit 20 x mikrocount® TPC/E	71
mikrozid® AF liquid	02877813 02877606	109160 109301	Karton mit 10 x 250 ml-Sprühflasche Karton mit 10 x 1 l-Flasche	65
mikrozid® AF wipes <i>Jumbo</i>	02877807 02448348	109102 109157	10 I-Kanister Karton mit 10 x 200 Jumbo-Tücher-Spenderdose	
mikrozid® AF wipes	08824605	70001405 109203	Karton mit 12 x 200 Jumbo-Tücher-Nachfüllbeutel Karton mit 10 x 150 Tücher-Spenderdose	65
mikrozid® AF wipes <i>premium</i>	09491608 11616477	109204 70000808	Karton mit 20 x 150 Tücher-Nachfüllbeutel Karton mit 12 x 50 wipes <i>premium</i>	
mikrozid® PAA wipes	09893442	128101	Karton mit 10 x 50 wipes-Spenderdose	66
mikrozid® sensitive liquid	09460588	165715	Karton mit 10 x 1 I-Flasche	65
mikrozid® sensitive wipes Jumbo	06728961 00046574	109193 109184	5 I-Kanister Karton mit 10 x 200 Jumbo-Tücher-Spenderdose	
mikrozid® sensitive wipes mikrozid® sensitive wipes <i>premium</i> mikrozid® sensitive wipes <i>premium maxi</i>	13501330 11894006 11616520 11616589 12594921	70001404 70000810 70000806 70000807 70001004	Karton mit 12 x 200 Jumbo-Tücher-Nachfüllbeutel Karton mit 10 x 120 Tücher-Spenderdose Karton mit 12 x 50 wipes <i>premium</i> Karton mit 6 x 100 wipes <i>premium</i> Karton mit 6 x 80 wipes <i>premium maxi</i>	66
mikrozid® universal liquid	12397190 12397209	70000998 70000997	Karton mit 10 x 1 I-Sprühflasche 5 I-Kanister	67
mikrozid® universal wipes premium	11551364	70000038	Karton mit 6 x 100 wipes premium	67
mikrozid® universal wipes <i>premium maxi</i>	12594915	70001061	Karton mit 6 x 80 wipes premium maxi	
mucadont® fluid	04185048 04916167	230077 230122	Karton mit 12 x 400 ml-Spraydose Karton mit 5 x 2 l-Flasche	96
mucadont® IS	04916173	230123	5 I-Kanister	96
mucadont® zymaktiv	00621162	230146	5 I-Kanister	92
mucapur® MP		230053 230087	5 kg-Eimer 10 kg-Eimer	102
mucapur® RS		230176	5 kg-Kanister	107
mucocit® T		230120 230121	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 5 I-Kanister	94
octenicare® repair creme	14238403	70001836	Karton mit 10 x 50 ml-Tube	37
octeniderm® farblos	03673202	118211	Karton mit 10 x 250 ml-Flasche	39
	03673219		Karton mit 10 x 11-Flasche	
octenidol® md Mundspüllösung	11655922 03962828	121602	Karton mit 10 x 250 ml-Flasche Karton mit 20 x 20 ml-Faltenbalg	43
octenilin® Wundgel	11314285	121616	Karton mit 6 x 250 ml-Tube	36
octenilin® Wundspüllösung	05747123 11268421		Karton mit 10 x 350 ml-Flasche	36 43
octenisan® md Nasengel octenisan® Set	11268421	121617 70000805	Karton mit 20 x 6 ml-Tuben Karton mit 10 x 1 Set	43
octenisan® Waschhandschuhe	07410505	128022	Karton mit 24 Packungen	42
	10122777	430.000	10 Waschhandschuhe je Beutel	
octenisan® Waschhaube	10133765 02840537	129602 121501 121505	Karton mit 24 Packungen 1 Waschhaube-Beutel Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche Karton mit 20 x 500 ml-Flasche	42
octenisan" wascniotion	05702770 02840566	121505 121503		42
octenisept*	03853387 04830483 05702764 03853401	121406 121411 121464	Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Klappdeckel Karton mit 10 x 250 ml-Flasche mit Sprühpumpe	36
octenisept® Antiseptikum vor	04804008	121407	Karton mit 100 x 15 ml-Flasche	36

Produkt	PZN	Bestell-Nr.	Verpackungseinheit	Seite
perform®	03317921 05514318	70001859 70001858 122319	Karton mit 250 x 40 g-Dosierbeutel Karton mit 60 x 40 g-Dosierbeutel Karton mit 4 x 900 g-Dose	55
perform® spray bottle holder	0101100		Karton mit 15 Stück	118
perform® sterile alcohol EP			Karton mit 10 x 500 ml-Flasche	78
•		136406	Karton mit 10 x 500 ml-Flasche	
perform® sterile alcohol IPA		121101 136408	Karton mit 10 x 500 ml-Flasche (WFI-Variante) Karton mit 6 x 1 l-Flasche	78
perform® sterile cleaner ND		182002	Karton mit 10 x 500 ml-Flasche	80
perform® sterile concentrate OXY		122351	Karton mit 50 x 40 g-Beuteln	79
perform® sterile concentrate PAA		100071	Karton mit 20 x 40 ml-Flaschen	79
perform® sterile concentrate Q2		70000031	Karton mit 20 x 60 ml-Flaschen	80
perform® sterile dry wipes			Karton mit 10 x 10 Tücher Softpack	81
perform® sterile mix dry wipes		100085	Karton mit 5 x 100 Tücher	81
perform® sterile PAA		70000331 100081	Karton mit 10 x 300 ml-Flasche Karton mit 10 x 500 ml-Flasche	79
perform® sterile premium dry wipes		100083	Karton mit 3 x 100 Tücher	8
perform® sterile wipes IPA		121103	Karton mit 20 x 20 Tücher Softpack	78
Produktionsreiniger A		188202	10 I-Kanister	140
pump des touch		692000		120
pursept® A Xpress	04741271 08878050	230131 230128	Karton mit 10 x 1 I-Flasche Karton mit 3 x 5 I-Kanister	64
pursept® AF	08523536	230124		54
parsept 711	08523542		5 I-Kanister	
quartacid® plus		117403 117406	Karton mit 5 x 2 I-Flasche 10 I-Kanister 20 I-Kanister	141
		117405 114302	500 I-Container Karton mit 5 x 2 I-Flasche	
quartasept® plus		114302 114306 114307	5 I-Kanister 20 I-Kanister	14
s&m Pflegeadditiv		107202	Karton mit 5 x 2 I-Flasche	7(
		117201	Karton mit 5 x 2 I-Flasche	
s&m Reinigungsadditiv			5 I-Kanister	70
s&m Schaumreiniger S		107511	10 I-Kanister	140
s&m wash lotion	05702876 04427600 06099548 11146244	112006 112002 112003 70000135	Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Spenderflasche Karton mit 10 x 1 l-Euroflasche Karton mit 10 x 1 l-Flasche hydick®	24
	11146238		Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®	
Schneidbrettbleiche		187401	Karton mit 12 x 1 I-Flasche	140
schülke optics schülke optics lotion		172001 70000944	Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	2
schülke wipes wipes mini	06492820 01128630 10308667 10308673 06492837 10201024 07564059 10201018	119530 70000163 119523 70000162 119540 70000160 119541 70000161 119532 119505 119503	schülke wipes 40 Spendereimer (1 x Spendereimer) schülke wipes 40 Spendereimer (7 x Spendereimer) schülke wipes 100/111 Spendereimer (1 x Spendereimer) schülke wipes 100/111 Spendereimer (5 x Spendereimer) schülke wipes 100/111 Spenderbox (1 x Spendereimer) schülke wipes 70 Spenderbox (1 x Spendereimer) schülke wipes 100/111 Spenderbox (1 x Spendereimer) schülke wipes 100/111 Spenderbox (5 x Spendereimer) Tuchrollen schülke wipes 40 (Karton mit 1 0 x 40 Tücher Tuchrollen) schülke wipes 70 (Karton mit 6 x 70 Tücher Tuchrollen) schülke wipes 100 (Karton mit 6 x 100 Tücher Tuchrollen) schülke wipes 111 (Karton mit 6 x 111 Tücher Tuchrollen) schülke wipes 111 (Karton mit 6 x 111 Tücher Tuchrollen)	60/142
schülke wipes safe & easy	10332826 10332855 11071575	119544 119542 70000034	schülke wipes safe & easy bag-in-box system Karton mit 6 x Bags mit 111 Tüchern Karton mit 10 Spenderboxen Schülke wipes safe & easy bagless system Karton mit 6 x Eimern mit 130 Tüchern	61
schülke wound pad zum Debridement	11483898	146010	Karton mit 4 x 3 Schwämmen (weiß, blau, rot)	37
	11268409 02459783	146011 141620	Karton mit 10 x 1 Schwamm (blau) Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche	28/14
sensiva® dry skin balm	05702801	141621	Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	,
sensiva® protective cream	10320585	129801	Karton mit 30 x 100 ml-Tube	28/14
sensiva® protective emulsion	02459234 05702936	70000155 70000156	Karton mit 30 x 150 ml-Taschenflasche Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche	28/14
sensiva® regeneration cream	2459286	100301	Karton mit 30 x 50 ml-Tube	28/14
sensiva® wash lotion	05702882 02458909 06099560 02458915 11146627 11146250	114006 114002 114005 114003 70000137 70000138	Karton mit 20 x 500 ml-Spenderflasche Karton mit 10 x 11-Spenderflasche Karton mit 10 x 11-Euroflasche 51-Sparkanister Karton mit 10 x 11-Flasche hyclick® Karton mit 20 x 500 ml-Flasche hyclick®	24/14
sm 2 500 sm 2 universal		668600 668500	sm 2 500 sm 2 universal	119
sm 8 Schaum		626000		143
Spezial Flächenreiniger		143700	10 I-Kanister	140
Spülmaschinenreiniger A		187804 187805 187706	12,5 kg-Kanister 25 kg-Kanister	13
Spülmaschinenreiniger ACL		187704	12,5 kg-Kanister	130
,		187705	25 kg-Kanister	
Spülmaschinenreiniger Pulver		186701		137

Produkt	PZN	Bestell-Nr.	verpackungseinneit	Seite
terralin® liquid	01655140 01655163	102001 102004	Karton 10 x 1 I-Flasche 10 I-Kanister	64
terralin® PAA	01055105	126203	Karton mit 12 x (2 x 80 ml)-Doppelgebinde	55
terralin® protect	04808727 01874020 04808756	181610 181604 181612 181619 181614 181615	Karton mit 500 x 20 ml-Beutel Karton mit 5 x 2 l-Flasche 5 l-Kanister 20 l-Kanister 2001-Eass 5001-Container	54
thermosept® alka clean forte		147301 147302 147308 147304	5 kg-Kanister 10 kg-Kanister 20 l-Kanister 200 kg-Fass	100
thermosept® BSK		144906 144907 144904	5 kg-Kanister 20 I-Kanister 200 kg-Fass	102
thermosept® ED		181001 181003	5 I-Kanister 20 I-Kanister	10
thermosept® EndoCleaner		127610 70000879	5 I-Kanister 5 I-Kanister (mit BHT 6 Pin Stecker)	10
thermosept® ER		189901 189910	5 I-Kanister 20 I-Kanister	105
thermosept® NDR		144807	20 I-Kanister	10
thermosept® NKP		144804 146403	200 kg-Fass 6 kg-Kanister	10
thermosept® NKZ		146503 146508	5 kg-Kanister 10 kg-Kanister	101
thermosept* PAA		125702 125802 70001117 70001116 70000882 70000881 70000168 70000167	thermosept® PAA base / additive (5 l) - base - Karton mit 2 x 5 l-Kanister - additive - Karton mit 2 x 1 k-Kanister thermosept® PAA base / additive (2001) - base - 200 l-Fass - additive - 200 l-Fass - additive - 200 l-Fass - additive - 201 k-Fass - base - Karton mit 2 x 5 l-Kanister - base - Karton mit 2 x 5 l-Kanister - additive - Karton mit 2 x 5 l-Kanister - additive - Karton mit 2 x 5 l-Kanister - additive - Karton mit 2 x 5 l-Kanister - additive - S l-Kanister - S l-Kanister - S l-Kanister - S l-Kanister	100
thermosept® RKF		146305 146308	5 kg-Kanister 5 kg-Kanister (Sonderkanister)	10
thermosept® SKS		145806	5 kg-Kanister	107
thermosept® washer BP 31 (Steckbeckenspüler)		145803 681000 681005 681100 681105	5 kg-Kanister (Sonderkanister) (400 Volt / 16 Ampere) (400 Volt / 16 Ampere) inkl. NetCom (230 Volt / 16 Ampere) (230 Volt / 16 Ampere) inkl. NetCom	107/119
thermosept® X+tra		127604 127605 127612 127607 70001167	5 I-Kanister 10 I-Kanister 20 I-Kanister 20 I-Fass 500 I-EC Container	100
touchless PA1 Präparatespender		60000115 60000116	touchless PA 1 Edelstahlsäule für touchless PA 1	110
Typ KHK Typ KHL Typ KHN touchless		669600 669602 669602 669700 669700 669710 669610 669610 669710 669710 669713 669718	KHK 500 ml (mit Kunststoffpumpe) KHK 500 ml (mit Edelstahlpumpe) KHK 500 ml (mit Edelstahlpumpe) KHK 1.000 ml (mit Kunststoffpumpe) KHK 1.000 ml (mit Edelstahlpumpe) KHK 1.000 ml (mit Edelstahlpumpe) KHK 1.000 ml (init Kunststoffpumpe) KHL 500 ml (mit Kunststoffpumpe) KHL 500 ml (mit Kunststoffpumpe) KHL 500 ml (mit Kunststoffpumpe) KHL 1.000 ml (mit Kunststoffpumpe) KHL 1.000 ml (mit Edelstahlpumpe) KHL 1.000 ml (Gounter) KHH touchless 500 ml (mit Edelstahlpumpe) KHH touchless 1.000 ml (mit Edelstahlpumpe)	114
Universal Flaschenhalter		70001419 70001420	500 ml-Universal Flaschenhalter 1000 ml-Universal Flaschenhalter	117
Vorreinigungskomponente		186902	Karton mit 2 x 5 I-Kanister	137
Wandhalterung für Vierkantflaschen		134411 134416	500 ml-Wandhalterung 1000 ml-Wandhalterung	117
Wandhalterung mikrozid® <i>Jumbo</i> Dose Wandhalterung kodan® mikrozid® Dose		134421 134417	Wandhalterung Jumbo Wandhalterung Dose	117
Wandhalterung Softpack / premium		70001119 70001496	Wandhalterung Softpack Wandhalterung Softpack <i>premium</i>	118
Wandhalterung schülke wipes		134430 134435	Wandhalterung Eimer schülke wipes Wandhalterung Box schülke wipes	118
Wandhalterung perform® spray bottle holder		693540 693541 669305	perform® spray bottle holder perform® spray bottle holder-Platte Empfehlung: glabete Klebsystem	118
Wasserfilter		007303	FILT'RAY ²⁶	122
Wischpflege plus		174604	10 I-Kanister	14

Wunde | Haut | Schleimhaut Wund- u. Schleimhautantiseptik, Wundmanagement, MRE-Dekon-tamination S. 32 - 47

Fläche Desinfektion und Reinigung S. 48 - 73

Sterile Produkte für die herstellende Apotheke S. 74 - 83

Instrumente Manuelle und maschinelle Aufbereitung S. 84 - 107

Hygienetechnik Zubehör, Hygienetechnik und Applikationshilfen S. 108 - 127

Küchenhygiene für Geschirr, Geräte und Flächen S. 128 - 147

Die Inhalte dieses Katalogs werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kön nen wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Haut | Hände Händedesinfektion, Hände- und Körperwaschung, Hautpflege S. 10 - 31



schülke weltweit:

Australien

Schulke Australia Pty Ltd Macquarie Park NSW 2113 Telefon +61 2 8875 9300 Telefax +61 2 8875 9301

Indien

Schulke India Pvt. Ltd. Neu Delhi 110044 Telefon +91 11 30796000 Telefax +91 11 42595051

Österreich

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. 1070 Wien Telefon +43 1 523 25 01 0 Telefax +43 1 523 25 01 60

Slowakei

Schulke SK, s.r.o. 97101 Prievidza Telefon +421 46 549 45 87 Telefax +420 558 320 261

Brasilien

Vic Pharma Indústria e Comércio Ltda. Taquaratinga/SP – CEP 15900-000 Telefon +16 3253 8100 Telefax +16 3253 8101

Italien

Schülke & Mayr Italia S.r.l. 20158 Mailand Telefon +39 02 40 26 590 Telefax +39 02 40 26 609

Polen

Schulke Polska Sp. z o.o. 02-305 Warschau Telefon +48 22 11 60 700 Telefax +48 22 11 60 701

Tschechische Republik

Schulke CZ, s.r.o. 73581 Bohumín Telefon +420 558 320 260 Telefax +420 558 320 261

Shanghai Representative Office Shanghai 200041 Telefon +86 21 62 17 29 95 Telefax +86 21 62 17 29 97

Malaysia

Schülke & Mayr (Asia) Sdn Bhd. 47301 Petaling Jaya, Selangor Telefon +60 3 78 85 80 20 Telefax +60 3 78 85 80 21

Russland

Moscow Representative Office 123001, Moskau Telefon +7 499 270 58 75 Telefax +7 962 902 77 15

Frankreich

Schülke France SARL 92806 Puteaux, Paris La Défense Telefon +33 1 42 91 42 42 Telefax +33 1 42 91 42 88

Neuseeland

Schulke New Zealand Limited Auckland 1010 Telefon +61 2 8875 9300 Telefax +61 2 8875 9301

Schweiz Schülke & Mayr AG 8003 Zürich Telefon +41 44 466 55 44 Telefax +41 44 466 55 33

Großbritannien

Schülke & Mayr UK Ltd. Sheffield S9 1AT Telefon +44 114 254 35 00 Telefax +44 114 254 35 01

Niederlande

Schülke & Mayr Benelux B.V. 2031 CC Haarlem Telefon +31 23 535 26 34 Telefax +31 23 536 79 70

Singapur

Schülke & Mayr (Asia) Pte. Ltd. Singapur 159410 Telefon +65 62 57 23 88 Telefax +65 62 57 93 88

... sowie unsere internationalen Distributeure



youtube.com/schuelkeChannel



facebook.com/myschulke

instagram.com/schuelke_com

Schülke & Mayr GmbH

22840 Norderstedt | Deutschland Telefon | Telefax +49 40 52100-0 | -318 www.schuelke.com

Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe

